

# ヴィンテージ アート ユニバーサル 山本リキッド

## 【使用目的、効能又は効果】

- ・本材はヴィンテージ アート ユニバーサルの練和に使用する。
- ・本材はヴィンテージ アート ユニバーサルの基材ガラスと同じ屈折率に設計している。  
このため本材を練和液として使用することで、焼成後の色調を塗布作業の段階で確認することができる。

## 【操作方法又は使用方法等】

- ・ヴィンテージ アート ユニバーサルに混ぜて操作性を調整する。

## 【使用方法に関する使用上の注意】

- ・ヴィンテージ アート ユニバーサル以外の歯科セラミックス用着色材料には使用しないこと。
- ・本材は他の練和液と混ぜて使用しないこと。
- ・容器の蓋をとったままにしておかないこと。
- ・本材はプラスチック類を溶かす恐れがあるため、練和パレットにはガラスもしくは磁器製を使用すること。

## 【使用上の注意】

### [ 重要な基本的注意事項 ]

- ・本材を直接素手で触れないこと。また皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。  
皮膚に付着した場合には、すぐにアルコール綿などで拭った後、流水で洗浄すること。  
万が一目に入った場合には、すぐ大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。
- ・本材の使用により、発疹、皮膚炎などの過敏症状が現れた術者は使用を中止し、医師の診察を受けること。
- ・本材は可燃性ですので、火気の近くで使用したり、火気の近くに置かないこと。
- ・本材を使用する際には、適切な換気(1時間あたり数回の換気)がなされている場所で使用すること。
- ・高温となる場所(ストーブの側、直射日光の当たる場所など)では使用しないこと。
- ・本材は【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・本材は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

## 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- ・直射日光を避けて火気厳禁の屋内に密栓して室温で保管すること。
- ・本材を歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。
- ・パッケージまたは容器に記載された使用期限内に本材を使用すること。

(記載例:  YYYY-MM-DD → 使用期限YYYY年MM月DD日を示す)

## 【包装】

ヴィンテージ アート ユニバーサル 山本リキッド 50mL

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元 株式会社 松風  
 住所 〒605-0983  
 京都市東山区福稻上高松町11  
 電話番号 075-561-1112



世界の歯科医療に貢献する

**株式会社 松風**

<http://www.shofu.co.jp>

本社●〒605-0983京都市東山区福稻上高松町11・TEL(075)561-1112(代)