

松風ビッグシリコンポイント

【形状・構造及び原理等】

[構造]

- 1) 作業部：人造研削材（炭化けい素）をシリコンゴムで結合した軸付研磨材。
- 2) 軸部：ステンレス鋼
軸部形式 2：H P 用

【使用目的又は効果】

- 1) 用途
レジン床、各個トレー、歯冠用硬質レジン及び硬質レジン歯の研磨に用いる。
- 2) 種類：4 種
R1（グレー：荒仕上げ）
R2（茶：中仕上げ）
R3（白：研磨仕上げ）
紅（赤茶：中仕上げ）

【使用方法等】

本材を歯科用電動式ハンドピース、歯科用電気エンジン、マイクロモーター及び高速レース等に装着して通法により使用する。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入し半チャックでないことを確認すること。
- 2) 使用前に予備回転を行い、振れないことを確認すること。
- 3) 頭部が大きい形状のため、折れたり曲がったりすることがあるので、無理な角度や過度の加圧での使用は避けること。
- 4) 研磨時の摩擦熱によりゴムが劣化することがあるので、過度の加圧や回転速度での連続的な使用は避けること。

* * 【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
* * 指定の最高許容回転速度を越えて使用しないこと。

最高許容回転速度
15,000min ⁻¹

変形、キレツ、損傷（錆、表面キズ、曲がり、汚損）等のあるものは使用しないこと。

本材を使用して研磨する際には、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。

目の損傷を防ぐために、保護眼鏡等を使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風プロダクツ京都
住所 〒613-0022
京都府久世郡久御山町市田新珠城 21 番地 1
電話番号 0774-41-1321

販売元 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号 075-561-1112