



セラマージュ研磨キットは、1キットで「セラマージュ」の研磨から艶出し仕上げまでを確実かつ効率的に行うことができる研磨システムです。セラマージュのみならず、前装冠用硬質レジン「ソリデックス」など、さまざまな用途で優れた研磨効果を発揮します。

※本品は形態修正・表面性状付与後に使用する研磨・艶出し仕上げ用キットです。カーボランダムポイント等の研削材はお好みに応じてご使用ください。

一般医療機器 26B1X00004

セラマージュ研磨キット…¥9,800

- ① フィッシャーカーバ [HP] ……1本
- ② 松風シリコンポイント HR2 [HP]/#11 ……1本
- ③ 松風シリコンポイント HR2 [HP]/#13S ……1本
- ④ 松風シリコンポイント HR2 [HP]/#28 ……2本
- ⑤ 松風ピボットブラシ SC [HP] ……1本
- ⑥ 松風ピボットブラシ [HP] ……1本
- ⑦ デュラポリッシュ/20g ……1個
- ⑧ デュラポリッシュ タイヤ/5g ……1個
- ⑨ 松風フェルトホイール/#2405 ……1枚
- ⑩ 松風フェルトホイール/#1602 ……2枚
- ⑪ 松風マンドレル [HP] ……2本

for Crown & Bridge, Inlay and Veneer Composite

CERAMAGE

POLISHING KIT [HP]

硬質レジン研磨キット

セラマージュ研磨キット

用途

品名	用途	品名	用途
フィッシャーカーバ [HP]	前歯部舌側面、白歯部咬合面小窩裂溝、ブリッジ隣接部の調整用カーバイドバー。	デュラポリッシュ	中仕上げ用アルミナコンパウンド。
松風シリコンポイント HR2 [HP]	ダイヤモンドポイントやカーボランダムポイントなどによる形態修正・付与後の傷取りおよび面調整用シリコンポイント。	デュラポリッシュ タイヤ	最終仕上げ用ダイヤモンドコンパウンド。
松風ピボットブラシ SC [HP]	シリコンポイントでの研磨が困難な細部（前歯部舌側面、白歯部咬合面小窩裂溝、ブリッジ隣接部）の調整用砥粒含有ブラシ。	松風フェルトホイール #2405:大(直径24×厚み5mm) #1602:小(直径16×厚み2mm)	デュラポリッシュ タイヤ用フェルト。 大:歯面全体の最終仕上げ 小:前歯部舌側面、白歯部咬合面小窩裂溝、ブリッジ隣接部
松風ピボットブラシ [HP]	デュラポリッシュ、デュラポリッシュ タイヤ用羊毛ブラシ。	松風マンドレル [HP]	松風フェルトホイール用HPマンドレル。

使用例

**基本
ステップ**

1
シリコンポイントHR2

2
デュラポリッシュ
+ [ピボットブラシ]

3
デュラポリッシュ タイヤ
+ [ピボットブラシ または、フェルトホイール(大)]

細部の研磨
(前歯舌側、
白歯咬合面、
ブリッジ隣接など)

1
フィッシャーカーバ
または、シリコンポイントHR2

2
ピボットブラシSC

3
デュラポリッシュ タイヤ
+ [ピボットブラシ または、フェルトホイール(小)]

単品商品

一般医療機器 26B1X00004


フィッシャーカーバ [HP]

切削性が高く、レジンの巻き付きが少ない3枚刃を採用。尖った先端形状で、小窩裂溝をシャープに形成できます。

6本

【用途】

各種硬質レジンの小窩裂溝付とおよびブリッジの歯間部微調整。義歯歯間乳頭部、各種クラウン内面の微調整。

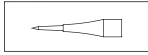

一般医療機器 26B3X00014


松風シリコンポイント [HP] HR2タイプ

研磨のタッチがスムーズで、各種硬質レジンの表面形状を崩さずに研磨できます。また、耐久性にも優れています。

#11、13S、28 各6本

【用途】

各種硬質レジンの、硬質レジン歯などの中仕上げ

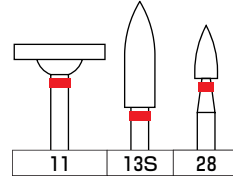

一般医療機器 26B1X00004


松風ピボットブラシ SC [HP]

アラミド繊維に微細な砥粒を含ませたブラシです。優れた傷取り効果で滑らかな研磨面を得ることができます。

3本

【用途】

各種硬質レジンの、硬質レジン歯などの中仕上げ

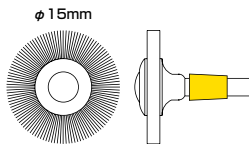

一般医療機器 26B1X00004


松風ピボットブラシ [HP]

補綴物に傷を付けないよう、毛が細かく、耐久性の高い羊毛を採用したロビンソンタイプのブラシです。

12本

【用途】

各種コンパウンド研磨材用

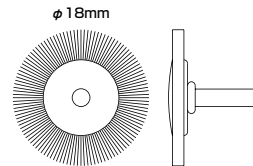

一般医療機器 26B1X00004

デュラポリッシュ

ポイントでは届きにくい裂溝や前歯舌側などに残った比較的大きな傷を簡単に除去できます。メタルや床用レジンの凹凸部の最終仕上げに使用しても、短時間で光沢が得られます。

20g

【用途】

各種硬質レジンの、硬質レジン歯、床用レジン、各種メタルなどの形態修正・付与後の傷取り



一般医療機器 26B1X00004

デュラポリッシュ ダイヤ

砥粒にダイヤモンドだけを使用した高密度ダイヤモンドワックス研磨材。短時間で簡単に艶を出すことができます。陶材にもお勧めです。

5g

【用途】

陶材、各種硬質レジンの、硬質レジン歯の最終艶出し研磨



一般医療機器 26B3X00014

松風フェルトホイール


最適な密度の羊毛を使用した軟かいフェルトの採用により、繊細なタッチと耐久性が得られます。

#2405:大 12枚

#1602:小 12枚

【用途】

各種コンパウンド研磨材用。最終研磨面の拭き取り。

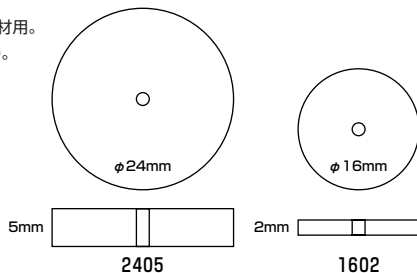

一般医療機器 26B1X00004

松風マンドレル [HP]

12本

【用途】

ホイール・ディスク用



このカタログに記載の価格は2006年1月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は添付書類等をよく読んでお使いください。