

コンポジット
レジン用

STEP 1 形態修整

形態修整から仕上研磨まで
レジン充填後の研磨を2ステップで仕上げます

STEP 2 仕上研磨



FINISH!



ツヤのある美しい仕上がり

◆ ◆ CR POLISHING KIT ◆ ◆

CRポリッシングキット

コンポジットレジン用研磨キット

超微粒子ダイヤモンドによる効率の良い形態修整が可能な「ダイヤモンドポイントFG（スーパーファイン）」。

ワンステップで光沢仕上研磨が可能な「CRポリッシャーPS（CA）」と「コンポマスター（CA）」。

レジン充填後の形態修整・研磨に必要な研磨材をコンパクトにまとめました。

各種レジンに対応

コンポジットレジンだけでなく、
フロアブルコンポジットレジンや
ハイブリッドレジンなど
各種レジンに対応します。

各部位に対応

形態修整には6形態、
仕上研磨には4形態。
厳選したラインナップで
様々な部位に対応します。

コンパクトで手軽に滅菌可能

収納ケースには耐熱性・耐薬品性に優れた
高機能樹脂製バースタンド「バーステーションⅡ」を使用。
そのまま薬液・オートクレーブでの消毒・滅菌ができます。
コンパクトサイズで場所も選びません。

SHOFU INC.

レジン充填

STEP 1 形態修整

効率良く形態修整でき、研磨面を整えることができるダイヤモンドポイントFG（スーパーファイン）をご使用ください。汎用性の高い6形態を取り揃えていますので幅広い症例に対応いただけます。



●松風ダイヤモンドポイントFG（スーパーファイン）



STEP 2 仕上研磨

形態修整後の光沢研磨をワンステップで仕上げることができます。各種レジンに対応できる2種類の研磨材を用意しましたので、使用部位・被研磨体に応じて使い分けてください。


※被研磨体ごとの相性は下表をご参照ください。

■被研磨体ごとの相性

種類 (CA)	研磨性 (光沢度)					推奨 研磨術式	研磨のポイント
	硬質レジン歯	70アルコンボジットレジン	硬質レジン	コンボジットレジン	ハイブリッドレジン		
CRポリッシャーPS	◎	◎	◎	◎	○	湿 式	少し力を加えて研磨するとより早く光沢を得られます。*
コンボマスター	○	○	○	◎	◎	乾 式	発熱に注意して軽いタッチで研磨してください。

※ポイントが軟らかいため、力を加えずに注意してください。

●CRポリッシャーPS (CA)

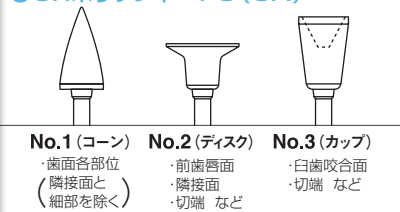

●コンボマスター(CA)



●販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
CRポリッシングキット	歯科用研磨器材	一般医療機器 製造販売届出番号 26B1X00004000182

●包装・価格



CRポリッシングキット 一式

■キット内容

- 松風ダイヤモンドポイントFG（スーパーファイン）／ SF215・SF217・SF219・SF319・SF416・SF440 各1本
最高許容回転速度：160,000min⁻¹・300,000min⁻¹・450,000min⁻¹
- CRポリッシャーPS (CA) / No.1 (コーン)・No.2 (ディスク)・No.3 (カップ) 各1本
最高許容回転速度：5,000min⁻¹
- コンボマスター (CA) / No.28 1本
最高許容回転速度：20,000min⁻¹
- パーステーションII / ブルー・イエロー 各1個

●関連商品



コンボジットレジン・
硬質レジンの仕上研磨用
ダイヤモンドポリッシャー
CRポリッシャーPS(CA)
No.1 (コーン)……6本入
No.2 (ディスク)……6本入
No.3 (カップ)……6本入



歯科用ダイヤモンド研削材
**松風ダイヤモンドポイントFG
(スーパーファイン)**
100クラス…1本
200クラス…1本
300クラス…1本
400クラス…1本



滅菌対応パースタンド
パーステーションII
1個
色調/2色 (ブルー、イエロー)
収納/FG:11本
CA:6本
サイズ/W42×D23×H31 (mm)



コンボジットレジン仕上研磨用
ダイヤモンドポリッシャー
コンボマスター(CA)
No.10S…3本入
No.13S…3本入
カップ…3本入
No.28…4本入



REALITYは米国の3大評価機関の
一つで、その評価は臨床的視点で
重視されます。
そのREALITYでコンボマスターは
4つ星の高評価を獲得しました。

ご使用の際は、添付文書等をよく読んでお使いください。

価格は2007年7月現在の標準医院価格（消費税抜き）です。

取扱い店