

## エラスチールバー

### 【形状・構造及び原理等】

#### 〔形状・種類〕

- 1) 作業部：ラウンド  
フィッシャーテーパー
- 2) 軸部：軸部形式1：CA用  
軸部形式2：HP用

#### 〔構造〕

- 1) 作業部：工具鋼
- 2) 軸部：工具鋼

### 【使用目的又は効果】

歯科技工補綴物などの研削及びレジン歯、レジン床、歯冠用硬質レジン、金属等の形態修整及び歯触象牙質の除去に用いる。

### \* 【使用方法等】

#### 〔使用方法〕

- 1) 本材を口腔内で使用する場合は滅菌する。
  - 2) 歯科用電気エンジン、マイクロモーター、高速レーズに装着して使用する。
- \* 3) 口腔内使用後、再使用する際には速やかに、清掃液、消毒剤を用いて付着物を除去した後、滅菌を行う。  
滅菌方法：ケミクレープ、乾熱又は各種薬液による滅菌を行う。

#### 〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入し半チャックでないことを確認すること。
  - 2) 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
  - 3) 頭部が細い形状は、折れたり曲がったりすることがあるので、無理な角度や過度の加圧での使用は避けること。
  - 4) 水洗後は水分付着による発錆を避けるため、速やかに乾燥させること。なお、塩素系消毒剤は腐食を避けるため使用しないこと。
- \* 5) 滅菌については、ケミクレープ、乾熱又は各種薬液によっても可能であるが、各機器メーカーもしくは各薬液メーカーの指示に従って行うこと。

### \*\* 【使用上の注意】

#### 〔重要な基本的注意〕

- \*\* 1) 指定の最高許容回転速度（製品の被包に記載）を超えて使用しないこと。
- 2) 変形、振れ、損傷（錆、表面キズ、曲がり、汚損）などのある本材は使用しないこと。
  - 3) 目の損傷を防ぐため、保護眼鏡を使用すること。
  - 4) 本材を使用して研削する際には、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 〔保管方法〕

- ・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風  
住所 〒605-0983  
京都市東山区福稻上高松町11  
電話番号 075-561-1112