

歯科材料9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

松風フェルトホイール

【形状・構造及び原理等】

[構造]

羊毛製の円盤状フェルト。

種類	直径	厚さ
#1602	16mm	2mm
#2405	24mm	5mm

【使用目的又は効果】

歯科修復物の研磨に用いる。

**【使用方法等】

本材を歯科用マンドレルに取付け、歯科用電動式ハンドピース、歯科用電気エンジン、マイクロモーター及び高速レーズ等に装着して通法により使用する。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) 歯科用マンドレルに確実に固定すること。
- 2) ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入し半チャックでないことを確認すること。
- 3) 必ず右回転で使用する。
- 4) 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- 5) 無理な角度や過度の加圧での使用は避けること。
- 6) 口腔内では使用しないこと。
- **7) 研磨材ペースト等を使用する場合は、ペーストが飛散する恐れがあるため、 $5,000 \text{ min}^{-1}$ 以下の回転速度で使用する。

**【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- **1) 指定の最高許容回転速度を超えて使用しないこと。

最高許容回転速度
$10,000 \text{ min}^{-1}$

- 2) 破損等のあるものは使用しないこと。
- 3) 本材を使用して研磨する際には、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
- 4) 目の損傷を防ぐために、保護眼鏡等を使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- * 製造販売業者 株式会社 松風プロダクツ京都
* 住所 〒613-0022
京都府久世郡久御山町市田新珠城 21 番地 1
* 電話番号 0774-41-1321

- 販売業者 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号 075-561-1112