

フィッシャーカーバ FG

ポーセレンの小窩裂溝形成に最適!

フィッシャーカーバ FG は、主に陶材、ハイブリッドセラミックスの細部調整に用いるFGタイプの技工用カーバイドバーです。



裂溝形成



写真提供/デンタル・クリエーション・アート
西村 好美 先生

ノンエッジ・テクニック 山本 眞 先生

「ノンエッジ・テクニック」を発表してから久しくなりますが、やっと専用のバーが発売されました。

皆さん、ポーセレンの咬合面形態付与にお使いください。

主な対象切削物

- ・陶材
- ・ハイブリッドセラミックス
- ・各種合金

用途

- 陶材、ハイブリッドセラミックスの咬合面の形態付与、およびブリッジの歯間部微調整
- 各種クラウン内面の微調整



鋭く尖った先端形状

先端形状が三角錐に成形されているため、小窩裂溝をシャープに形成できます。

フィッシャーカーバは3枚刃で切削性が高いので陶材が黒くなりません。

使用上の注意

※押し込み式チャックへの装着の際には、指の突き刺しや作業部の破折にご注意ください。

※作業部が細く、長いので破折しやすいため、できるだけ軽いタッチで、破折に注意しながら使用すること。

※作業部の先端0.8mm位までを使用し、その他の部分(作業部側面等)を使用しないこと。

※目の損傷を防ぐために、保護眼鏡を使用すること。

※技工用カーバイドバーのため、FG用でも口腔内で使用しないでください。

※最高許容回転速度(回転数)450,000min⁻¹を越えて使用しないこと。

このカタログに記載の価格は2006年1月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

取扱い商店名



一般医療機器 26B1X00004
細部形成用カーバイドバー
フィッシャーカーバ FG
【包装】3本



関連商品
一般医療機器 26B1X00004
技工用エアタービン
松風ラボエア-Z オイルフリーキット