

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

松風ピボットブラシ

*【形状・構造及び原理等】

[形状]

本材は技工用の軸付き研磨ブラシであり、作業部と軸部からなる。

[構造]

種類	作業部	軸部	軸部形式
松風ピボットブラシ	羊毛ブラシ	ニッケルメッキ鋼	HP用
松風ピボットブラシ SC	砥粒含有アラミドブラシ	ニッケルメッキ鋼	

[仕様]

*寸法：下表のとおり

単位：mm

種類	ブラシ径
松風ピボットブラシ	19.5
松風ピボットブラシ SC	15.0

【使用目的又は効果】

- 1) 松風ピボットブラシは、デュラポリッシュ等の技工用の研磨コンパウンドを付けて歯科修復物の研磨に使用する。
- 2) 松風ピボットブラシ SCは、砥粒含有ブラシで硬質レジンの技工研磨に使用する。

【使用方法等】

[使用方法]

歯科用電気エンジン、技工用レーズなどに装着して使用します。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入し半チャックでないことを確認すること。
- 2) 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- 3) 無理な角度や過度の加圧での使用は避けること。
- 4) 本材の金属部分は錆びる恐れがあるので、水分や蒸気の暴露を避けること。
- 5) 口腔内では使用しないこと。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 1) 指定の最高許容回転速度を超えて使用しないこと。

最高許容回転速度
10,000min ⁻¹

- 2) 変形、損傷等のあるものは使用しないこと。
- 3) 本材を使用して研削する際には、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
- 4) 目の損傷を防ぐために、保護眼鏡等を使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号 075-561-1112