

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科研削用ストリップ 35702000

松風ポリストリップス

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

ポリエステルフィルムの片面にアルミナ質研削材を接着させたものである。

[形状]

種類	厚さ	寸法 (mm)
粗粒 (青)	0.14	3.5×150
細粒 (緑)	0.12	
微粒 (黄)	0.10	

【使用目的又は効果】

コンポジットレジン充填後の研磨仕上げに用いる。

【使用方法等】

[使用方法]

ポリエステルフィルムのアルミナ質研削材が付着している面を用いて、特に隣接面等のコンポジットレジンの研磨を行うものです。研磨材の粒度を粗粒、細粒、微粒の順に用いることで、滑沢な面性状が得られます
なお、本材は再使用禁止品です。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) 本材のエッジは鋭利であるため、手を切ったり、唇や歯肉に傷をつけないように注意すること。
- 2) 本材を鋭角に曲げないこと。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 1) 変形、損傷(曲がり、汚損)等のあるものは使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号 075-561-1112