



シリコンポイント Pタイプ(HP)  
陶歯・陶材研磨仕上げ用  
〈種類・形態〉PA...11  
PB...11、13  
〈包装・価格〉各12本入



セラマスター(HP)  
陶材・歯冠用硬質レジン用  
ダイヤモンドポリッシャー  
〈種類・形態〉4種/10、11、13S、28  
〈包装・価格〉各3本入  
※No.28のみ4本入



セラマスターコース(HP)  
陶材・歯冠用硬質レジン用  
ダイヤモンドポリッシャー  
〈種類・形態〉4種/10、11、13S、28  
〈包装・価格〉各3本入  
※No.28のみ4本入



デュラポリッシュダイヤモンド  
歯科用研磨コンパウンド  
(仕上げ用)  
〈包装・価格〉5g




ピボットブラシ(HP)  
研磨用ブラシ  
〈包装・価格〉12本入

陶材作業用筆 新たにペーストオペーク用とステイン用のブラシを追加発売。

種類	毛質	用途	
NEW No.OP-0	動物毛 (セーブル)	ペーストオペーク用	
NEW No.S-0	動物毛 (セーブル)	ステイン用	
NEW No.S-1	動物毛 (セーブル)	ステイン用	
No.A5	動物毛 (コリンスキー)	築盛用	
No.A7	動物毛 (コリンスキー)	築盛用	
No.10	動物毛	築盛用	
No.2	ナイロン	築盛用	
No.5	ナイロン	築盛用	
No.7	ナイロン	築盛用	

ポーセレンマスター キット

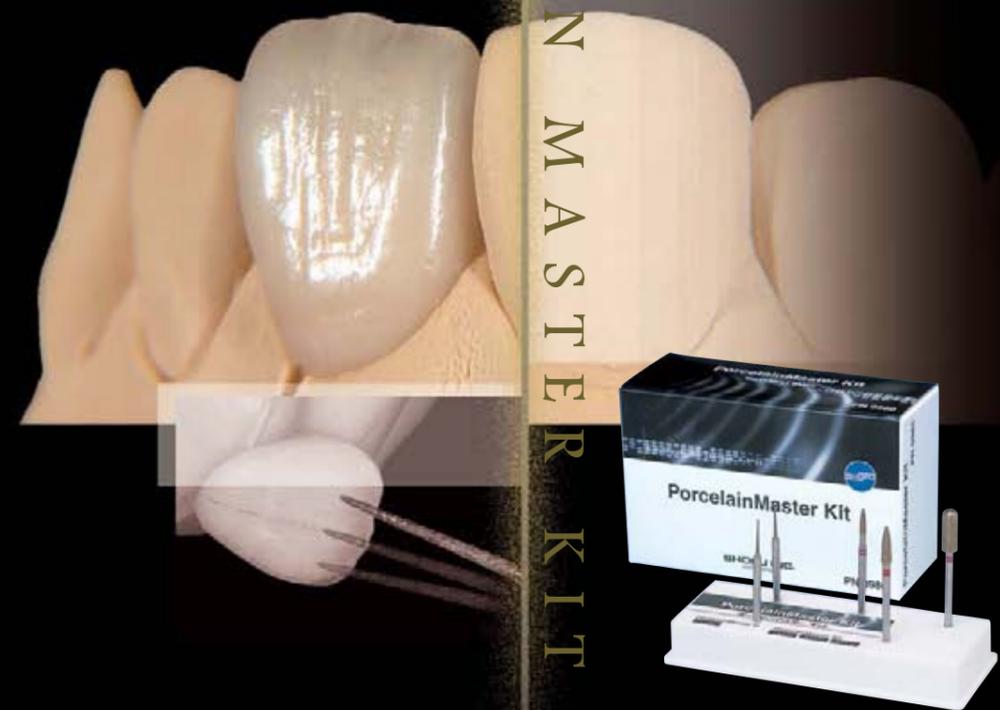

陶材研削用ダイヤモンドポイント

# ポーセレンマスター キット

概形から周波条の付与まで陶材の形態修整を助けます。

カタログに記載の価格は2008年6月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

# 概形から周波条の付与まで 陶材の形態修整を助けるポーセレンマスターシリーズ

Sintered Diamond HP  
Diamond Point HP

Sintered Diamond HP

## 概形確認と形態の再現性

ポーセレンマスター SD

### 50YN

【用途】 概形付与、形態や排列状態の確認

研削性が高く効率的な作業が可能です。概形確認が容易にできることで形態修整に客観性を持たせ、形態の再現性を高めます。

各アングルからの概形確認



先端の丸みを利用



唇側面隆線の付与

舌側面の凹面部の付与

直線部を利用した研削

Sintered Diamond HP

## 隆起や谷間の付与

ポーセレンマスター SD

### 31YN

【用途】 隆線付与、舌側面の形態付与

隆起や谷間を付与するために最適な形状です。



唇側面隆線の付与

舌側面辺縁隆線の付与



横走溝の付与

Sintered Diamond HP


## 形態を繋ぐ切り札

ポーセレンマスター SD

### 19YN

【用途】 隆線の調整、咬合面の形態付与

31YNで付与した形態の調整など、オールマイティに使用できます。

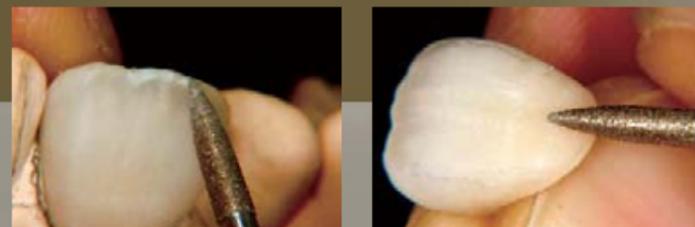

唇側面細部の修整

唇側面V字溝の調整

Diamond Point HP

## 「しなり」が生み出すエレガントな表徴

ポーセレンマスター D


### 1YN

【用途】 表面性状の付与（歯間の調整、咬合面形態の調整）

最適な「しなり」により、自然感のある繊細な表面性状や周波条の再現ができます。



周波条の付与

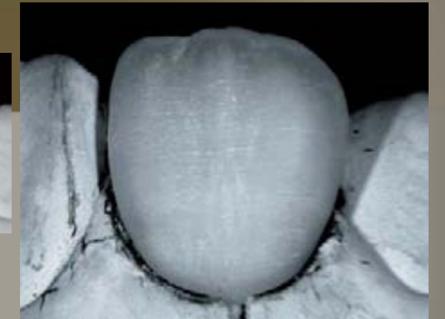

周波条の付与は、歯面の凹凸に沿わせながらバーを近遠心に平行に走らせることがポイントです。決して縦の凹凸を崩さないようにします。

**注意** 1YNは細くて曲がり易いため、無理な力を加えて使用したり高速回転で使用することはお避け下さい。(5,000min<sup>-1</sup>以下)



### 包装・価格・形態

#### ポーセレンマスター キット (HP)

【キット内容】

- ポーセレンマスター D <1形態> 2本/1YN
- ポーセレンマスター SD <3形態> 各1本/19YN, 31YN, 50YN

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
ポーセレンマスター キット	歯科技工用研削・研磨器材キット	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000203
ポーセレンマスター D	歯科技工用ダイヤモンド研削材	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000201
ポーセレンマスター SD	歯科技工用ダイヤモンド研削材	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000202



【単品販売】  
ポーセレンマスター D (HP)  
<形態> 1種  
<包装・価格> 1本入  
1YN



【単品販売】  
ポーセレンマスター SD (HP)  
<形態> 3種  
<包装・価格> 各1本入  
19YN  
31YN  
50YN

