

歯科材料9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯面研磨材 70904000

プレサージュ

【禁忌・禁止】

本材及び本材に使用している成分に対し、発疹、皮膚炎等の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

[形状]

性状：ペースト

[構造]

成分：パーミス、グリセリン、CMC、パラベン、その他

【使用目的又は効果】

歯面の研磨、清掃に用いる。

【使用方法等】

本材をメルサージュブラシまたはメルサージュカップに適量採り（またはペーパーパッドに取り出してから採取） $2,000\text{min}^{-1}$ 以下の回転速度で歯面研磨を行います。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) 高速回転で使用するとペーストが飛び散る恐れがあるので、 $2,000\text{min}^{-1}$ 以下で使用すること。
- 2) 本材が付着したブラシやカップは乾燥すると残渣が落ちにくくなる場合があるので、使用後は速やかに水で洗浄すること。
- 3) ペーストは液成分が分離する可能性があります、品質には問題ありません。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 1) 本材の使用により、発疹、皮膚炎などの過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- 2) 本材を使用して研磨する際には、目の損傷を防ぐために術者及び患者は保護眼鏡等を使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本材は、直射日光の当たらない涼しい場所に保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町11
電話番号 075-561-1112