



歯科用ゴム製研磨材  
ジルコシャイン

# ZIRCOSHINE CA

ダイヤモンド  
砥粒含有



ジルコシャイン

口腔内装着後のジルコニアや二ケイ酸リチウムの研磨に  
ジルコニアを鏡面研磨し、表面を整えることが対合歯摩擦リスクの  
軽減につながると、近年、学会等で数多く報告されています。






3ステップ研磨 コース・ミディアム・ファインの順にジルコニアを研磨

試験条件：  
使用ポイント / HP#11  
回転速度 / 10,000min<sup>-1</sup>  
荷重 / 1N  
研磨時間 / 各1分(トータル3分)

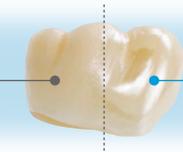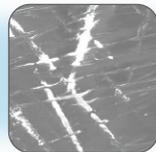

傷を少なく仕上げることが  
対合歯摩擦リスクの  
軽減につながります

試験条件：  
使用ポイント / HP#11  
回転速度 / 10,000min<sup>-1</sup>  
荷重 / 1N  
研磨時間 / コース1分、ファイン2分  
(トータル3分)

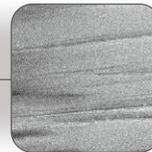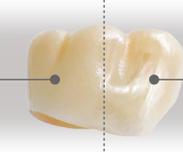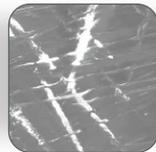

ツヤは出ているものの  
拡大してみると  
研磨傷が残っています

2ステップ研磨 コース・ファインの順にジルコニアを研磨

※自社試験による


## 包装・価格

まずはお求め  
やすいキットで  
お試しください




### ジルコシャイン セレクトキット CA

1キット  
【キット内容】  
松風ビトリファイドダイヤ (28、29) 各1  
ジルコシャイン コース (28) 2  
ジルコシャイン ミディアム (28) 1  
ジルコシャイン ファイン (28) 1  
パーステーションII (ブルー、イエロー) 各1  
【最高許容回転速度】  
ジルコシャイン: 20,000min<sup>-1</sup>  
松風ビトリファイドダイヤ: 30,000min<sup>-1</sup>

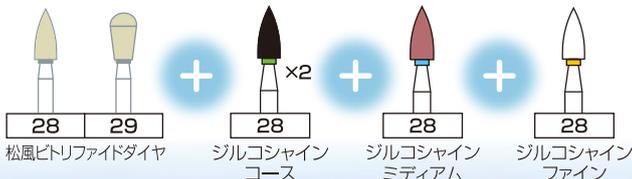

### ジルコシャイン CA

[28] 4本入 [Cup] 3本入  
【形態】 各種2形態  
【最高許容回転速度】 20,000min<sup>-1</sup>  
【種類】 3種  
■ コース  
■ ミディアム  
■ ファイン  
■ 研磨材の色  
■ チューブの色

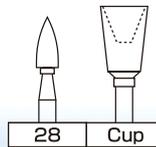


スムーズに  
形態修整が  
可能



### 松風ビトリファイドダイヤ FG CA

FG: 3本入 【形態】 25、28  
CA: 3本入 【形態】 28、29、43  
【最高許容回転速度】 30,000min<sup>-1</sup>

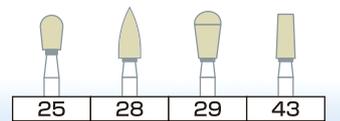

# ZIRCOSHINE HP

ジルコシャイン

ダイヤモンド  
砥粒含有

硬度の高いジルコニアや二ケイ酸リチウムも艶やかに

ジルコニアの研磨  
— 大白歯クラウン —



● コース ● 中仕上げ研磨

● ミディアム ● 仕上げ研磨

○ ファイン ● 最終仕上げ研磨

二ケイ酸リチウムの研磨  
(ヴィンテージLD プレスなど)  
— 小白歯クラウン —

二ケイ酸リチウムを研磨  
する場合、コースの工程  
は省略いただけます。




## 包装・価格



ジルコシャイン HP  
10,11 ..... 3本入  
28 ..... 4本入  
ホイール5 ..... 1枚入  
【最高許容回転速度】  
20,000min<sup>-1</sup> (ホイール5は15,000min<sup>-1</sup>)  
【種類】3種  
● コース ● ミディアム  
● ファイン ● [研磨材の色]  
[チューブの色]

【形態】各種4形態

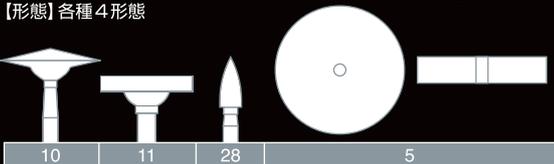

スムーズに  
形態修整が  
可能

松風ビトリファイドダイヤ HP  
28,29,42,43 ..... 3本入  
20 ..... 3本入  
11 ..... 2本入  
10,70 ..... 2本入  
【最高許容回転速度】30,000min<sup>-1</sup>



最終の  
ツヤ出しに

ジルグロス  
20g .....  
40g .....  
【最高許容回転速度】10,000min<sup>-1</sup>

## 販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
ジルコシャイン セレクトキット	歯科用研磨器材	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000258
ジルコシャイン	歯科用ゴム製研磨材	一般医療機器 医療機器届出番号 26B3X00014000017

取扱い店

カタログに記載の価格は2023年1月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は添付文書などをよく読んでお使いください。



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

● 本社: 〒605-0983京都市東山区福福上高松町11 お客様サポート窓口(075)778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00(土日祝除く) [www.shofu.co.jp](http://www.shofu.co.jp)  
● 支社: 東京(03)3832-4366 ● 営業所: 札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595  
2301AJSw