


包装

販売名	一般の名称	承認・認証・届出番号
松風ブロック HC ハード AN	歯科切削加工用レジン材料	管理医療機器 医療機器認証番号 302AKBZX00071000



松風ブロック HC ハード AN (5個入)

色調 4色 A1-ML、A2-ML、A3-ML、A3.5-ML
※MLはマルチレイヤーを表しています
サイズ 14L

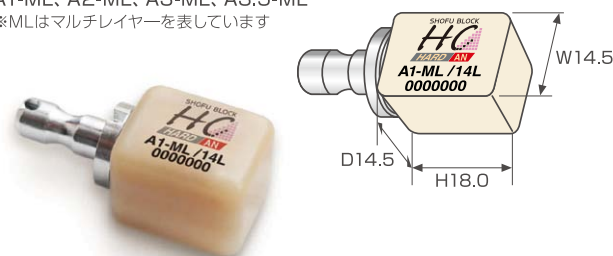


関連製品



CAD/CAM冠用材料(Ⅲ) 健保適用
松風ブロック HC スーパーハード
5個入
〈サイズ〉1種類 Mサイズ
〈色調〉4色 A2-LT、A3-LT、A3.5-LT、A4-LT



CAD/CAM冠用材料(Ⅱ) 健保適用
松風ブロック HC ハードⅡ
Sサイズ(5個入)
Mサイズ(5個入)
Lサイズ(1個入)
〈サイズ〉3種類 S、M、L
〈色調〉4色 A2-LT、A3-LT、A3.5-LT、A4-LT

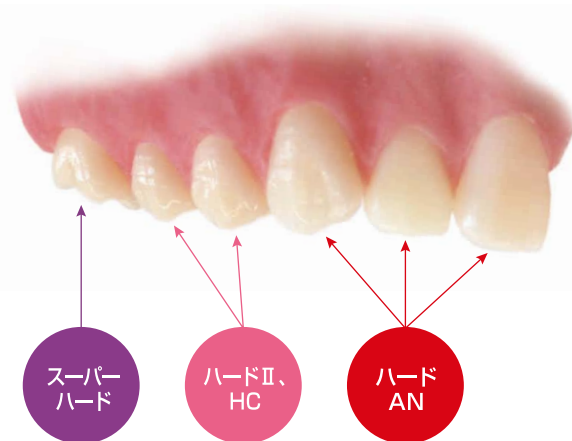

スーパーハード

ハードⅡ、HC

ハード AN

※写真はハードⅡ



CAD/CAM冠用材料(Ⅰ) 健保適用
松風ブロック HC (5個入)
単層
Sサイズ Mサイズ
〈サイズ〉2種類 S、M
〈色調〉LT 6色: W2-LT、A1-LT、A2-LT、A3-LT、A3.5-LT、B3-LT
HT 3色: A1-HT、A2-HT、A3-HT
エナメル 2色: 59、OC

2レイヤー(2層)

Sサイズ Mサイズ
〈サイズ〉2種類 S、M
〈色調〉4色: A1-2L、A2-2L、A3-2L、A3.5-2L
※2Lは2Layer(2層)を表しています。



松風ダイヤモンドポイント FG
CAD/CAMプレブラーシヨ
ンキット
1キット
〈キット内容〉
11形態 各1本、
パステーションⅡ
(ブルー、イエロー) 各1個
1本
(265R、SF265Rは1本)



CAD/CAM用レジンブロック対応
レジメンシステム
ブロックHCセム
ハンドミキシングセット
1セット



CAD/CAM用レジンブロック対応
レジメンシステム
ブロックHCセム
オートミキシングセット
1セット



デュラポリッシュ ダイヤ
5g



キャラクターライズ用ペースト
(レジン系材料用)
ライトアート フルセット
一式
〈セット内容〉ペースト15色、
その他ユニブラシなど
〈ペースト単品〉1mL 1本

取扱い店

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

CAD/CAM冠用材料(Ⅳ)

FOR ANTERIOR



グラデーションにこだわった

前歯用設計






111 松風ブロック HC ハード AN (切端部はわずかにライトアート<ステイン>を施した)

前歯用
グラデーション

こだわり抜いた色調設計により層構造の境目が目立たず、
ながれるようなグラデーションを実現。前歯に求められる審美的要求にお応えします。

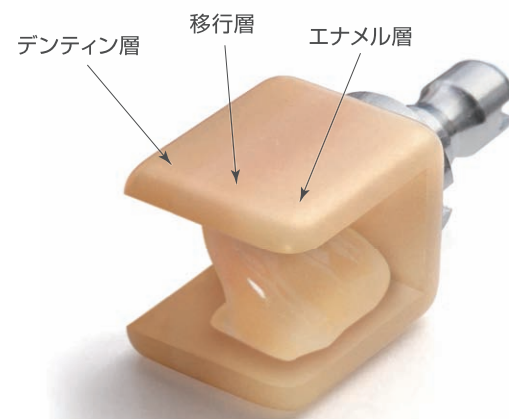

前歯用
物性

CAD/CAM 冠用材料 (Ⅳ) に求められる諸物性を十分にクリアするすぐれた物性

	CAD/CAM冠用材料 (Ⅳ) 定義	松風ブロック HC ハード AN
長さ (mm)	歯冠長に相当する長さ14mm以上	14.5
無機成分量 (wt%)	60以上	67
曲げ強さ (MPa)* 37℃ 水中浸漬7日後	160以上	222
ビッカース硬さ (HVO.2)* 37℃ 水中浸漬1日後	55以上	98
吸水量 (μg/mm ³)*	32以下	28


*JDMAS 245: 2020

(代表値)

前歯用
形成

POINT

- ・ マージン部は 0.8mm 以上の厚みになるように、ディープシャンファー又はラウンデッドショルダーで形成してください。
- ・ 切端部は 1.5 ~ 2.5mm、唇側面部及び舌側面部は 1.2mm 以上の厚みを確保するように形成してください。

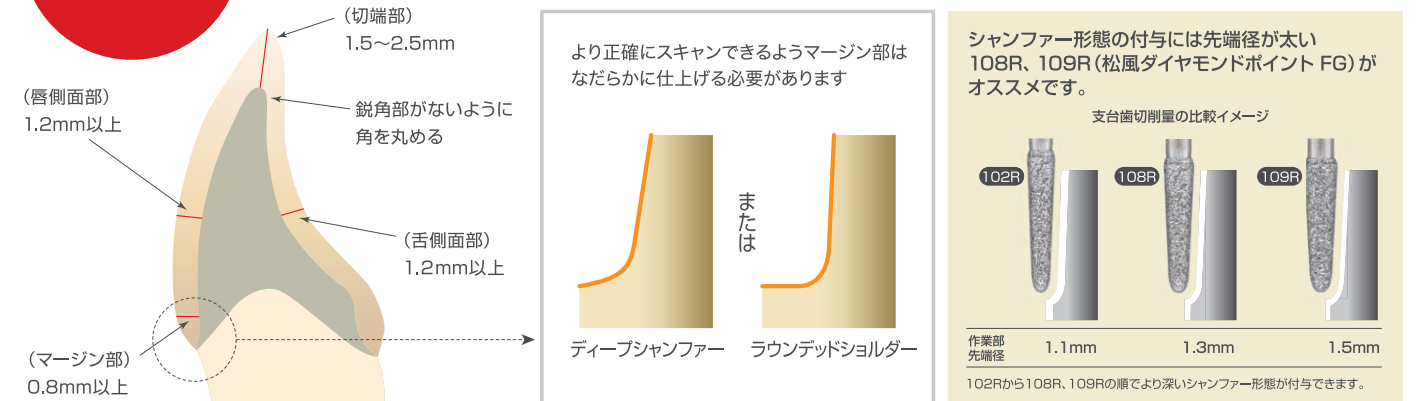

前歯用
研磨ステップ

