

歯科材料 8 歯科用石こう及び石こう製品
一般医療機器 歯科用焼石こう 70897010

松風ポアー plaster

【形状・構造及び原理等】

[成分]

性状	成分
粉	硫酸カルシウム半水塩、石英、その他

[仕様]

(試験室温 23)

項目	仕様
混水量(粉 100 g に対して)	70mL
硬化時間	13分
硬化膨張	0.15%
圧縮強さ	3.9MPa

自社試験による

【使用目的又は効果】

- 1) 硫酸カルシウムを主成分とする焼石こうである。
- 2) 義歯床用アクリル系レジン(タイプ2、クラス2の流し込み用常温重合レジン)の型材に用いる。

【使用方法等】

- 1) 粉 100 g に対し水 70mL の割合で計量します。
(1回の埋没には 200g が適量です。)
- 2) 練和は家庭用の泡立て器等が便利で、ほぐすように混ぜ合わせます。
- 3) 練和終了後、直ちに脱泡して、注入します。注入後、20~30分で硬化します。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 1) 本材が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。
- 2) 本材を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用すること。
- 3) 本材の硬化物を研削する際には、目の損傷を防ぐために、保護眼鏡などを使用すること。

【保管方法及び有効期間等】


[保管方法]

- ・本材は、高温多湿の場所を避けて保管すること。
- ・開封後は、密封して保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

[有効期間]

本材の使用期限は包装に記載のとおり。

[当社データによる]

(例  YYYY MM DD は 使用期限 YYYY 年 MM 月 DD 日を示す)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号 075-561-1112