

歯科材料 7 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用ユーティリティーワックス 70896000

松風ビーディングワックス

【形状・構造及び原理等】

〔成分〕

マイクロクリスタリンワックス、その他

〔原理〕

加熱によって溶融し、冷却によって凝固する。

〔仕様〕

融点：84℃

【使用目的又は効果】

印象周縁の保護、印象材の溢出防止や部分的な補足、模型に対する人工歯の仮着などの広範囲のユーティリティーワックスとして用いる。

【使用方法等】

1) 印象周縁保護の場合

- ①印象採得したトレーの周縁頂より 5mm 下方に本材を圧接し、印象周縁を保護します。
- ②その回りを厚紙で囲みます。
- ③これに模型用石こうを注入し、ガラス板をのせて基底面とします。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- 1) 本材は、可燃性であるので、使用の際は火傷をしないように注意すること。
- 2) 過度の加熱や、加熱したままでの放置はしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・本材は、直射日光を避け、室温（1～30℃）にて保管すること。
- ・本材の使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- ・本材は、火気厳禁の場所に保管し、ひとつの保管場所に多量に保管しないこと。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社 松風
住所	〒605-0983 京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号	075-561-1112