

歯科材料7 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用パターン成形品 31836030

松風ワックスパターン

【形状・構造及び原理等】

[形状・種類]

形状:薄板状4種類

ワックスリテンション NO.1	菱形穴メッシュ
ワックスリテンション NO.2	正方形穴メッシュ
ワックスリテンションホール	円形穴メッシュ
ワックスリテンションリッジ	両側波形板状8連

[成分]

パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックス、その他

[仕様]

融点:72

【使用目的又は効果】

金属床の維持部のワックスパターン製作に用いる。

【使用方法等】

症例により適当な網目パターン形状を選択し、耐火模型上にそのまま又は必要に応じて均一に軟化、圧接して、金属床の維持部を形成します。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 1) 本材は、可燃性であるので、使用の際は火傷をしないように注意すること。
- 2) 過度の加熱や、加熱したままでの放置はしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本材を高温となる場所(ストーブの側、直射日光の当たる場所など)に放置しないこと。
- ・使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- ・本材は、火気厳禁の冷暗所に保管し、ひとつの保管場所に多量に保管しないこと。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号 075-561-1112