

歯科材料 7 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科印象用ワックス 34807000

松風イエローワックス

【形状・構造及び原理等】

〔成分〕

蜜ロウ、マイクロクリスタリンワックス

〔原理〕

加熱によって溶融し、冷却によって凝固する。

〔仕様〕

融点：74℃

【使用目的又は効果】

義歯床の仮床のロウ堤部や咬合採得に用いる。

【使用方法等】

- 1) 板状のワックスを炎で加熱し、適度に軟化させたところでロウ堤になるように棒状にします。
- 2) 棒状にしたワックスを馬蹄形にして、基礎床に圧接します。
- 3) 過不足部分は盛り足したり、削ったりして咬合堤を完成します。
- 4) 咬合堤の調整、人工歯の排列、ロウ義歯の製作は、通法に従い作業します。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- 1) 本材は、可燃性であるので、使用の際は火傷をしないように注意すること。
- 2) 過熱や、加熱したままでの放置はしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・本材は、直射日光を避け、室温(1～30℃)にて保管すること。
- ・本材の使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- ・本材は、火気厳禁の場所に保管し、ひとつの保管場所に多量に保管しないこと。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社 松風
住所	〒605-0983 京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号	075-561-1112