



除菌液

# バイオサニタイザー II (8倍希釈用)



世界各国で特許を取得

## 除菌・抗菌技術「バイオトロール®」使用

塩素・アルコール不使用

無香料

無着色

# 乾燥後も効果が持続！



8倍に  
希釈




### バイオトロール®の除菌・抗菌のしくみ

バイオトロール®は陽イオン界面活性剤(第4級アンモニウム塩)と疎水性ポリマーに基づいた技術です。

この技術は主に懸濁コロイドの殺菌成分の配列と構造化に因るもので、これをアンフィセルと呼称しています。

上記構造化のアンフィセルにより、濡れた場所や清拭後に乾燥しても変わらず除菌効果が発揮され、付着菌はもちろん浮遊・落下菌やウイルスに対しても一度の接触で十分な物理的除菌効果を持つことが報告されています。

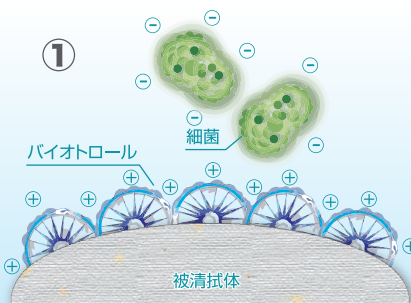

① マイナスに帯電している浮遊菌やウイルスはバイオトロール®に引き付けられます。



② バイオトロール®に付着した細菌やウイルスには上記針山のような表面により、四方八方に引っ張られる張力が発生します。



③ 細菌やウイルスは張力に耐えられず引き裂かれ、物理的に分解されます。

※イメージ図

SHOFU INC.

## 使用例





ブラケットテーブルに



ユニットに



試適後の製作物に

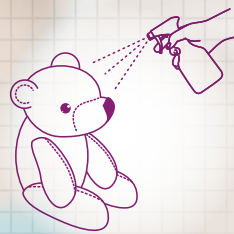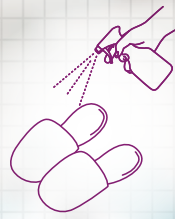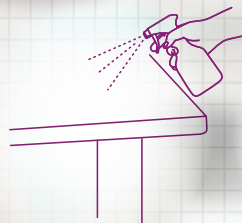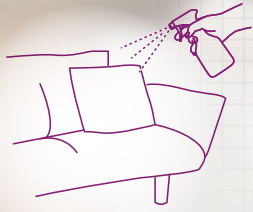

**使用方法** **8倍に希釈** してご使用ください。(例:400mLの希釈液を作製したい場合、原液50mLに対し水350mLを使用します。) スプレーで噴霧し、乾いた布などで拭き取ってください。(濡れていても差し支えない場所は、拭き取る必要はありません。)

**成分** 水、ジデシルジモニウムクロリド、塩化ベンザルコニウム(2.5%以下)、ポリヘキサメチレンビグアニド、ジメチコン

### 包装



バイオサニタイザー II  
(8倍希釈用)  
500mL



バイオサニタイザー  
スプレー容器  
(500mL用) 1本

- 逆向き、横向きでもスプレー可能
- ストレートから霧状まで、噴霧パターンが選択可能
- 耐久性があり、繰り返しの使用に強い
- 希釈の分量がわかりやすい目盛り付

### 関連製品

#### バイオサニタイザー ワイブ



120枚入

ご使用の際は製品に記載の注意事項をよく読んでお使いください。

取扱い店

日本総販売元  
**ジーサイエンス株式会社**  
〒607-8464 京都市山科区上花山久保町62-1

製造販売元  
**Byotrol Technology Ltd,**  
Building 303(Ashton), Thornton Science Park, Pool Lane, Ince, Chester, CH2 4NU UK

世界の歯科医療に貢献する  
**株式会社 松風**

● 本社:〒605-0983京都市東山区福稲上高松町11・TEL(075)561-1112(代)  
● 支社:東京(03)3832-4366 ● 営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

www.shofu.co.jp

2107AJJSI