





# ブロック HC セムを用いた松風ブロック HC 合着の手順

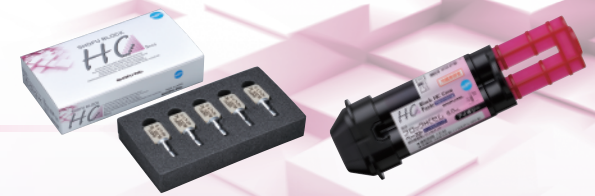

## 補綴装置の前処理

0.2~0.3MPa<sup>※</sup> アルミナサンドブラスト処理  
⇒ 水洗又は超音波洗浄  
⇒ 乾燥  
※ご使用されるブロックの添付文書をご参照ください。

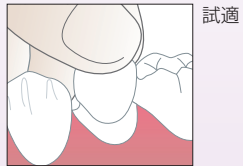

試適

補綴装置内面に付着した唾液などを水洗除去※  
⇒乾燥

※リン酸系エッチング材  
またはエッチングゲルを推奨 **別売品**  
この際、リン酸系ゲルなどを用いて唾液を洗浄することを推奨します。リン酸系ゲルなどを使用する場合、十分に水洗して、リン酸成分が補綴装置内面に残らないようにご注意ください。

HCプライマーを塗布  
⇒ エア乾燥

### POINT

エア乾燥はしっかり行ってください。HCプライマーに含まれるアセトン成分を飛ばす事で、より強固な接着力が得られます。

## 支台歯の処理

### 天然歯の場合

20秒 プライマーA/Bを等量混合  
⇒ 塗布  
⇒ 20秒間放置

弱圧エアで乾燥

### メタルの場合

10秒 メタルリンクを塗布  
⇒ 10秒間自然乾燥

20秒 プライマーA/Bを等量混合  
⇒ 塗布  
⇒ 20秒間放置

弱圧エアで乾燥

### POINT

歯質にもメタルにも、支台歯全体にすみずみまで塗布することで補綴装置と支台歯間の接着性を安定化することができます。

### レジンの場合

10秒 松風ポーセレンプライマーを塗布  
⇒ 10秒間自然乾燥

20秒 プライマーA/Bを等量混合  
⇒ 塗布  
⇒ 20秒間放置

弱圧エアで乾燥

### POINT

歯質にもレジンにも、支台歯全体にすみずみまで塗布することで補綴装置と支台歯間の接着性を安定化することができます。

## ペースト塗布～光照射

**ハンドミキシングタイプの場合**  
ペースト10秒間練和  
⇒ 補綴装置に塗布・圧接

**オートミキシングタイプの場合**  
ミキサーチップを装着し  
直接、補綴装置に塗布・圧接

操作余裕時間  
練和後またはミキサーチップから押出後2分以内

照射1~2秒 余剰セメントに1~2秒間光照射※し、半硬化させた後探針などを用いて除去

※光が届かない箇所は、補綴装置装着後3~4分程度放置して余剰セメントを半硬化させる


ハロゲン20秒、LED10秒 マージン部や咬合面など各所に対してLED10秒間、ハロゲン20秒間光照射

### POINT


接着には、光照射がとても重要です。マージン部だけでなく咬合面にも十分な光照射を実施することで、修復物と支台歯の接着性を安定化することができます。

# 松風ブロック HC リペア (口腔内) のポイント

## リペア(口腔内)

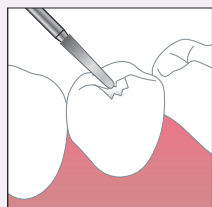


**被着体の前処理**(修復部の清掃)  
ダイヤモンドポイントレギュラー等で被着面を粗造にし、水洗・乾燥してください。

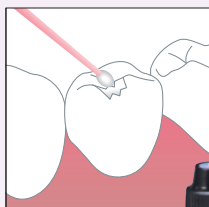


**セラレジンボンドIの塗布**  
10秒間放置




※必ず、I→IIの順にご使用ください。

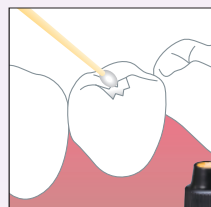


**セラレジンボンドIIの塗布**  
10秒間放置

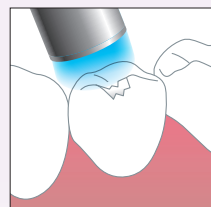

**光重合**  
可視光線照射器で20秒間光重合

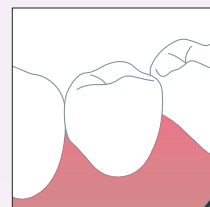

**CR充填**  
ビューティフィルネクストなどで充填

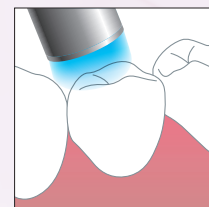

**光重合**  
ビューティフィルネクスト(ハロゲン20秒・LED10秒)



## 包装・価格




CAD/CAM 用ハイブリッドレジンブロック  
**松風ブロック HC (5個入)**

■2レイヤー(2層)  
Sサイズ Mサイズ  
【色調】3色 : A2-2L, A3-2L, A3.5-2L

■単層  
Sサイズ Mサイズ  
【色調】LT 6色 : W2-LT, A1-LT, A2-LT, A3-LT, A3.5-LT, B3-LT  
HT 3色 : A1-HT, A2-HT, A3-HT  
エナメル 2色 : 59, OC

【松風ブロック HC寸法】

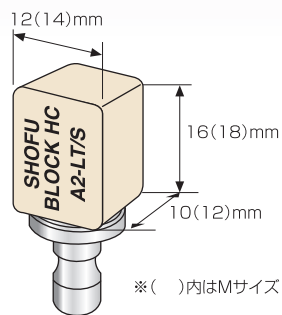

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
松風ブロック HC	歯科切削加工用レジン材料	管理医療機器 医療機器認証番号 224AKBZX00070000

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

## 関連製品

松風ブロック HCの合着に



歯科接着用レジンセメント  
**ブロック HC セム  
ハンドミキシングセット**  
1セット

【セット内容】  
ブロック HC セム ベースト ハンドミキシング 6.0mL、  
ブロック HC セム HC プライマー 5.0mL、ブロック  
HC セム プライマー A 3.0mL、ブロック HC セム プ  
ライマー B 2.5mL、紙練板 1、スパチュラ 1、松風 V  
ディッシュ 25、ディスポブラシファイン (ピンク) 50



歯科接着用レジンセメント  
**ブロック HC セム  
オートミキシングセット**  
1セット

【セット内容】  
ブロック HC セム ベースト オートミキシング 5.0mL、  
ブロック HC セム HC プライマー 5.0mL、ブロック  
HC セム プライマー A 3.0mL、ブロック HC セム プ  
ライマー B 2.5mL、松風ミキサーチップ 20、松風 V  
ディッシュ 25、ディスポブラシファイン (ピンク) 50

松風ブロック HCのリペアに



歯科充填用コンポジットレジン  
**ビューティフィル ネクスト**  
3g


【色調】12色  
A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3,  
C3, A20, A30, Inc, BW



ポーセレン & レジン リペアキット  
**PR リペアキット**  
1セット

【セット内容】  
メタルリンク 5mL、セラレジンボンド ボンドI  
6mL、セラレジンボンド ボンドII 5mL、マイ  
クロブラシファイン (ピンク・イエロー) 各  
25、ディスポディッシュ 5

レジン製支台歯の前処理に

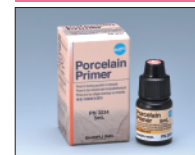

陶材・硬質レジン接着性プライマー  
**松風ポーセレンプライマー**  
5mL

金属製支台歯の前処理に



金属接着性プライマー  
**メタルリンク**  
5mL

補綴装置内面の唾液洗浄に



エッチング材  
**インパーバンド  
エッチングゲル**  
6mL

取扱い店



世界の歯科医療に貢献する

**株式会社 松風**

●本社:〒605-0983京都市東山区福稲上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

<http://www.shofu.co.jp>

●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595