


機械器具 6 9 歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯科用可視光線照射器 35775000

* 特定保守管理医療機器 **松風グリップライト**

【形状・構造及び原理等】

[形状]

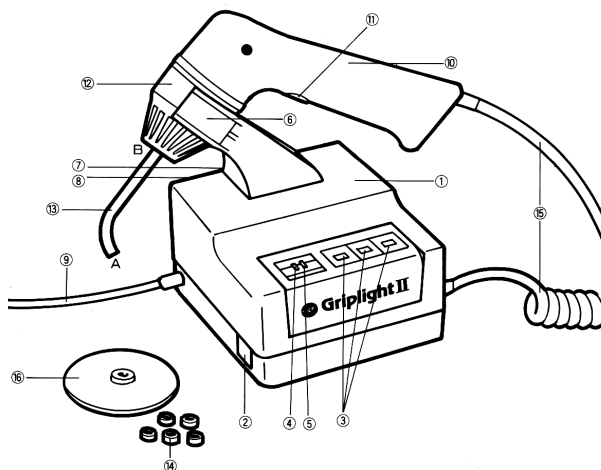

番号	部品名称
	本体
	電源スイッチ
	タイマー(30秒、40秒、連続)
	スタンバイランプ(緑)
	オーバーヒートランプ(赤)
	ホルダー(方向変換)
	ホルダー保持溝
	プレート
	電源コード
	照射部(グリップ)
	ライト(ON・OFF)スイッチ
	キャップ
	ライトガイド8(A照射口・B入射口)
	プロテクター
	中継コード
	アイプロテクター8(ライトガイド8用)

[構成]

- | | |
|------------------------------|----|
| 1) 松風グリップライト - 本体 | 1台 |
| 2) ライトガイド8 | 1個 |
| 3) アイプロテクター8 | 1個 |
| 4) プロテクター | 5個 |
| 5) 取扱説明書 | 1冊 |
| 6) 添付文書 | 1冊 |
| 7) 医用電気機器の使用上(安全及び危険防止)の注意事項 | 1通 |

[電氣的定格]

- | | |
|---------|----------------|
| 1) 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 2) 電源入力 | 125VA |

[寸法及び質量]

- | | |
|-------|----------------------------------|
| 1) 寸法 | 照射部...幅 214 × 奥行 52 × 高さ 153 mm |
| | 電源部...幅 134 × 奥行 145 × 高さ 160 mm |
| 2) 質量 | 照射部...約 230g |
| | 電源部...約 2.2kg |

照射部はライトガイドを、電源部はホルダーを含む

[原理]

本器は、タングステンハロゲンランプを光源とし、フィルターで光重合に最も有効な波長を取り出すと同時に熱線をカットして、可視光線光重合型コンポジットレジンとの重合用の照射光を口腔内に供給する。

【使用目的、効能又は効果】

光重合型コンポジットレジン、ラミネートベニアの重合に用いる。

【品目仕様等】

特性・性能又は機能

- | | |
|------------|---------------------|
| 1) 形式 | SGL-75 |
| 2) 光源ランプ | ハロゲン 75W |
| 3) 照射光波長 | 400~500nmの可視光線 |
| 4) ライトガイド | ライトガイド8:口径 8mm |
| 5) タイマー | 「30秒」、「40秒」、「連続」の切替 |
| 6) 電撃保護の形式 | クラス |

【操作方法又は使用方法等】

詳細な設置方法や操作方法については付属の取扱説明書を参照してください。

[設置接続]

- 1) 水平で安定した台に設置します。
- 2) ホルダーを本体に取り付けます。
- 3) 照射部にライトガイド8、アイプロテクター8およびプロテクターを取り付けます。
- 4) 照射部をホルダーに差し込みます。
- 5) 電源スイッチをOFFにしてAC100Vコンセントに電源コードを接続します。

[操作方法]

- 1) 電源スイッチをONにします。
- 2) タイマーを選択します。
- 3) ライトガイド8の先端を照射部位にできるだけ近づけて、ライトスイッチを押します。(タイマー時間または連続光照射)
- 4) 照射中断は、再度ライトスイッチを押します。
- 5) 照射後は照射部をホルダーに戻し、冷却ファンの停止を確認して、電源スイッチをOFFにします。

* 6) 滅菌・消毒について

- ・ライトガイドはオートクレーブ滅菌(134 3分又は121 30分)あるいは乾熱滅菌(185 以下)が可能です。
- ・プロテクターは消毒用アルコールで消毒が可能です。

[操作方法に関連する使用上の注意]

- 1) 引火性の物を近くに置かないこと。
- 2) 交流100V以外で使用しないこと。
- 3) ライトガイドは落としたり、ぶついたり、乱暴に取扱わないこと。

【使用上の注意】

1) 使用注意

取扱説明書等および「医用電気機器の使用上(安全及び危険防止)の注意事項」を必ず参照すること。
濡れた手で電源プラグをコンセントより抜き差ししないこと。
水をかけないこと。
電源プラグをぬくときは、電源コードを持たずに電源プラグを持って抜くこと。
電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理な力を加えたりしないこと。また重い物を載せたり、挟み込んだりしないこと。

取扱説明書等を必ずご参照ください。

使用后（冷却ファンが自動停止してから）は電源スイッチを切ること。また、長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜くこと。

照射光を直視したり、人に向かって照射しないこと。また、反射している光に対しても直視を避けること。

術後のライトガイド及びプロテクターは消毒を行うこと。

本器は、【使用目的効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。

本器は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

[貯蔵・保管方法]

- ・湿気を避けて室温にて保管すること。
- ・本器は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 取扱説明書等に従い、日常の保守・点検を励行すること。
- 2) 本器を使用中に異常を感じたら直ちに使用を中止して、取扱説明書等に従って、点検または修理依頼をすること。
- 3) ランプ交換以外の分解・修理や改造は絶対に行わないこと。
- 4) ランプ交換は、電源プラグをコンセントから抜き、ランプが十分に冷えてから行うこと。ランプは、バルブ部及び反射鏡面に直接指を触れないこと。
- 5) 必ず純正のハロゲンランプを使用すること。
- 6) 照射部のキャップを外したままで発光させないこと。

【包装】

[セット包装]

松風グリップライト -

- 1) 本体、
- 2) 付属品（アイプロテクター 8 1、プロテクター 5）

[単品包装]

- 1) ライトガイド 8
- 2) ライトガイド 13

[補充部品] (単品包装)

- 1) アイプロテクター 8
- 2) アイプロテクター 13
- 3) ハロゲンランプ (12V 75W)
- 4) プロテクター
- 5) 壁掛け金具

【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元	株式会社 松風
住所	〒605-0983 京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号	075-561-1112

*製造元	MEGA-PHYSIK GmbH & Co KG
国名	メガフィジック ドイツ