


機械器具 6 9 歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯科技工用重合装置 35761000

アクセルキュア

**【形状・構造及び原理等】

[外観]

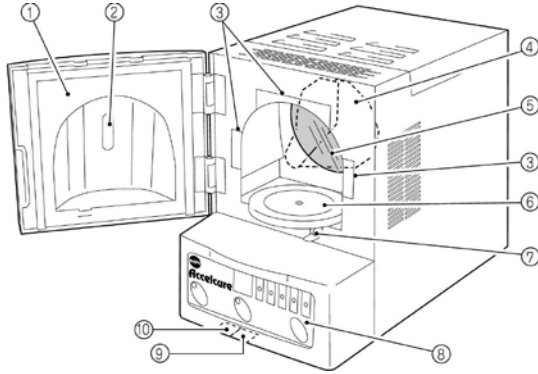

- ①扉
- ②窓
- ③重合エアライン
- ④シャッター
- ⑤防熱フィルタ
- ⑥ターンテーブル
- ⑦扉リミットスイッチ
- ⑧操作パネル
- ⑨ディップスイッチ
- ⑩スライドスイッチ

[定格]

- ** 1) 定格電源電圧及び周波数 AC100V±10V 50/60Hz
- 2) 電源入力 220VA
- 3) 電撃保護の形式の分類 クラス I
- 4) 使用周囲温度 5℃~40℃

[寸法及び質量]

- 1) 寸法 W180×D325×H255mm
- 2) 質量 約 7.0kg

**【特性・性能又は機能】

- 1) 形式 SLCU-ACIII
- 2) 光源 メタルハライドランプ ULR-150SH/11
- 3) 光照射時間 30秒~150秒(30秒間隔)

【使用目的又は効果】

光重合型歯冠用硬質レジンの重合に使用する。

【使用方法等】

- 1) 本体背面の電源スイッチがOFFになっているのを確認し、電源コードを本体背面コネクタに取り付けます。
- 2) 電源コードのプラグを100Vコンセントに接続します。
- 3) ランプ点灯
 - ①電源スイッチをONにします。
 - ②ON/OFFキーを2秒以上押して、ランプを点灯または点灯予約します。
- 4) 照射
 - ①重合物を松風重合用ポストスタンドPに立て、本器のターンテーブルに載せ、扉を閉めます。
 - ②照射時間を選択します。
 - ③START/STOPキーを押して、照射または照射予約します。

- ④照射終了時、終了ブザーが鳴るので重合物を取り出します。
- 5) 終了

- ①ON/OFFキーを2秒以上押して、ランプを消灯または消灯予約します。
- ②ON/OFF表示が橙表示になってから、電源スイッチをOFFにします。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) 室温5℃~40℃の範囲内で結露のない状態で使用すること。
- 2) 重合室内で液体、金属粉などがこぼれると、内部回路が故障し感電や火災のおそれがあるため重合室内では扱わないこと。
- 3) 重合物を取り出すときは、防熱フィルタに触らないこと。
- 4) 照射中に扉を開ける場合は「START STOP」キーで一度照射の中断を行い、扉を開けること。
- 5) 扉部リミットスイッチに触れたり、異物等を挟み込まないこと。
- 6) ランプ前面の防熱フィルタを取り外したり、割れた状態で使用しないこと。
- 7) 粉塵の多いところでは使用しないこと。

【使用上の注意】

詳細な設置方法や使用方法については、付属の取扱説明書等を必ず参照して下さい。

[重要な基本的注意]

- 1) 引火性のものや可燃物を近くに置かないこと。
- 2) 水のかかるような場所に置かないこと。
- 3) 交流100V以外で使用しないこと。
- 4) 濡れた手で電源プラグをコンセントより抜き差ししないこと。
- 5) コンセントは緩んでいたり、ホコリのたまったものを使用しないこと。
- 6) 本器の重さに充分耐えうる水平な台に設置し、側面および背面は壁面より20cm以上、上面は30cm以上のスペースを設けること。
- 7) 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理な力を加えたりしないこと。また重い物を載せたり、挟み込んだりしないこと。
- 8) 使用後は電源スイッチを切る。また、長期間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜くこと。
- 9) 冷却ファンをふさがないこと。
- 10) 冷却ファンに触れたり冷却ファンを止めたりしないこと。
- 11) 本器から発煙や異臭、異音がする場合はすぐに電源を切って、プラグを抜き、点検修理を依頼すること。

【保管方法及び有効期間等】


[保管方法]

- ・本器は、湿気を避け室温で保管すること。
- ・本器は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

**【保守・点検に係る事項】

- 1) 取扱説明書の「7. 保守作業」、「8. 異常を感じたら」の項目を必ず読むこと。
- 2) 取扱説明書等に従い、日常の点検を励行すること。
- 3) ランプ付近が異常過熱した場合、サーモスタットが働き電源を遮断します。この場合トップカバーを外しランプ下にあるサーモスタットの復帰ボタンを押してください。(復帰させない限り電源が入りません。)必ず電源を切り電源プラグをコンセントから抜きランプが冷却してから作業を行うこと。

取扱説明書等を必ずご参照ください。

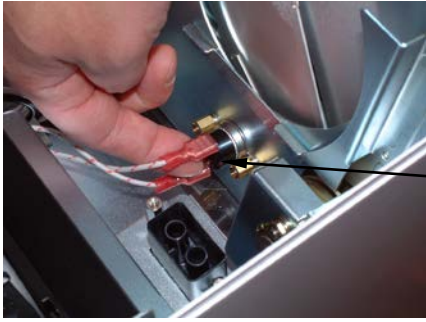

サーモスタット
復帰ボタン

[保守点検上の注意事項]

- 1) 本器の点検や清掃およびランプ交換等を行うときは電源を切り、電源プラグをコンセントから抜くこと。その後、少なくとも10分以上放置し、器械が完全に冷めているのを確認してから行うこと。
 - 2) 分解・修理や改造は絶対に行わないこと。
 - 3) ランプを交換するときは必ず指定の「アクセルキュア用ランプ」を使用すること。
 - 4) ヒューズの点検、交換は電源プラグをコンセントから抜いて行うこと。
 - 5) ヒューズは必ず指定（6Aφ6.4×30mm）のものを使用すること。
- ** 6) 本器を使用中に異常を感じたり、横転などで外部から大きな力が加わり、外観上、凹みなどの損傷が認められる場合、直ちに使用を中止し、取扱説明書に従って点検又は修理依頼をすること。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者	株式会社 松風
住所	〒605-0983 京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号	075-561-1112