

安全にお使いいただくために、  
取扱説明書をよくお読みください。

## アクセルキュア用ランプ取扱説明書

### 安全にお使いいただくために

本器を安全にお使いいただくために、以下の事項を必ず守ってください。

本書では、安全に関する重要な注意事項を「警告」、「注意」に分類して説明しています。

必ず各内容をよくお読みの上、厳守してください。各警告表示の内容は次のように定義されています。

<b>警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いを行うと、使用者が死亡または重傷を負う可能性があることを表しています。
-----------	---

<b>注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いを行うと、使用者が傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性があることを表しています。
-----------	---

警告表示以外については、下記の通りです。


**注記：**  
・この表示を無視して誤った取り扱いを行うと、器械が正常に作動しない可能性があることを表しています。

**参考** ・この表示は使用時の作業をわかりやすくするための補足説明です。

<b>警告</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● ランプ交換を行うときは電源を切り、電源プラグをコンセントから抜くこと。その後、少なくとも 10 分以上放置し、器械が完全に冷めているのを確認してから行うこと。 感電ややけど、火災、ランプ破損によるけがの原因となるおそれがあります。</li><li>● ランプが割れたままでは使用しないこと。 感電や破損、落下によるけがのおそれがあります。</li></ul>

<b>注意</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● ランプは落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、傷を付けたりしないこと。 リード線、コンタクト、コネクタに傷を付けないこと。 過熱による火災、破損による漏電のおそれがあります。</li><li>● ランプ取付時、使用時にリード線に無理な力が加わらないようにすること。 接続部での断線、絶縁破壊、接触不良による火災、漏電のおそれがあります。</li><li>● ランプの上下方向は必ず指定方向に取りつけること。 ランプ破損によるけがのおそれがあります。</li><li>● ランプ取り替え時はランプソケットに確実に取りつけること。 接触不良による発煙、火災のおそれがあります。</li><li>● 使用済みのランプは割らずに捨てること。 破損によるけがのおそれがあります。 ※各自治体の指示に従って適切に処分してください。</li></ul>

### ● 本体内部

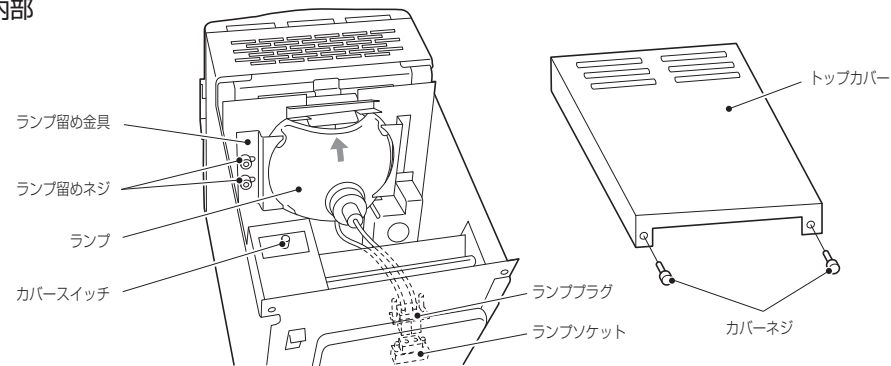


### ランプの交換

下記の配置・手順によりランプの交換および点灯可能時間の設定を行なってください。


**注記：**  
・ランプを外したまま電源を入れないでください。  
無駄な電力を消費するだけでなく、故障や電波障害の原因となるおそれがあります。

### ● ランプの交換


1. 電源スイッチを「OFF」にし、電源コードをコンセントから抜きます。

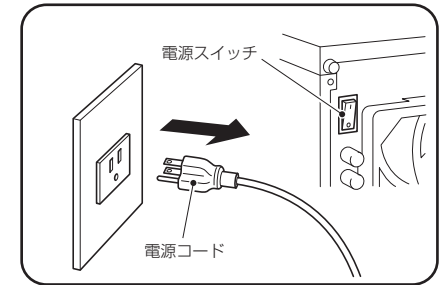

2. 電源スイッチを切って 10 分以上経過後、背面のカバーネジ (2 個) を外し、本体上部のトップカバーを取り外します。

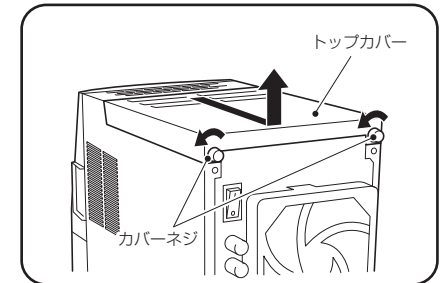


3. ランプ留めネジ (2 個) を軽くゆるめ、ランプ留め金具をずらします。

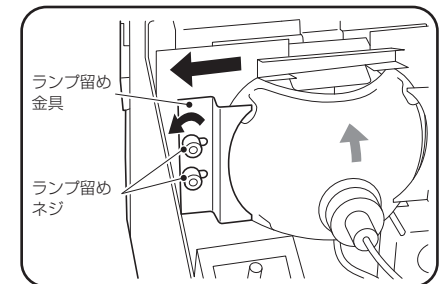

**注記：**  
・ランプ留め金具などが落下しますので、ランプ留めネジは取り外さないでください。


4. ランプを取り外します。

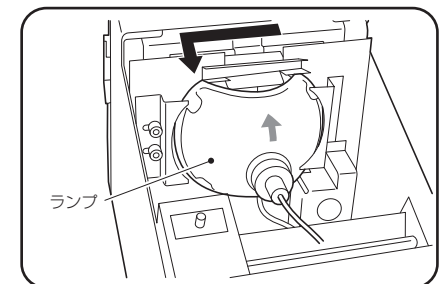

5. 器械を背面から見て、ランププラグの右の①ネジ→左の②ネジの順にネジをゆるめ、③ランププラグを抜きます。

**注記：**


・ランプ内側の電球やミラーは素手で触らないでください。  
ランプ内側の電球やミラーが汚れると重合効率が低下するおそれがあります。

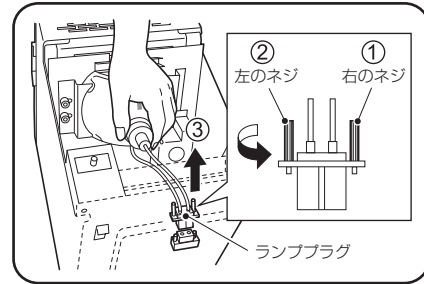


6. 新しいランプの①ランププラグを確実に接続し、ランププラグの左の②ネジ→右の③ネジの順にネジを締めます。




・本体型名 SLCU-AC1 タイプにはコネクタ固定用ネジがありませんので、ランププラグを確実に奥まで差し込んでください。

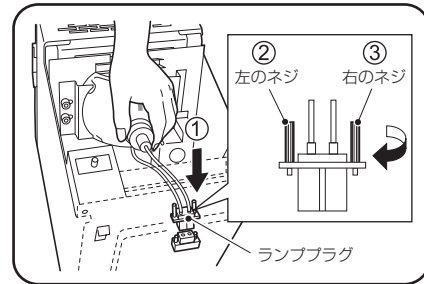

7. ランプの赤い矢印が上面に向く様に取り付けます。

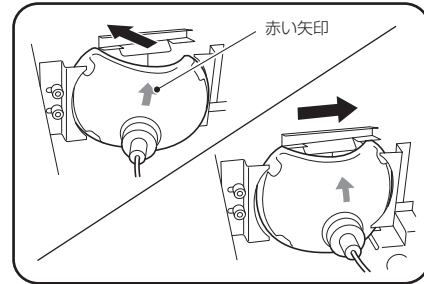


8. ランプ留め金具をランプがずれない位置にセットし、ランプ留めネジでしっかり固定します。

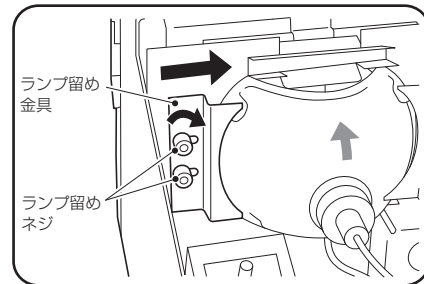

9. トップカバーをはめ込み、背面のカバーネジ(2個)を締めます。


**注記：**

・トップカバーを正しく取り付けないと動作しません。

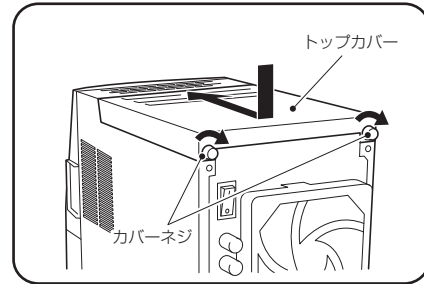


● ランプ点灯可能時間の設定・確認

1. 操作パネル底面にあるスライドスイッチ蓋のネジをゆるめ蓋をずらします。

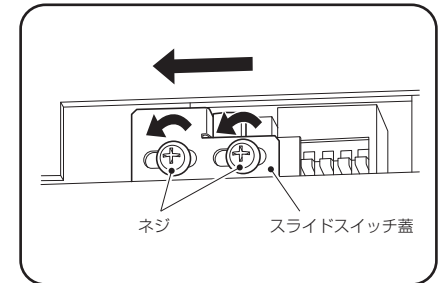


2. スライドスイッチをディップスイッチと逆側に動かします。

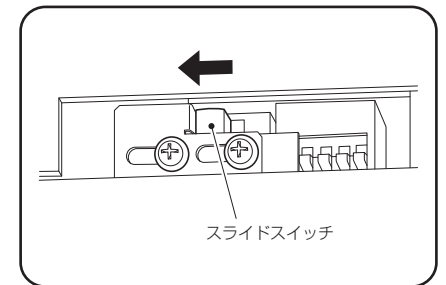


3. 電源スイッチを「ON」にします。  
本体パネルの ON/OFF 表示と START/STOP 表示が交互に橙点滅表示します。

4. ON/OFF キー、START/STOP キー、TIMER SET キーを同時に押します。  
正常に操作が受け付けられるとブザーが「ピッ」と鳴ります。

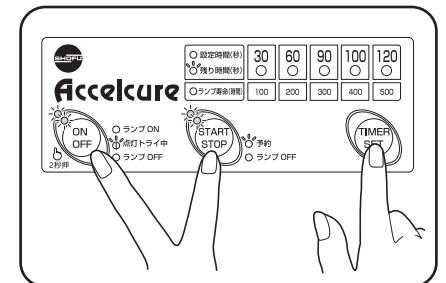

5. 電源スイッチを「OFF」にします。

6. スライドスイッチをディップスイッチ側に動かし、スライドスイッチ蓋でスライドスイッチが左に動かないように、ネジを締めます。

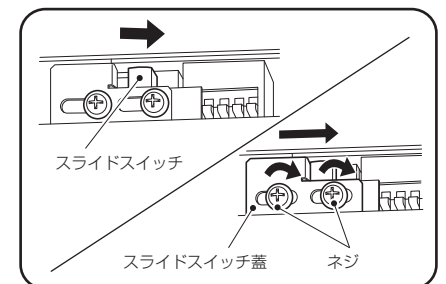

7. 電源スイッチを「ON」にします。  
点灯可能時間が 1,500 時間に設定されますので、ランプ使用可能時間が「500 時間以上」を示すことを確認してください。

**注記：**

・スライドスイッチの操作は、必ず新しいランプに取り替えた後のみ行なってください。  
重合不全や過重合、ランプ不点灯の原因になります。

● 包装

アクセルキュア用ランプ 1個 使用説明書 1枚



世界の歯科医療に貢献する  
**株式会社 松風**

<http://www.shofu.co.jp>

本社●〒605-0983京都市東山区福稲上高松町11●TEL(075)561-1112(代)