

ご使用に際しては、記載の
使用上の注意をよく読んでください。

ダークトレー

【成分】 炭化ケイ素

【用途】 ポーセレン焼成用トレー

【使用温度】 1200℃以下

【使用方法】 歯科技工用ポーセレン焼成炉の焼成台に設置し、
ダブルピン等により修復物を保持して、焼成する。

【使用上の注意】 ① 歯科用陶材(粉やペースト)が付着した場合は取
去ってから焼成すること。
② 必ず試し焼成を行なって下さい。(従来のセラミック
トレー(コージライト製、ムライト製)より炉内温
度が高くなる傾向にあります。)

【包装】 1個入

ダブルピン

【成分】 カンタル合金

【用途】 歯科セラミック修復物の焼成用


【使用温度】 1200℃以下

【使用方法】 歯科技工用ポーセレン焼成炉に設置されたダークト
レー等に植立し、修復物を保持して、焼成する。修復
物の形状により適時先端を変形させて用いる。

【使用上の注意】 ① 先端部等変形させる場合は怪我をする恐れがあ
るので、ペンチ等の工具をお使い下さい。
② 歯科用陶材(粉やペースト)が付着した場合は取
去ってから焼成して下さい。
③ 過度の変形や、焼成後の変形は金属疲労により破
折する場合があります。

【包装】 10本入

【使用例】

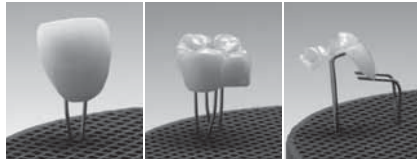

前歯
1本で植立

白歯
2本で植立

インレー
先端を変形加工して植立



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

本社 ● 〒605-0983 京都市東山区福稲上高松町11 ● TEL(075)561-1112(代)