

エンジンベルト

【形状・構造及び原理等】

〔形状、寸法〕

円断面の丸ベルト（直径φ2.5mm）

1）S（ショートアームタイプ用）：全長 2,040mm

2）L（ロングアームタイプ用）：全長 2,940mm

〔材質、構造〕

1）材質：綿 100%

2）構造：袋状に編組した多層構造

【使用目的又は効果】

歯科用電気エンジン（ウエルズ エンジン）専用のエンジンベルトで、モータの回転駆動力をハンドピースに伝達するのに用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- 1）ハンドピース、アーム及びモーターのプーリにセットして使用します。
 - ① モーター部のベルトカバーを取り外します。
 - ② アームのスプリングを押さえながら、ハンドピースプーリからアームプーリ、モータープーリの順に確実にベルトを掛けます。
 - ③ ベルトカバーを取り付けます。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1）振じれないように、アームに沿って平行に取り付けること。
- 2）ベルトがベルトカバーやアーム等に擦れるような角度で使用しないこと。
- 3）外側の編み袋が破れたら、新しいものに交換すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・本材は、直射日光及び湿気を避けて室温で保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社 松風
住所	〒605-0983 京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号	075-561-1112