

ROHTO

カンジダ
溶菌酵素
配合

歯科用
ロートピカ
義歯洗浄剤

ロートピカの使い方

青ピカ

は、歯垢や口臭、義歯性口内炎の原因にもなるカンジダ菌を溶菌除去する酵素と蛋白分解酵素を配合しています。菌の除去に週6回を目安にご使用ください。

赤ピカ

は、お茶やコーヒー、タバコのヤニなど、着色性の汚れを除去するアルカリ性酸化剤です。義歯特有の臭いも取り除きます。週1回を目安に義歯の汚れ具合に応じてご使用ください。



●青ピカ(錠剤)と、赤ピカ(顆粒)は、別々にご使用ください。●新しい義歯は「青ピカ」から、すでに使用中の義歯は「赤ピカ」からお使いください。

○使い方は簡単

目安として

1週間に1回「赤ピカ」を使い、
他の6回は「青ピカ」を使います。

1 洗浄容器に水道水を入れ ピカを1袋入れます。

冬はぬるま湯
(30~40°C)で。



2 溶液に義歯を入れます。

液の色が段々と
無色に変化。



3 約1時間で 義歯はきれいになります。

一晩置いておくと
一層きれいに。



4 義歯を水道水でよく すすいでからお使いください。



※洗浄容器は、ガラスまたは陶磁器製のものをお使いください。

※義歯の材質によってはまれに変色することがあります。

また、軟性裏装材の種類によっては変色することがあります。その場合は、本品の使用を中止し、歯科医師にご相談ください。

ご使用にあたって

- ①新しい義歯は青ピカから、すでに使用中の義歯は赤ピカからお使いください。



- ②青ピカと赤ピカは別々にお使いください。一緒に使うと洗浄効果が落ちてしまいます。



- ③60℃以上のお湯では使用しないでください。酵素の働きが悪くなるとともに、義歯が傷むこともあります。



- ④青ピカも赤ピカも、使用する直前に袋を開けてください。※錠剤の斑点は酵素です。



ご注意

- ①ピカやピカの溶液は口に入れないでください。誤って飲まれた場合は医師にご相談ください。



- ②万一、溶液が目に入った場合は、水で洗い流してください。



- ③ピカは、子供の手の届かない所、湿気の少ない涼しい所に保管してください。



- ④ピカは、義歯の洗浄以外には使わないでください。



大切な義歯のために

- ①義歯は汚れやすいものです。毎食後、きれいに水洗いしましょう。
※磨き粉は、義歯に傷をつけるので使用しないでください。



- ②義歯を硬いものの上に落としたり、熱湯や火に近づけないように気をつけましょう。



- ③義歯の調子が悪いときは、歯科医師に相談しましょう。



- ④異常がなくとも、半年～1年に1回は歯科医師にチェックしてもらいましょう。



発売元 **ROHTO** ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1

お客さま安心サポートデスク 06-6758-1230
受付時間9:00～18:00(土、日、祝日を除く)

販売元 **SHOFU** 世界の歯科医療に貢献する
株式会社 松風

京都市東山区福稻上高松町11

09973021J