

機械器具 6 5 歯科用充填器
管理医療機器 電動式歯科用歯内ペーストキャリア 41539000

松風ペーストキャリア

【形状・構造及び原理等】

[形状・種類]

- 1) 形状：螺旋状
- 2) 種類

サイズ	先端部での作業部の 突出部の径	色別
025	0.25	赤
030	0.30	青
035	0.35	緑
040	0.40	黒

操作部の長さ(mm)：21、25

[原材料]

操作部：ステンレス鋼

軸部：真鍮・ニッケルめっき（軸部形式1：CA用）

[原理]

能動型医療機器に接続して、螺旋状の線を回転運動させて根管充填材（糊材等）を根管に充填する。

【使用目的又は効果】

根管内に根管充填材（糊材等）を送り込んで充填するために使用する。

【使用方法等】

[使用方法]

- 1) 本器を滅菌します。
- 2) 充填する根管の大きさにあったサイズを選び、減速コントラアングルに取り付け、根管充填材を送り込んで使用します。
- 3) 右回転で使用します。
最高許容回転速度：600min⁻¹
- 4) 再使用する際には速やかに、清掃液、消毒剤を用いて付着物を除去し、流水でこれら薬液を完全に洗い流してから、滅菌を行います。

滅菌方法：オートクレーブ（134℃ 3分、又は121℃ 30分）による滅菌を行います。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) 使用する前に、形状や寸法に違いがないか確認すること。
- 2) 予め口腔外で回転させて振れがないことを確認すること。
- 3) 汚れたり、曲がったり、変形したものは使用しないこと。
- 4) 無理な角度、過度の加圧での使用をしないこと。
- 5) えぐるような力を加えないこと。
- 6) 滅菌については、ケミクレーブ又は各種薬液によっても可能であるが、各機械メーカーもしくは各薬液メーカーの指示に従って行うこと。
- 7) 清掃液、消毒剤については、各メーカーの指示に従って使用すること。
- 8) 乾熱滅菌は、高温になり劣化の原因になるので使用しないこと。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 1) 最高許容回転速度を越えて使用しないこと。
- 2) クロロフォルム、フェノール又はフェノール系の物質を含んだ薬液及び次亜塩素酸ナトリウム溶液の使用は避けること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本器は、水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- ・本器は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号 075-561-1112
製造業者 VDW GmbH
ブイディダブル
国名 ドイツ