


# セットアップ方法


## 新しいカードの追加方法

松風ワイヤレス LAN SD カードを新規購入された際は、手順に従い新しいカードの登録を行なってください。

- ① 本ソフトのインストールを行なってください。
- ② 本ソフトを起動します。（起動方法は P5 をご参照ください）
- ③ 本ソフト設定画面の「新しい松風 WLSD カードを追加する」を押します。

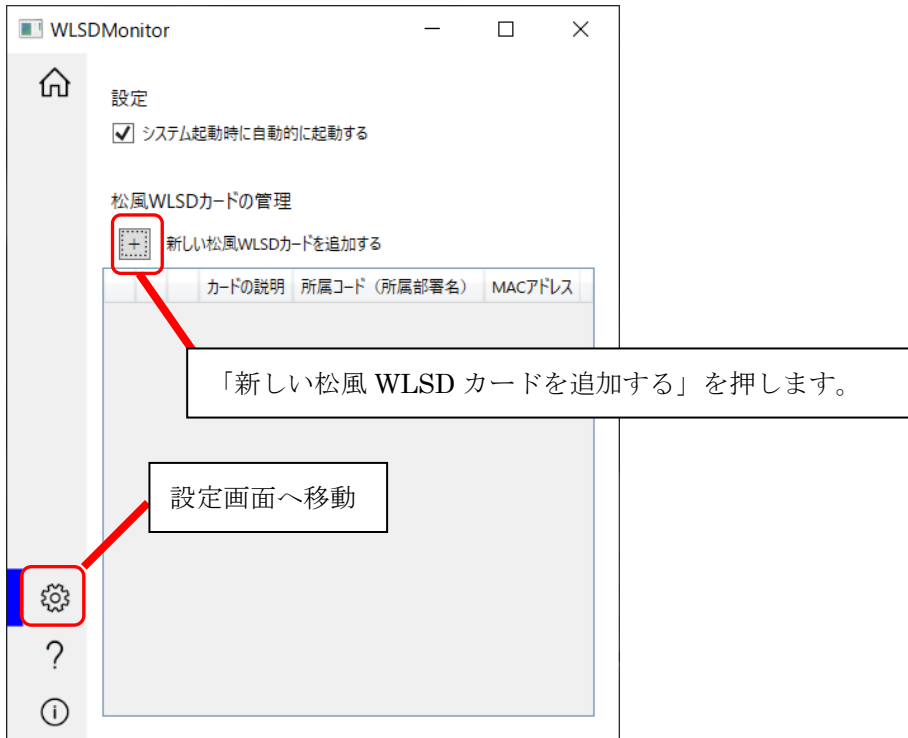

- ④ 新しい松風 WLSD カードの追加ウィザードが表示されます。指示に従い新しいカードの追加を行います。途中で「キャンセル」を押した場合、設定は保存されません。

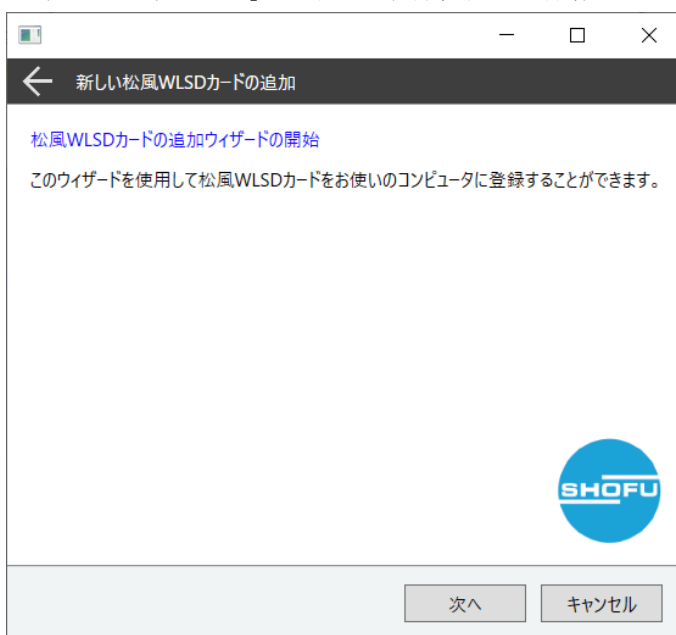

- ⑤ 松風ワイヤレス LAN SD カードを使用する場合は下記条件を満たしている必要があります。条件を確認して問題なければチェックボックスにチェックを入れ、「次へ」を押してください。
- コンピュータはネットワークに繋がっている。
  - ネットワークには 2.4GHz に対応した無線アクセスポイントが存在する。
  - 無線アクセスポイントの SSID、ネットワークキー（パスワード）を知っている。



- ⑥ MAC アドレスを登録します。

MAC アドレスを登録するには下記 2 通りの方法があります。

- MAC アドレスを SD カードから自動的に取得する方法 ⇒⑦へ

「自動的に取得する」にチェックが入っていることを確認し「次へ」を押してください。

- MAC アドレスを手動で入力する方法 ⇒⑩へ

「自動的に取得する」のチェックを外してから、手動で MAC アドレスを入力し、「次へ」を押してください。




## MAC アドレスを SD カードから自動的に取得する場合の手順

※手順⑦～⑨は MAC アドレスを自動的に取得する場合に必要な手順です。手動で入力される場合は手順⑩から設定を続けてください。

- ⑦ パソコンの SD カードスロットに対象の SD カードを挿入し、「次へ」を押してください。



- ⑧ 松風ワイヤレス LAN SD カードが挿入されているドライブを選択し、「次へ」を押してください。  
ドロップダウンリストに表示されない場合は<最新の情報に更新>をクリックしてください。  
<最新の情報に更新>をクリックしても表示されない場合はエクスプローラーなどで SD カードが認識されているか確認してください。

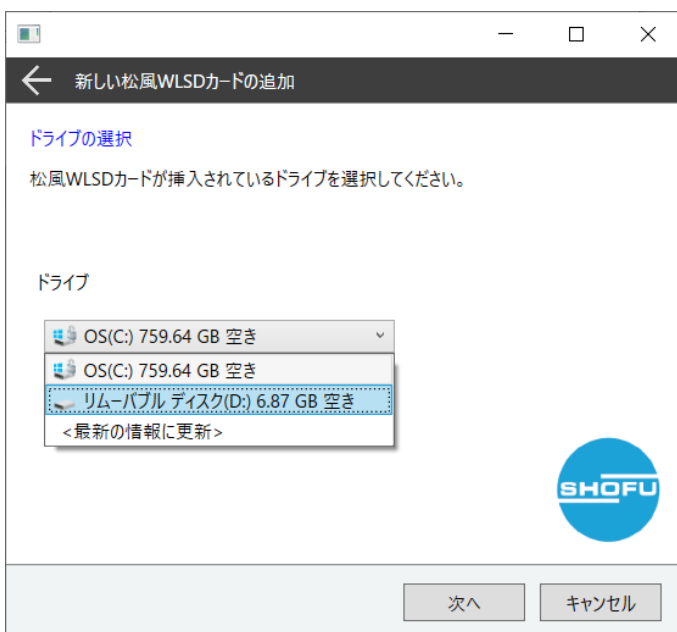

- ⑨ MAC アドレス自動取得結果が表示されます。
- ・ MAC アドレスの取得に成功した場合
- SD カードを取り外し、「次へ」を押して設定作業を続けてください。



- ・ MAC アドレスの取得に失敗した場合

MAC アドレスを手動で入力する必要があります。SD カードを取り外し、「次へ」を押してください。手動入力の画面が表示されます。ウィザードに従い、MAC アドレスを手動で入力してください。



- ⑩ ウィザード画面に従い、SSID、ネットワークキー（パスワード）を入力してください。

※SSID とネットワークキーは 2.4GHz 用のものを登録してください。

・SSID をプルダウンから選択する場合

プルダウンの中から接続したい SSID を選択し、ネットワークキーを入力してください。




・SSID を手動で入力する場合

「SSID を手動で入力する」にチェックを入れ、下部のテキストボックスに SSID とネットワークキーを入力してください。

- ⑪ カードの説明の登録を行います。カードに使用目的がわかる簡単な説明を入力してください。

「カードへ書込」を押してください。カードへの書き込みウィザードが立ち上がります。

続けてカードへの設定の書き込みを行なって下さい。

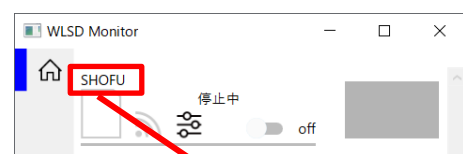


カードの説明はホーム画面に表示されます。

## 松風ワイヤレス LAN SD カードへの設定の書き込み方法

松風ワイヤレス LAN SD カードへ設定の書き込みを行います。

下記手順に従って設定の書き込みを行ってください。


- ① 書き込みを行う松風ワイヤレス LAN SD カードの背面に印字されている MAC アドレスとパラメータ書き込みウィザードに表示されている MAC アドレスが一致し、対象の SD カードであることを確認してください。対象の SD カードであればチェックボックスにチェックを入れ、「次へ」を押してください。

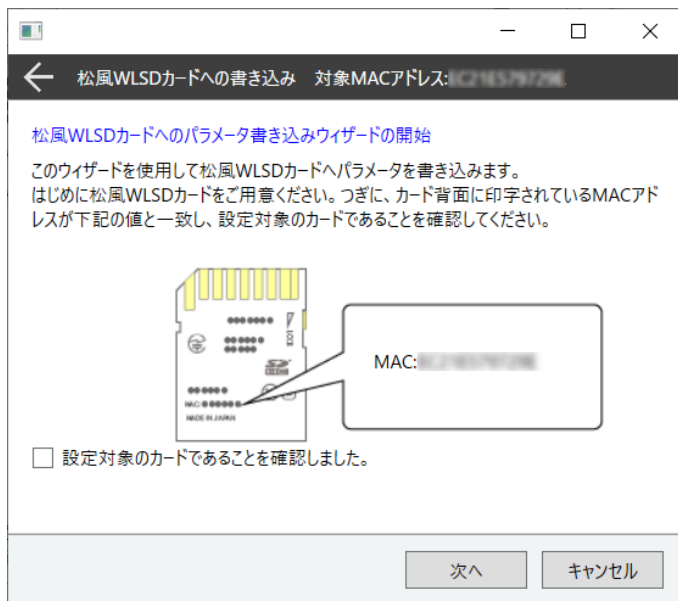


- ② パソコンの SD カードスロットに対象の SD カードを挿入し、「次へ」を押してください。




- ③ 松風ワイヤレス LAN SD カードが挿入されているドライブを選択し、「次へ」を押してください。  
ドロップダウンリストに表示されない場合は<最新の情報に更新>を押してください。  
<最新の情報に更新>を押しても表示されない場合はエクスプローラーなどで SD カードが認識しているか確認してください。

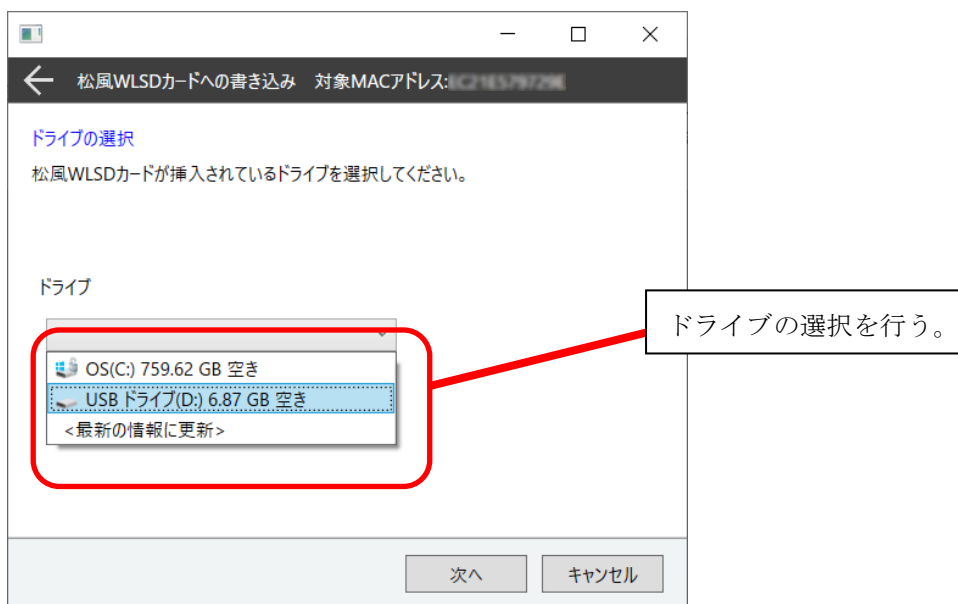


- ④ 下記のメッセージが表示された場合は、ドライブの選択が正しいかももう一度ご確認ください。松風ワイヤレス LAN SD カードをフォーマットした場合や、間違って固有の隠しフォルダを削除した場合、ドライブの選択が正しくてもこのメッセージが表示される場合があります。選択したドライブに問題がなければ「次へ」を押してください。

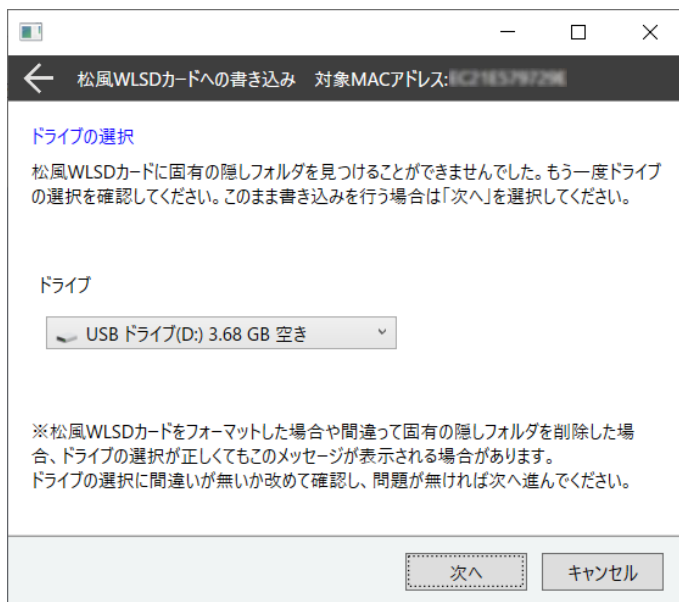

- ⑤ パラメータの書き込みを開始します。「次へ」を押してください。

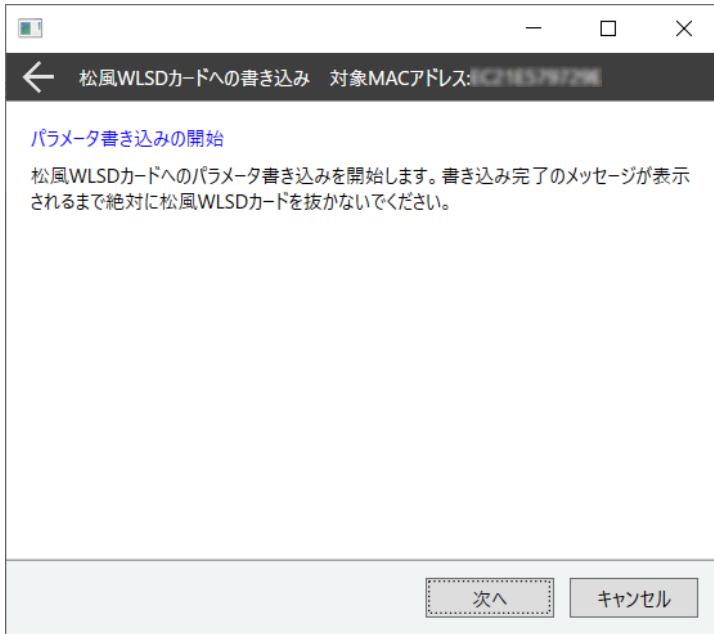

- ⑥ パラメータの書き込みが終わるまでお待ちください。  
パラメータの書き込みが終わるとウィザード下部に書き込み完了のメッセージが表示されます。  
書き込みが完了しましたら「完了」を押し、松風ワイヤレス LAN SD カードをパソコンから取り外してください。

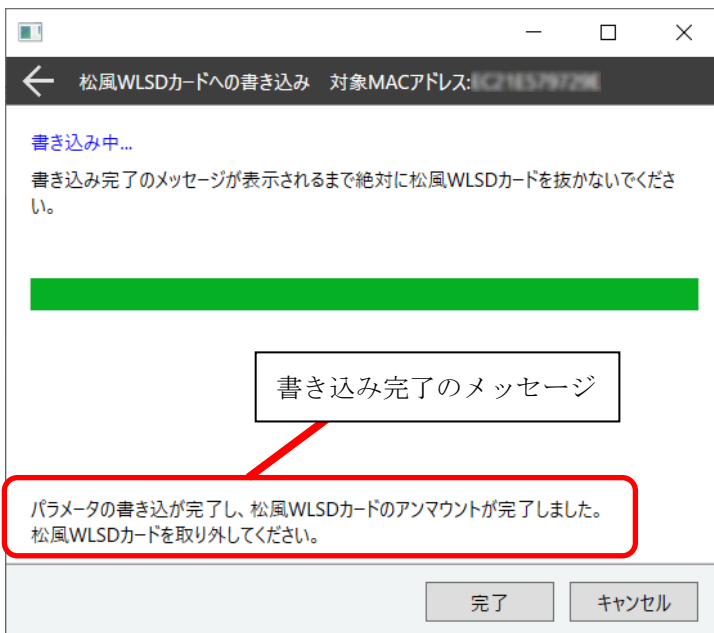





## 松風ワイヤレス LAN SD カードのフォーマット方法

松風ワイヤレス LAN SD カードのフォーマット方法に関して解説します。松風ワイヤレス LAN SD カードの調子が悪い場合、無線 LAN 転送がうまくいかない場合、誤ってカメラでフォーマットをしてしまった場合は下記手順に従って松風ワイヤレス LAN SD カードをフォーマットしてください。

- ① エクスプローラーを開きます。

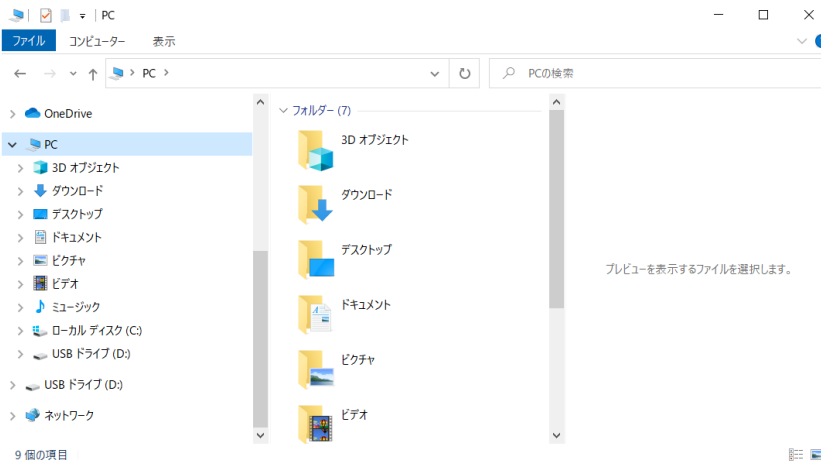

- ② 松風ワイヤレス LAN SD カードが挿入されたドライブを選択してください。選択したドライブの上で右クリックしてください。メニューが表示されますので「フォーマット」を選択してください。

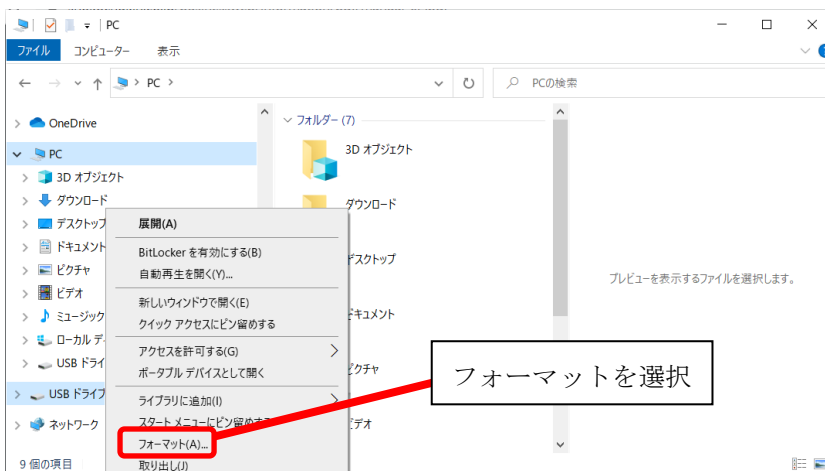


### ⚠ 注記


SD カードをフォーマットすることで、SD カード内のデータはすべて消去されます。必要であればフォーマットを行う前にパソコンなどへデータをバックアップしてください。

- ③ フォーマット用のウィンドウが表示されます。


14.8GB 程度であることを確認します。「デバイスの既定値を復元する」を押します。クイックフォーマットにチェックを入れてください。「開始」を押してください。

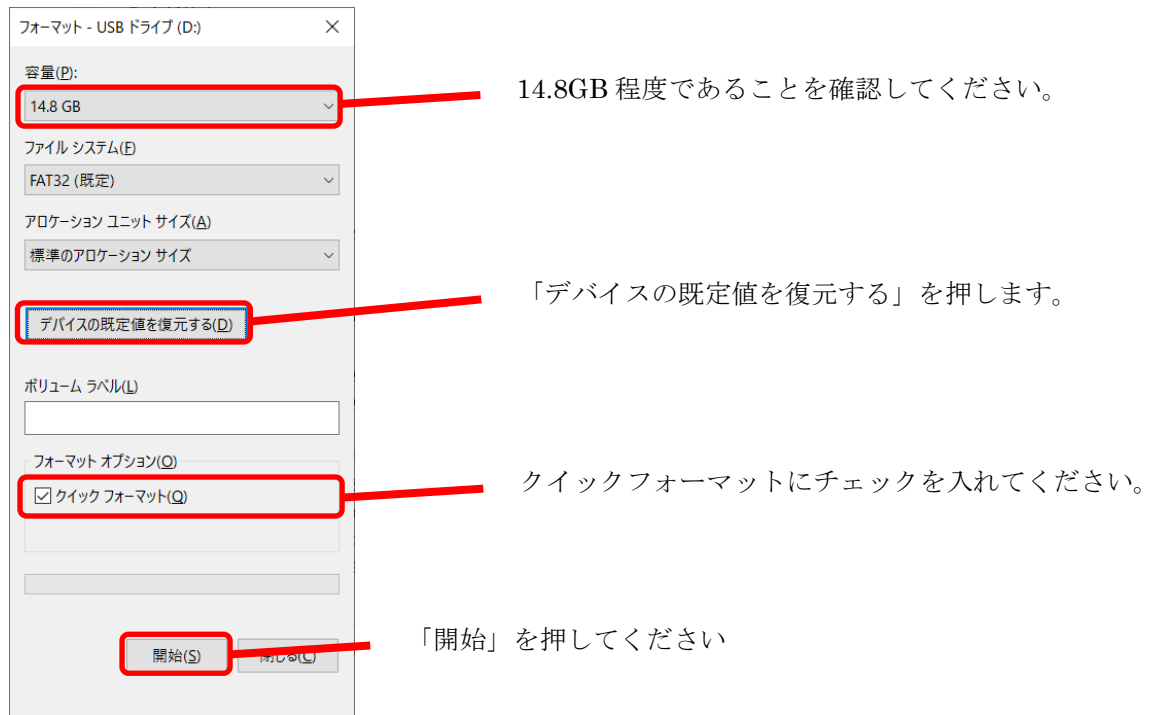


- ④ 下記のウィンドウが表示されましたら「OK」を押してください。

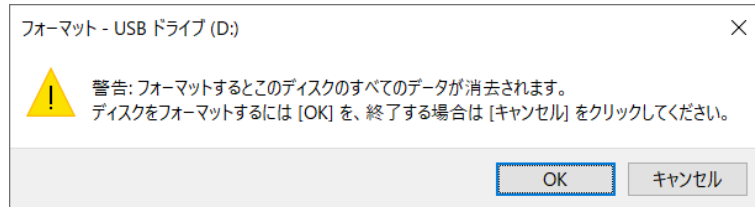

- ⑤ フォーマットが完了しましたと表示されるまでお待ちください。表示されましたら「OK」を押してください。

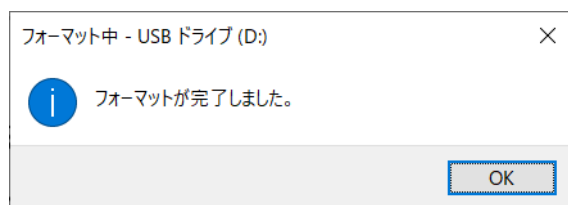

- ⑥ WLSMonitor の設定画面を表示し、フォーマットした SD カードの MAC アドレスと一致する登録カードを探します。「カードへの書き込み」を押してください。

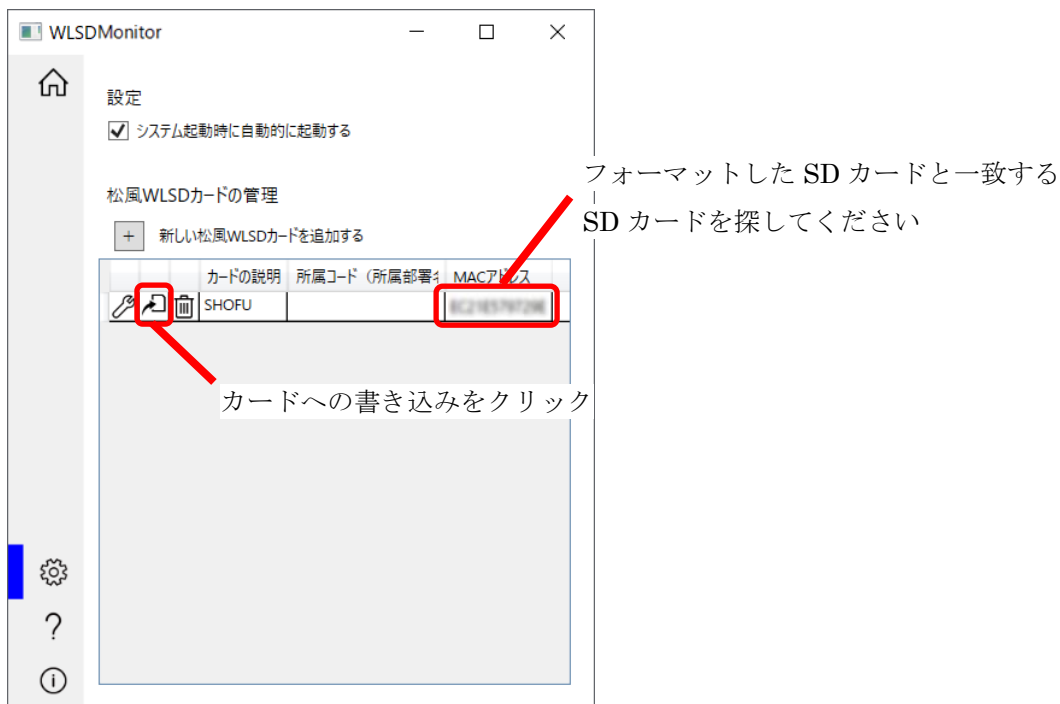

- ⑦ 松風ワイヤレス LAN SD カードへのパラメータ書き込みウィザードが立ち上がります。P. 17「松風ワイヤレス LAN SD カードへの設定の書き込み方法」の手順を参考にカードへ設定を書き込んでください。

