

人工歯排列湾曲板セット


人工歯排列が正確に、やさしく。

咬合器「プロアーチ（IG、ⅡG、ⅢEG）」に取り付けてご使用いただくことで、臼歯部の人工歯排列を簡便に行うことができます。松風の人工歯を排列するのに最適な半径6インチの湾曲を付与しており、義歯完成後の排列確認用としてもお使いいただけます。

【ご使用方法】


①プロアーチへのセット

プロアーチ咬合器の上顎模型弓に人工歯排列湾曲板を装着します。

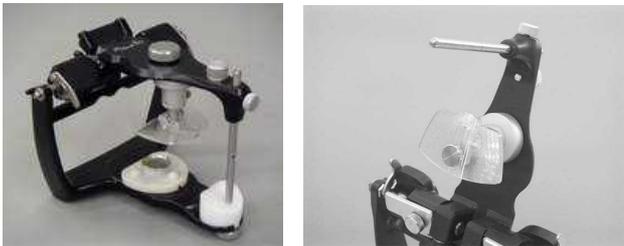

②排列湾曲板の位置決め

まず前歯のみを排列後、位置決めを行います。前後・上下・傾斜の調節が可能のため、位置決めが容易です。

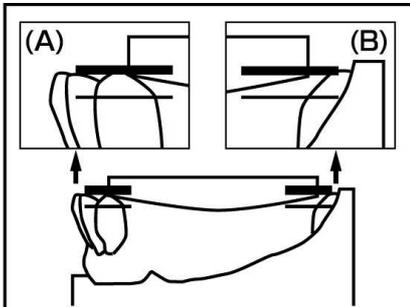

●前方部

排列湾曲板からの延長線を下顎犬歯の尖頭から遠心隅角部の間で任意の位置（A）に位置決めします。


●後方部

湾曲板からの延長線を臼後三角の任意の位置（B）に設定し、左右の歯列の位置関係を確認しながら固定します。



③下顎臼歯部人工歯の排列


設定した排列湾曲板に人工歯の咬頭を接触させて排列を行います。

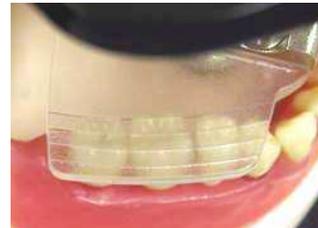

湾曲板に付与されているガイドラインを目安に、
●臼歯部の各咬頭頂の位置関係
●中心溝の連続性
などを確認しながら排列することができます。

POINT

- 小臼歯は咬合平面に対して、歯軸をほぼ垂直に排列します。
- 大臼歯部は頬側および舌側咬頭頂ともに湾曲板に接触させて排列します。

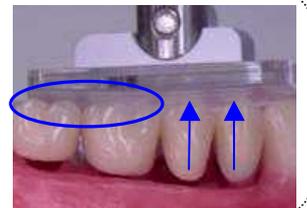

④確認

排列終了後に、再度湾曲板を下顎ろう義歯咬合面に適合させて、湾曲度を確認します。



【包装】

人工歯排列湾曲板セット

（内容：排列湾曲板 1、排列湾曲板ホルダー 1、六角ドライバー 1）

< 単品 >

排列湾曲板

調節湾曲の確認に「排列湾曲板」のみの使用も可能です。



取扱い商店名

ご使用の際は使用説明書をよく読んでお使いください。