

# メルサージュ エピック 2in1 日々のお手入れ方法

パウダー編

## 診療開始前の準備

- 

チャンバー内にパウダーを入れる。
- 

パウダーが付着したチャンバー蓋のねじ部分を乾いたワッテ等で拭き取る。
- 

しっかり蓋を閉めて、コントロールユニットにまっすぐ挿し込む。

※ロックボタンが押されていると挿し込めないので注意。  
※パウダー噴射使用開始時はまずフットコントローラーのリリースボタンを踏み、水とエアのみ排出させてから使用ボタンを踏み開始する。(ノズルチップを替える毎に行う)

## パウダーハンドピースのメンテナンス

- 

パウダーハンドピースを取り外し、表面の汚れや接続部内側に付着しているパウダーを付属のブラシ等(金属製は不可)で取り除く。
- 

清掃用消毒液を染みこませた布等で丁寧にふき取る。  
※熱水洗浄器の使用が可能です。熱水洗浄器を使用する場合は、ご使用の熱水洗浄器の取扱説明書を確認の上、使用してください。
- 

滅菌パックに収納・封印をし、いずれかの条件でオートクレーブ滅菌を行う。  
121℃・20分以上、132℃・15分間、または134℃・3分間
- 

滅菌終了後は滅菌パックのまま清潔な場所で保管。

## パウダーの詰まりを防止するため、最低週に一度、超音波洗浄を行なってください

- 

付属のパウダーハンドピースノズル用リングレンチで、パウダーハンドピースからノズルを取り外す。
- 

パウダーハンドピース、ノズルをぬるま湯(30~50℃)で超音波洗浄。
- 

洗浄後、すべてのパーツの水滴をエア等で取り除き、乾燥させ、組み立てる。
- 

ハンドピースホースにハンドピース接続後、オートクリーニングを行う。

## 診療終了後

- 

オートクリーニングキーを約1秒間長押しし、エア抜きを行う。
- 

ロックボタンを押しながらチャンバーをまっすぐ引き上げ取り外す。
- 

蓋を開け、チャンバー内に残ったパウダーを取り除く。
- 

チャンバー蓋のねじ部、チャンバー用蓋のOリング周囲および内部の残留パウダーをスリーウェイシリンジのエアでしっかり飛ばし、乾いた布やワッテ等で蓋の溝およびチャンバーのねじ部と内部をしっかりと拭き取る。
- 

チャンバーの蓋をしっかりと閉め直し、コントロールユニットにまっすぐ挿し込み、戻す。
- 

パワー設定「10」、注水量設定「10」にし、パウダーが空の状態ですフットコントローラーの「D」ボタンを踏んで空運転(1秒間以上)を5回繰り返す。
- 

オートクリーニングキーを約3秒間長押し、オートクリーニングを行う。(クリーニング時間は約45秒です)
- 

再びエア抜きを行い、チャンバーを取り外し、再度チャンバーの蓋を開け内部を乾燥させるよう放置。
- 

パウダーハンドピースホース両側のコネクタ、パウダーハンドピースホースソケットに付着したパウダーを付属のパウダー清掃用ブラシで取り除く。

# メルサージュ エピック 2in1 日々のお手入れ方法

超音波スケーラー編

## ■オートクリーニング

- 

1 ハンドピースからチップを取り外す。
- 

2 注水タンクをまっすぐに引き上げて取り外す。
- 

3 取り外した注水タンクの蓋を開け、蒸留水または精製水を半分以上入れる。
- 

4 注水タンクの蓋をしっかりと閉め直し、コントロールユニットにまっすぐ押し込み、戻す。
- 

5 オートクリーニングキーを約3秒間長押しし、オートクリーニングを行う。(クリーニング時間は約45秒です)  
※クリーニング中は液晶パネルに「AC」と表示されバググラフで残時間の目安を確認できます
- 

6 オートクリーニングが終了すると、オートクリーニング開始前の状態に戻る。  
※オートクリーニング中はハンドピースのライトは点灯しません。  
※オートクリーニングを中止するには、再度オートクリーニングキーを押してください。
- 

7 注水タンクを取り外し、タンクと蓋を流水で洗浄してから乾燥させる。

## ■スケーラーハンドピースの清掃

- 

1 チップを取り外し、ハンドピースをハンドピースコードより取り外す。

⚠ 治療後、血液などが付着したまま放置されますと、内部で血液が凝固し、さびが発生する場合があります。
- 

2 36℃以下(ぬるま湯)の流水で外装についた血液等を落とす。
- 

3 消毒用アルコールを染み込ませた綿等で丁寧にふき取る。

⚠ 清掃/消毒を行う際には、適切な防護服を着用する事をお勧めします。  
●超音波洗浄器による清掃/消毒は機器損傷の恐れがあるので行わないで下さい。

■熱水洗浄器の使用が可能です。  
熱水洗浄器を使用する場合は、ご使用の熱水洗浄器の取扱説明書を確認の上使用して下さい。

## ■グラスロッドの清掃

- 

4 滅菌パックに収納・封印をし、いずれかの条件でオートクレーブ滅菌を行う。  
121℃・20分以上、132℃・15分間、または134℃・3分間
- 

5 滅菌終了後は専用滅菌ケース(または滅菌パック)のまま清潔な場所で保管。
- 

6 グラスロッドにゴミや切削物などが付着した場合は、消毒用アルコールを染みこませた綿棒等で丁寧にふき取る  
※清掃するときに、針や刃物などを使用すると傷がつき、光の透過率が下がります。

## メルサージュ エピック 2in1 パーツ交換説明動画はコチラ!!

リングレンチ			Oリングセット (ハンドピースコード用)		
注水ポンプ			Oリングセット (注水タンク用)		
Oリングセット (パウダーチャンバー接続部)			Oリングセット (ハンドピースホース用、プロフィー・ペリオ共通)		

Oリングセット (ノズル用、プロフィー・ペリオ共通)			タービンオイル		
水供給用コネクター			電流ヒューズ		
水フィルター			ロック解除ピン		