



POWER GUIDE

MERSSAGE E-PICK

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

MODE G	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

S-G0

S-G6

MODE E	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

S-V-S50	S-V-S52	S-P20	S-E4
S-V-S51	S-V-S53		
S-V-N50	S-V-S51D		
	S-V-S52D		
	S-V-S53D		

MODE P	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

S-V-N51	S-V-P10	S-PI
S-P40	S-E9	
S-V-P12	#15	
S-E12	#20	
	#25	
	#30	
	#35	

- このパワーガイドの記号と数値は、各々のチップにおける使用最大パワーモードとパワー数値を示しています。チップは必ずその指定されたパワー以下でご使用ください。

TIP No. ——— ● **S-G6**

使用最大パワー

設定モード ——— ● **G 0-6**

G:ゼネラル
E:エンド
P:ペリオ

断面形状

チップ先端より
1mmの形状
(原寸の約5倍)

* 指定されたパワー以下で使用した場合でも、使い方によっては破折することがあります。



SCALING

S-G0

使用最大パワー

G 0-4



S-G6

使用最大パワー

G 0-6



S-P1

使用最大パワー

P 0-10



S-P20

使用最大パワー

E 0-5



PERIO

S-P40

使用最大パワー

P 0-3



S-V-P10

使用最大パワー

P 0-6



S-V-P12

使用最大パワー

P 0-4



ENDODONTICS

S-E4

使用最大パワー

E 0-10



S-E9

使用最大パワー

P 0-6

Uファイル #15
#20
#25
#30
#35



S-E12

使用最大パワー

P 0-5

Uファイル #15
#20
#25
#30
#35



S-V-S50
S51

使用最大パワー

E 0-1



S-V-S52
S53

使用最大パワー

E 0-4



S50

S51

S52

S53

S-V-N50

使用最大パワー

E 0-1



S-V-N51

使用最大パワー

P 0-2



S-V-S51D
S52D
S53D

使用最大パワー

E 0-4



S51D