



歯科用多目的超音波治療器用パウダー ソフトパール

メルサージュエピック2in1用パウダーに新しくラインアップ

歯肉縁上のプラーク、
バイオフィルムや
ステイン除去に





使い方 メルサージュ エピック2in1チャンバーキット(プロフィー用)でご使用ください。

「ソフトパール」 使用上の注意

※露出した象牙質、エナメル質のう蝕、コンポジットレジン及び金の詰め物に直接噴射しないこと。[それらの表面に傷をつける恐れ]

- ノズルを歯面に対して図のような角度で噴射してください。
- ステインや矯正装置周辺の汚れなどを優しく除去します。
- フラッシュパールとの使い分けで、施術の幅を広げます。
- 成分は水に溶けやすく、表面への侵襲性が低いグリシンです。

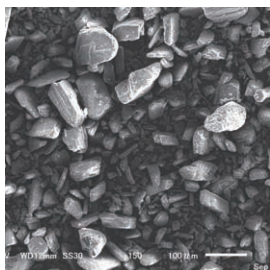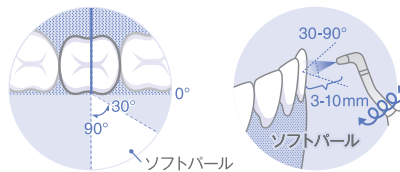

平均粒子径65μm SEM画像(×150)

SOFT pearl(グリシン)

製品名	ソフトパール
標準医院	(1ボトル250g×4本セット)
販売名	ソフトパール
一般的名称	歯面研磨材
一般医療機器届出番号	09B2X00016000157

SHOFU INC.

パウダーメンテナンスの使い分け



MERSSAGE E-PICK 2in1

	部位	使用ポイント	使用パウダー		
標準	<p>縁上 (歯肉辺縁)</p>		<p>Perio Mate Powder</p> <p>製品名:ペリオメイト パウダー 標準医院 数量:160g×2本入 一般的名称:歯面研磨材 一般医療機器 届出番号 09B2X00016000139</p>		
	<p>縁下 (歯周ポケット)</p>			オプション	<p>縁上</p>
オプション	<p>縁上</p>	<p>フラッシュパール</p> <p>ソフトパール</p> <p>ソフトパール</p>	<p>FLASH pearl</p> <p>製品名:フラッシュ パール 標準医院 300g×4本入 標準医院 15g×100袋入 一般的名称:歯面研磨材 一般医療機器 届出番号 09B2X00016000034</p> <p>SOFT pearl</p> <p>製品名:ソフトパール 数量:250g×4本</p>		

「フラッシュパール」使用上の注意

- ※歯根セメント、脱灰エナメル質、充填物、補綴物・充填物のマージン及びクラウン等には直接噴射しないこと。[それらの表面に傷をつける恐れ]
- ※口腔内の軟組織、歯肉、歯肉縁下に向け、直接噴射しないこと。[それらの表面に傷をつける恐れ]

仕様および形状は申告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

ご使用の際は電子添文、取扱説明書等をよく読んでお使いください。

取扱い店

製造販売元 株式会社 ナカニシ 栃木県鹿沼市下日向700