

※このガイドは簡単に操作するための要約です。ご使用の際は必ず取扱説明書をお読みください。

### 電源を ON/OFF する

→取扱説明書 P.12 “6-2 電源” 参照

電源 / 回転速度選択キーを 1 秒以上長押しします。

### 回転速度の設定

→取扱説明書 P.12 “6-3 回転速度の設定” 参照



- ⑤ 2,500min<sup>-1</sup>
- ④ 2,000min<sup>-1</sup>
- ③ 1,500min<sup>-1</sup>
- ② 1,000min<sup>-1</sup>
- ① 500min<sup>-1</sup>

電源 ON 時に電源 / 回転速度選択キーを押すと回転速度を選択できます。一度押す度に回転速度が 1 ステップ上昇し LED に表示します。キーを押す毎に ①→②→③→④→⑤→①とループします。

### 作動させる

→取扱説明書 P.12 “6-4 操作” 参照

ON/OFF キーを押すと回転が始まります。

**パターン 1** ON/OFF キーを押すたびに、回転／停止を行う。(正回転時のみ)

**パターン 2** ON/OFF キーを 1 秒以上押し続けると押し続けている間だけ回転し、離すと停止。

### 回転の切り換え

→取扱説明書 P.7 “4-1 操作パネルのキー” 参照

正逆切換キーを押すと、逆回転（反時計回り）に回転方向が切り換わります。

もう一度押すと、正回転（時計回り）に戻ります。ただし、回転中は回転方向の変更はできません。

### バッテリー残量

→取扱説明書 P.7 “4-2 操作パネルの表示部” 参照

LED 2 個点灯：満充電もしくはそれに近い状態です。


LED 1 個点灯：約 30~80% の残量です。

LED 1 個点滅：約 30% 以下の残量です。

## コントラアングルヘッドの注油

→取扱説明書 P.13 “7. 治療後のメンテナンス” 参照

- 注油は、コントラアングルヘッドのみ行ってください。
- 注油は治療後、またはオートクレーブ滅菌前に行ってください。
- コントラアングルヘッドの回転軸のネジ部分にペースト等が入り込んでしまった場合はヘッド先端部のみを超音波洗浄器にて洗浄することをお奨めします。洗浄後は必ず注油してください。
- パナスプレーブラシ（別売品）にFタイプスプレーノズルを装着し、コントラアングルヘッド後部にねじ込み2～3秒注油してください。

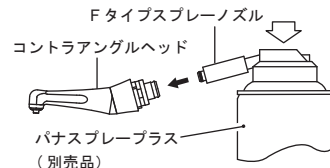

## エラー表示

→取扱説明書 P.20 “9. トラブルシューティング” 参照

故障、過負荷、断線、使用上の誤りなどにより異常が発生し、機器が停止した場合、操作パネルの逆回転表示 LED の点滅と回転速度表示部の LED の点灯でエラー表示します。エラーが表示された場合、電源を入れ直し、同様のエラーが表示されるか確認してください。再度エラーが表示された場合、以下の表を参照して対処してください。バッテリーパックの交換は取扱説明書（8. 保守 8-1 バッテリーパックの交換）をご参照ください。

回転速度	エラーの内容	エラーの原因	対処
⑤④③②①	セルフチェックエラー	回路の故障	販売店まで連絡してください。
⑤④③②①	過電流	ハンドピースのロック	負荷を取り除いてください。
⑤④③②①	過電圧	回路の故障	販売店まで連絡してください。
⑤④③②①	モーター過熱	高負荷で長時間運転	5分以上放置し、冷ましてから使用してください。
⑤④③②①	コントラアングルヘッドの回転不良	コントラアングルヘッドの回転不良	コントラアングルヘッドの洗浄、注油を行ってください。
⑤④③②①	バッテリー異常	バッテリーが異常または寿命	バッテリーパックを交換してください。
⑤④③②①	バッテリー低電圧	充電不足またはバッテリーの寿命	充電またはバッテリーパックを交換してください。
⑤④③②①	バッテリー高電圧	バッテリーまたは回路の故障	販売店まで連絡してください。
⑤④③②①	使用温度範囲外	使用温度範囲外またはバッテリー一部サーミスタ断線	使用温度範囲で使用してください。改善されない場合は、販売店まで連絡してください。
⑤④③②①	バッテリー異常発熱	バッテリーの異常発熱	適正な使用環境で充電してください。またはバッテリーパックを交換してください。他のバッテリーパックでも起こるようであれば回路の故障が考えられますので販売店まで連絡してください。

LED表示：●点灯 ○消灯

販売元



世界の歯科医療に貢献する  
**株式会社 松風**

本社 ●〒605-0983京都市東山区福福上高松町11・TEL.(075)561-1112(代)

製造販売元

**株式会社 ナカニシ**

栃木県鹿沼市下日向 700

OM-EC778 2016.06.17 005④