

## (追加・変更) ペンブライト取扱説明書

- ・このたびは、「ペンブライト」をご購入いただき、誠にありがとうございます。
- ・この説明書は本器について、付属の取扱説明書の記載内容に一部追加箇所がありますので追加部分を抜粋して説明しています。
- ・本書をよくお読みの上、「ペンブライト」を正しくお取り扱いいただけますようお願いいたします。また、本書は機器付属の取扱説明書とともに保管してください。

### 初めてのご使用の前に

該当ページ：P. iv

12時間充電し、フル充電を行なってください。充電が完了すると、インジケータは点灯に変わります。充電の際、『ピッピッピッ、ピッピッピッ、ピッピッピッ…』とビーブ音が鳴り続けることがあります。

これはローバッテリーアラーム機能で、異常ではありません。充電することでビーブ音は止まります。

約3分後、オートスリープ機能が働き、ビーブ音は停止します。

## 5 使用方法

該当ページ：P. 11

### 3. スリープ機能

スリープ機能に入るとディスプレイの表示が消えます。以下の場合にスリープ機能が働きます。

- ・3分間未使用時（オートスリープ）
- ・ON/OFFボタンの長押し

再び使用するときは、ハンドピースのいずれかのボタンを押すと元に戻ります。

### 4. ローバッテリーアラーム機能

スタンバイモードでバッテリー電力が少なくなった時、ハンドピースからビーブ音が鳴り、画面表示が点滅します。このような場合は充電を行なってください。



- ・スリープ機能に入ることによってビーブ音は鳴りやみます。

## 12 保証について

該当ページ：P. 16

本製品は厳重な検査を経て出荷されていますが、保証期間内（お買い上げから1年間）に正常な使用状態において万一故障した場合には、無償で交換いたします。ただし、消耗品（ライトガイド、ライトプロテクターなど）については、保証期間内でも有償です。登録書をお送りいただきますと弊社にてユーザー登録いたしますので、万一保証書を紛失された場合でも、保証期間内であれば保証いたします。

**登録書のご返却がない場合、保証期間内でも有償修理となる場合がございますので、必ず登録書を弊社担当者へご返却いただきますようお願い申し上げます。**