


機械器具 6 9 歯科用蒸和器及び重合器  
一般医療機器 歯科技工用重合装置 35761000

## アクセルキュア

### 【形状・構造及び原理等】

#### [ 外観 ]

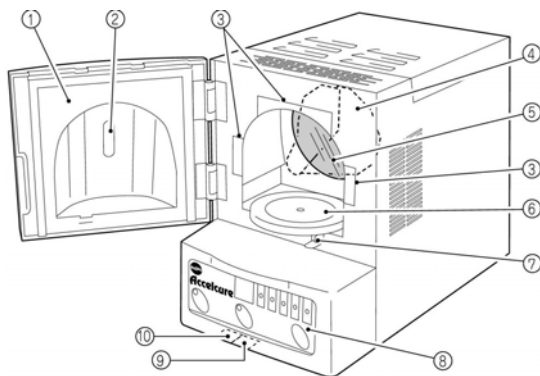

- 扉
- 窓
- 重合エアライン
- シャッター
- 防熱フィルタ
- ターンテーブル
- 扉リミットスイッチ
- 操作パネル
- ディップスイッチ
- スライドスイッチ

#### [ 定格 ]

- |               |                       |
|---------------|-----------------------|
| 1) 形名         | SLCU - AC             |
| 2) 電源         | AC 100V ± 10V 50/60Hz |
| 3) 電源入力       | 220V A                |
| 4) 電撃保護の形式の分類 | クラス                   |
| 5) 使用周囲温度     | 5 ~ 40                |

#### [ 寸法及び質量 ]

- |       |                      |
|-------|----------------------|
| 1) 寸法 | W180 × D325 × H255mm |
| 2) 質量 | 約 7.0kg              |

### 【使用目的、効能又は効果】

光重合型歯冠用硬質レジンの重合に使用する。

### 【操作方法又は使用方法等】

- 1) 本体背面の電源スイッチが OFF になっているのを確認し、電源コードを本体背面コネクタに取り付けます。
- 2) 電源コードのプラグを 100V コンセントに接続します。
- 3) ランプ点灯  
電源スイッチを ON にします。  
ON/OFF キーを 2 秒以上押して、ランプを点灯または点灯予約します。
- 4) 照射  
重合物を松風重合用ポストスタンド P に立て、本器のターンテーブルに載せ、扉を開めます。  
照射時間を選択します。  
START/STOP キーを押して、照射または照射予約します。  
照射終了時、終了ブザーが鳴るので重合物を取り出します。

#### 5) 終了

- ON/OFF キーを 2 秒以上押して、ランプを消灯または消灯予約します。
- ON/OFF 表示が橙表示になってから、電源スイッチを OFF にします。

#### [ 使用方法に関連する使用上の注意 ]

- 1) 室温 5 ~ 40 の範囲内で結露のない状態で使用すること。
- 2) 重合室内で液体、金属粉などがこぼれると、内部回路が故障し感電や火災のおそれがあるため重合室内では扱わないこと。
- 3) 重合物を取り出すときは、防熱フィルタに触らないこと。
- 4) 照射中に扉を開ける場合は「START STOP」キーで一度照射の中断を行い、扉を開けること。
- 5) 扉部リミットスイッチに触れたり、異物等を挟み込まないこと。
- 6) ランプ前面の防熱フィルタを取り外したり、割れた状態で使用しないこと。
- 7) 粉塵の多いところでは使用しないこと。

### 【使用上の注意】

取扱説明書及び「医用電気機器の使用上(安全および危険防止)の注意書」を必ず読むこと。

#### 1) 使用注意

- 電源は医用コンセントを使用し、必ず接地を施すこと。
- 引火性のものや可燃物を近くに置かないこと。
- 水のかかるような場所に置かないこと。
- 交流 100V 以外で使用しないこと。
- 濡れた手で電源プラグをコンセントより抜き差ししないこと。
- コンセントは緩んでいたり、ホコリのたまったものを使用しないこと。
- 本器の重さに充分耐えうる水平な台に設置し、側面および背面は壁面より 20cm 以上、上面は 30cm 以上のスペースを設けること。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに電源プラグをもって引き抜くこと。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理な力を加えたりしないこと。また重い物を載せたり、挟み込んだりしないこと。
- 使用後は電源スイッチを切る。また、長期間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜くこと。
- 冷却ファンをふさがないこと。
- 冷却ファンに触れたり冷却ファンを止めたりしないこと。
- 本器から発煙や異臭、異音がする場合はすぐに電源を切って、プラグを抜き、点検修理を依頼すること。
- 本器は、【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- 本器は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

#### [ 貯蔵・保管方法 ]

- ・本器は、湿気を避け室温で保管すること。
- ・本器は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【保守・点検に係る事項】

- 1) 取扱説明書の「7. 保守作業」、「8. 異常を感じたら」の項目を必ず読むこと。
- 2) 取扱説明書等に従い、日常の点検を励行すること。

取扱説明書等を必ずご参照ください。

- 3) ランプ付近が異常過熱した場合、サーモスタットが働き電源を遮断します。この場合トップカバーを外しランプ下にあるサーモスタットの復帰ボタンを押してください。  
(復帰させない限り電源が入りません。)  
必ず電源を切り電源プラグをコンセントから抜きランプが冷却してから作業を行うこと。



サーモスタット  
復帰ボタン

[ 保守点検上の注意事項 ]

- 1) 本器の点検や清掃およびランプ交換等を行うときは電源を切り、電源プラグをコンセントから抜くこと。その後、少なくとも10分以上放置し、器械が完全に冷めているのを確認してから行うこと。
- 2) 分解・修理や改造は絶対に行わないこと。
- 3) ランプを交換するときは必ず指定の「アクセルキュア用ランプ」を使用すること。
- 4) ヒューズの点検、交換は電源プラグをコンセントから抜いて行うこと。
- 5) ヒューズは必ず指定( 6A 6.4×30mm )のものを使用すること。

**【包装】**

[ セット包装 ]

- 1台/1式
- 1) 本器：1
- 2) 付属品：( 松風重合用ポストスタンドP 1、  
松風重合用ポストセット 1 )

[ 補充部品 ]( 単品包装 )

- ・アクセルキュア用ランプ
- ・松風重合用ポストスタンドP
- ・松風重合用ポストセット

**\*\* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**

製造販売元 株式会社 松風  
住所 〒605-0983  
京都市東山区福稲上高松町 11  
電話番号 075-561-1112

\*\* 製造元 株式会社 松風プロダクツ京都