




安全にお使いいただくために、
取扱説明書をよくお読みください。

Esthemat Sinta II

エステマツトシンタ II

歯科技工用ポーセレン焼成炉

取扱説明書

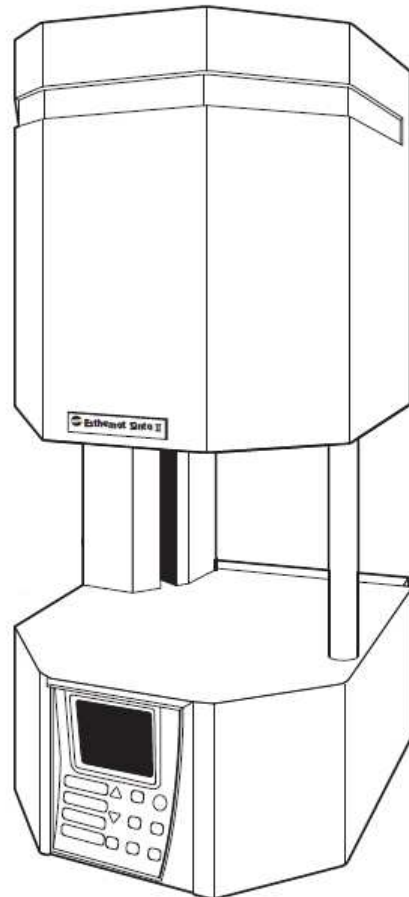

SHOFU INC.

はじめに

このたびは、歯科技工用ポーセレン焼成炉「エステマツ シンタ II」をご購入いただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書は、「エステマツ シンタ II」の正しい取り扱い方と、日常の点検および注意について説明しています。

本器の性能を十分に発揮させ、また常に良好な状態を保っていただくために、ご使用になる前には本書をよくお読みいただき、正しくご使用くださいますようお願い申し上げます。

なお、本書はお読みになった後もご使用になる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

おねがい

- 本書の内容を無断で転載することを固くお断りします。
- 製品の改良などにより、本書の内容に一部、製品と合致しない箇所が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
- 万全を期して本書を作成しておりますが、内容に関して、万一間違いやお気付きの点がございましたら、ご連絡いただきますようお願い申し上げます。
- 乱丁、落丁の場合はお取り替えいたします。最寄りの弊社支社・営業所までご連絡ください。
- 器械、システムの本体トラブルについては、保証の範囲に準じた対応をさせていただきますが、本体トラブルによる作業ストップなど、副次的なトラブルについてはその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

もくじ

はじめに	2
おねがい	2
もくじ	3
用 途	5
1 安全にお使いいただくために	6
警告表示について	6
その他の表示について	6
設置と接続について	7
使用上について	8
保守・点検について	9
2 各部の名称とはたらき	10
エステマット シンタⅡ本体	10
●本体背面	10
付属品	11
操作パネル	12
画面表示について	14
●起動背面	14
●パラメーター表示画面	14
●焼結プログラム運転中の画面	15
3 設置と接続のしかた	16
設置のしかた	16
接続のしかた	16
●電源コードの接続	16
●エアーチューブの接続	17
●コンセントへの接続	17
前準備について	18
●シンタリング台の設置	18
●周波数の選択について	18
●空焼きについて	19
4 使用方法	20
焼結プログラムについて	20
●デギャッシング機能およびエアークーリング機能について	21
●プリセットプログラムおよびユーザープログラムについて	21
焼結プログラムの選択	22
焼結プログラムの運転	23
●焼結プログラムの運転	23
●運転の終了	24

●運転の停止	25
終了	25
メニュー画面について	26
●焼結プログラムの確認	26
●焼結プログラムの編集	27
●オプションの設定	29
●焼結プログラム名の編集	31
●焼結プログラムのコピー	32
その他の機能	33
●焼結ステージを任意に昇降させる	33
●パラメーター表示画面と工程表示画面の切り替え	33
診断メニュー画面について	34
●診断メニュー画面の表示	34
●ファーンステーターの表示	35
●キーボードテスト	35
●ハードウェアテスト	36
●焼結プログラムの初期化	37
●電源周波数の選択	38
<hr/>	
5 耐用期間	39
<hr/>	
6 保守・点検	40
各部品のお手入れについて	40
●ヒーターエレメントのクリーニング	40
●焼結ステージの清掃	40
●本体の清掃	40
<hr/>	
7 異常を感じたら	41
エラー表示について	41
●ヒーターのエラー表示	41
●焼結ステージのエラー表示	41
<hr/>	
8 仕様	42
<hr/>	
9 付属品・単品販売品	43
付属品	43
単品販売品	43
<hr/>	
10 保証について	44
<hr/>	
11 プリセットプログラム表	45

用 途



酸化ジルコニウムの焼結に使用する。

1 安全にお使いいただくために

本器を安全にお使いいただくために、以下の事項を必ず守ってください。

警告表示について

本書では、安全に関する重要な注意事項を「警告」、「注意」に分類して説明しています。必ず各内容をよくお読みのうえ、厳守してください。各警告表示の内容は次のように定義されています。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いを行うと、使用者が死亡または重傷を負う可能性があることを表しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いを行うと、使用者が傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性があることを表しています。

その他の表示について

「警告」や「注意」表示以外については、下記のとおりです。



注記

・この表示を無視して誤った取り扱いを行うと、器械が正常に作動しない可能性があることを表しています。



参考

・この表示は、使用時の作業をわかりやすくするための補足説明を表しています。



参照 ・この表示は、ご覧いただきたい参照先を表しています。

設置と接続について

警告

- 必ず接地を施すこと。
万一、本器内部で漏電した場合、感電や火災のおそれがあります。
- 引火性のものや可燃性のものを近くに置かないこと。
爆発や火災のおそれがあります。
- 水のかかるような場所に置かないこと。
感電、漏電、および火災のおそれがあります。

注意

- コンセントは、緩んでいたり、ほこりのたまったものを使用しないこと。また風通しの良い場所で使用すること。
火災のおそれがあります。
- 電源は、10A以上の容量が得られる单相 200Vの電源を使用し、たこ足配線はしないこと。
容量が不足するとコンセントが発熱し、感電や火災のおそれがあります。
- 本器を持ち上げたり運搬する際には、取り扱いに注意すること。
けがをするおそれがあります。
- 機器の重さに十分耐え得る水平な台に設置すること。
本体が落下し、けがをするおそれがあります。
- 側面および背面は壁面から 20cm以上、上面は 150cm以上のスペースを設けること。
放熱されず発火するおそれがあります。
- 換気の良い場所に設置すること。
人体に有害なガスが発生するおそれがあります。
- 本器に供給するエアータンクは、0.8MPaを超えないこと。
上記を超える高圧のエアータンクを供給するとエアータンクなどの破裂によるけがのおそれがあります。

使用上について

警告

- 濡れた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししないこと。
感電のおそれがあります。
- 引火性のものや可燃性のものを近くに置かないこと。
爆発や火災のおそれがあります。
- 水をかけないこと。
感電、漏電、および火災のおそれがあります。
- 煙が出たり、異臭や異音がするなどの異常が発生したときは、使用をやめること。
感電や火災のおそれがあります。

注意

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに電源プラグを持って行うこと。
けがややけど、絶縁劣化による感電や火災のおそれがあります。
- 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理な力を加えたりしないこと。
電源コードが破損し、感電や火災のおそれがあります。
- 焼結中は高温になるため、マッフルカバーには触れないこと。
誤って触れるとやけどをするおそれがあります。
- 焼結ステージ動作中は操作パネル上の台に手や物を置かないこと。
手などをはさみ、けがをするおそれがあります。
- 使用中は換気を行うこと。
人体に有害なガスが発生するおそれがあります。
- 焼結後は高温のため、直接手でシンタリングケースに触れないこと。
誤って触れるとやけどをするおそれがあります。
- 使用後は、電源スイッチを OFF にすること。また長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜くこと。
絶縁劣化による感電や火災のおそれがあります。
- この取扱説明書に記載の用途以外には使用しないこと。
誤った用途で使用すると、けがをするおそれがあります。
- 目の損傷を防ぐために保護眼鏡等を着用すること。
着用しないで使用すると、けがをするおそれがあります。
- 以下の場合、直ちに使用を中止し、この取扱説明書に従って点検または修理を依頼すること。
感電や火災のおそれがあります。
 - ・本器の使用中に異常が発生した場合
 - ・横転などによって外部から大きな力が加わり、外観にへこみなどの損傷が見られる場合

 **警 告**

- 機器の点検や清掃、およびヒューズ交換を行うときは、電源プラグをコンセントから抜き、機器が完全に冷めていることを確認すること。
感電や火災のおそれがあります。
 - ヒューズ交換以外の分解、修理、改造は、絶対に行わないこと。
異常動作によりけがや感電のおそれがあります。
 - ヒューズは必ず指定容量(20A)のものを使用すること。
感電や火災のおそれがあります。
-

2 各部の名称とはたらき

エステマツ シンタ II 本体

マッフルカバー

焼結ステージ

操作パネル




● 本体背面

本体用ヒューズボックス

USB コネクタ
(メーカーメンテナンス用)

電源スイッチ

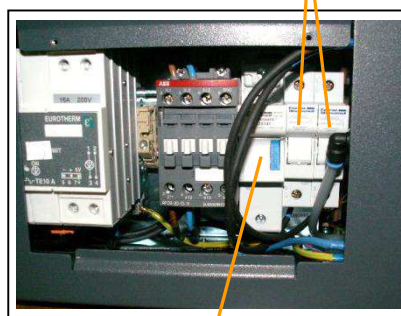

制御用ヒューズボックス




エアチューブ接続用ジョイント

ステージ昇降用ドライバー挿入口

付属のステージ昇降用ドライバーを使用して焼結ステージを手動で昇降させるときに使用します。

電源インレット

付属品

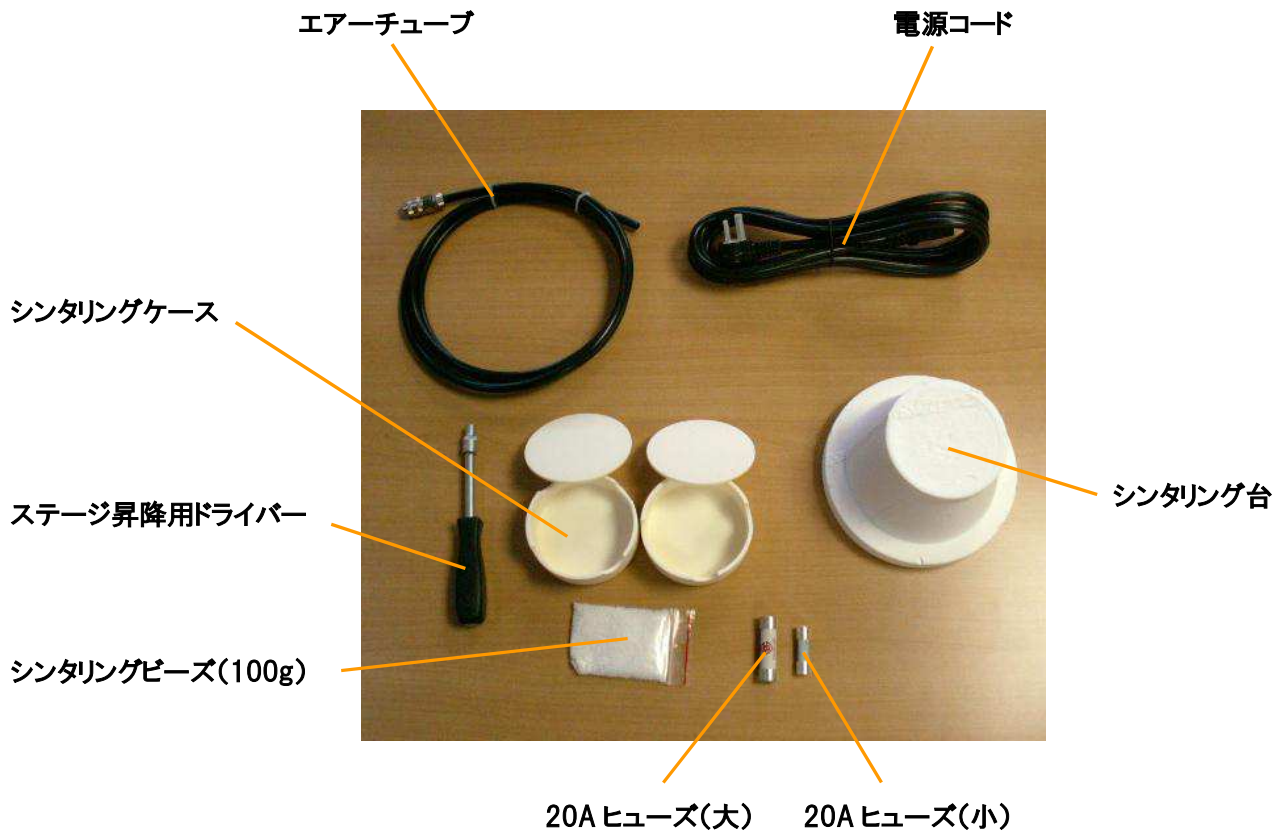

操作パネル



液晶パネル


設定値や工程等を表示します。

[ON/OFF]キー



・起動画面とパラメーター表示画面を切り替えます。

[Start]キー

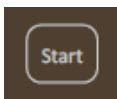

・プログラムの運転を開始します。

[STOP/LIFT]キー




・運転を停止します。
・焼結ステージが移動します。
運転していないときに[STOP/LIFT]キーを短く押すと、焼結ステージが昇降します。また長押しすると移動方向が反転して昇降します。

[SCR]キー




・運転中にパラメーター表示画面と工程表示画面とを切り替えます。
・起動画面で押すと診断メニュー画面を表示します。

[Menu]キー

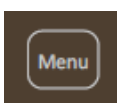


・メニュー画面を表示します。

[STEP]キー

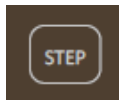

- ・焼結プログラム設定時に複数の昇温工程または冷却工程を設定するときに使用します。
- ・昇温(冷却)工程設定後、[STEP]キーを押すと次の昇温(冷却)工程設定画面に移動します。
- ・[STEP]キーを押さずに矢印キーを押すと昇温工程設定時は冷却工程設定へ、冷却工程設定時はエアークーリング設定へ移動します。

[PROG]キー

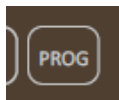

- ・プログラムリスト画面を表示します。

[ENT]キー



- ・設定した内容を登録します。

[CLR]キー



- ・入力した数値を取り消します。

テンキー



- ・数値やアルファベットの入力に使用します。

矢印キー





- ・各メニュー画面で項目を選択します。
- ・焼成ステージが移動します。
- ・パラメーター表示画面で上矢印キーを押し続けている間、焼結ステージが上昇します。また下矢印キーを押し続けている間、焼結ステージが下降します。

画面表示について

●起動画面


本体背面の電源スイッチを入れると起動画面が表示されます。
起動画面の表示中に[ON/OFF]キーを押すとパラメーター表示画面が表示されます。
また、起動画面表示中に[SCR]キーを押すと診断メニュー画面が表示され、各機能のテストや焼結プログラムの初期化などを行うことができます。

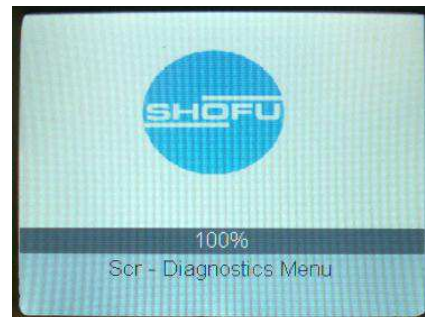


 参照 診断メニューについては「診断メニュー画面について」(P. 34)を参照ください。

●パラメーター表示画面

パラメーター表示画面では各焼結プログラムの設定、変更および運転を行うことができます。
パラメーター表示画面の表示中に[ON/OFF]キーを押すと起動画面に戻ります。

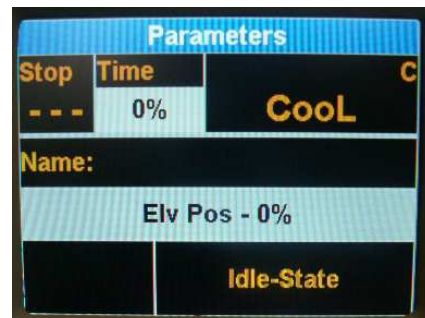

 参照 各焼結プログラムの選択、運転および編集方法については「焼結プログラムの選択」(P. 22)、「焼結プログラムの運転」(P. 23)および「焼結プログラムの編集」(P. 27)を参照ください。

●焼結プログラム運転中の画面

焼結プログラム運転中は下記の画面が表示されます。

[SCR]キーを押すとパラメーター表示画面と工程表示画面を切り替えることができます。



パラメーター表示画面



工程表示画面

3 設置と接続のしかた


- 「設置と接続について」の **⚠ 警告** および **⚠ 注意** を守ってください。

設置のしかた

1. 凍結や結露のない換気の良い一般技工室で、正常かつ安全に機器の操作が行える場所に設置してください。

 **注記** 湿気、温度の高い場所や直射日光の当たる場所は避けてください。

2. 十分強度のある水平で安定した台上に置き、本体の側面および背面は壁面より 20cm以上、上面は 150cm以上のスペースを設けてください。

 **注記** 本器を運搬する場合は、必ず 2 人以上の作業者で行なってください。

接続のしかた

●電源コードの接続


1. 本体背面の電源スイッチが OFF になっていることを確認してください。



2. 付属の電源コードを本体背面の電源インレットに接続してください。




●エアチューブの接続


 **参考** デギャッシング機能またはエアークーリング機能を使用するときには、付属のエアチューブを接続してください。これらの機能を使用しないときにはエアチューブを接続する必要はありません。

1. 付属のエアチューブを本体背面のエアチューブ接続用ジョイントにカチッと音がするまで確実に差し込んでください。




2. 0.5MPa程度の圧力が使用できるエアー配管に、エアチューブを接続してください。

 **注記** 本器には、オイルミストを含まない清浄で乾燥したエアーを供給してください。

 **参考** エアチューブの口径は直径 8mmです。

●コンセントへの接続

本器背面の電源スイッチが OFF になっていることを確認してから、電源コードを 200V のコンセントに接続してください。


 **参考** 電源は以下の容量が必要です。

電源電圧	単相 200V
電源入力	2.0kVA
コンセント	3 極コンセント 250V 20A
コンセント形状	


前準備について

すべての設置、接続作業の終了後、実際の焼結作業が行えるように前準備をします。


●シンタリング台の設置

 **注記** 使用するときは、必ず焼結ステージにシンタリング台を置いてください。

1. 本体背面の電源スイッチを「ON」にしてください。
焼結ステージが下降し、起動画面が表示されます。

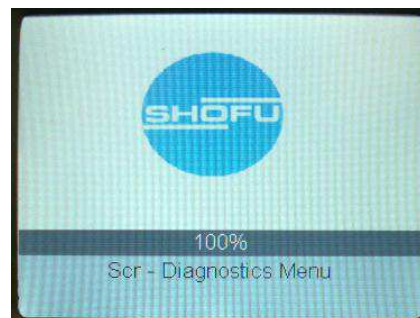

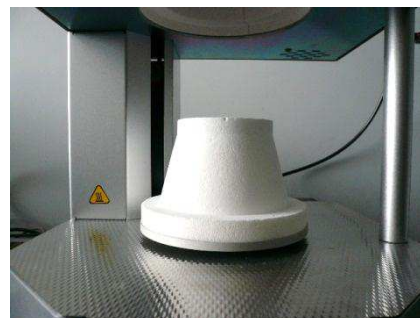

2. 焼結ステージに付属のシンタリング台をセットしてください。



●周波数の選択について

本器は焼結ステージの移動に AC モーターを採用しているため、ご使用になる地域の電源に合わせて周波数 (50/60Hz) を選択する必要があります。診断メニュー画面で周波数を選択してください。

 **注記** ご使用の電源に合わせた周波数を選択しないと焼結ステージが正常な位置に停止しませんので必ず正しい周波数を選択してください。

 **参照** 周波数の選択方法については「電源周波数の選択」(P. 38)を参照ください。

●空焼きについて

実際に焼結を行う前に、マッフル、シンタリングケースおよびシンタリングビーズの空焼きを行ないます。

1. 付属のシンタリングケースにシンタリングビーズを敷き詰めてください。



2. シンタリングケースにカバーを被せてください。



3. シンタリング台中央にシンタリングケースを置いてください。



注記

- ・必ず付属のシンタリングケースを使用してください。
- ・シンタリングケースは必ずシンタリング台中央に置いてください。シンタリング台からはみ出して置くと焼結ステージ上昇時に炉口にシンタリングケースが当たり器械が破損するおそれがあります。





4. 焼結プログラム番号 1 (Auto Glaze) を選択し、1 回空焼きを行なってください。



参照

- ・焼結プログラムの選択方法については「焼結プログラムの選択」(P.22)を参照ください。
- ・焼結プログラムの運転方法については「焼結プログラムの運転」(P.23)を参照ください。

4 使用方法

●「使用上について」の  **警告** および  **注意** を守ってください。

焼結プログラムについて

本器で焼結を行う場合は、あらかじめ登録されたプリセットプログラムを使用するか、またはユーザープログラムに設定したい焼結プログラムを設定する必要があります。

焼結プログラムは最大で5つの昇温工程および5つの冷却工程が設定できます。
 焼結プログラムの運転を開始すると、これらの設定内容に従って工程が進行します。
 各項目および内容については次のとおりです。









- ・設定する必要のない項目は[CLR]キーを押してください。
- ・時間の入力、表示は左側2桁が「時間」、右側2桁が「分」になります。

(例) 30分 「00:30」、2時間 「02:00」



- ・環境温度の影響等により設定した昇温速度どおりに昇温しない場合があります。
- ・冷却速度を設定しても、自然冷却以上の速度で冷却できません。

設定項目	設定範囲	内容
デギャッシング(Degassing)	100～250℃	デギャッシング(脱ガス機能)温度を設定します。マッフル内がこの温度になるまで焼結ステージを少し開けて換気を行います。
Heat Rate Up 1～5 (昇温速度 1～5)	1～70℃/分	昇温工程の昇温速度を設定します。  注記 ・第1昇温工程の昇温速度は必ず設定してください。 ・第2～5昇温工程は前昇温工程が設定されていないと設定できません。
High Temp Up 1～5 (焼結温度 1～5)	300～1600℃	昇温工程の焼結温度を設定します。  注記 ・第1昇温工程の焼結温度は必ず設定してください。 ・第2～5昇温工程は前昇温工程が設定されていないと設定できません。 ・前昇温工程の焼結温度より低い温度は設定できません。
Temp Hold Up 1～5 (係留時間 1～5)	0分～5時間00分	昇温工程の係留時間を設定します。  注記 ・第2～5昇温工程は前昇温工程が設定されていないと設定できません。
Heat Rate Down 1～5 (冷却速度 1～5)	1～70℃/分	冷却工程の冷却速度を設定します。  注記 ・第2～5昇温工程は前昇温工程が設定されていないと設定できません。

設定項目	設定範囲	内容
Cool Temp Down 1~5 (冷却温度 1~5)	300~1600℃	冷却工程の冷却温度を設定します。  注記 ・最後に設定した焼結温度より高い温度は設定できません。 ・第 2~5 冷却工程は前冷却工程が設定されていないと設定できません。 ・前冷却工程の冷却温度より高い温度は設定できません。
Temp Hold Down 1~5 (係留時間 1~5)	0 分~5 時間 00 分	冷却工程の係留時間を設定します。  注記 ・第 2~5 冷却工程は前冷却工程が設定されていないと設定できません。
Active Cool (エアークーリング)	100~450℃	エアークーリングの開始温度を設定します。

●デギャッシング機能およびエアークーリング機能について

デギャッシング機能は焼結時に発生するガスを排出するための機能です。


デギャッシング機能を設定している場合、焼結プログラムの運転を開始すると焼結ステージが 95%上昇したところで停止し、エアーが流れて排気を開始します。設定した温度になるとエアーが停止し焼結ステージが 100% 上昇し、次の工程に進みます。

また、エアークーリング機能は焼結終了後の炉内の温度を早く下げるための機能です。

エアークーリング機能を設定している場合、冷却工程時に設定した温度になるとエアーが流れて排気を行います。



注記 デギャッシング機能およびエアークーリング機能を使用する場合は、エアーチューブを接続し、本器にエアーを供給してください。

 参照 エアーチューブの接続方法については「エアーチューブの接続」(P. 17)を参照ください。

●プリセットプログラムおよびユーザープログラムについて


本器にはプリセットプログラムとして、Auto Glaze プログラムや焼結プログラムなどが内蔵されています。また、ユーザープログラムを設定することもできます。

焼結プログラム番号 1~ 5 :プリセットプログラム

焼結プログラム番号 6~199 :ユーザープログラム




参考 プリセットプログラムの内容を変更することもできます。

 参照 プリセットプログラムの内容については、「11.プリセットプログラム表」(P. 45)を参照ください。

焼結プログラムの選択


1. 本体背面の電源スイッチを「ON」にしてください。
起動画面が表示されます。

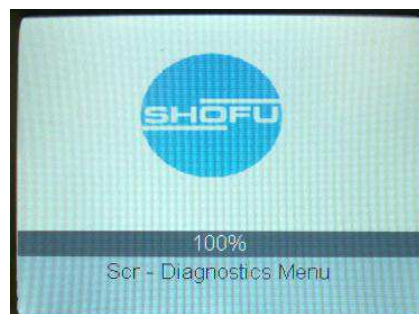

2. [ON/OFF]キーを押してください。
パラメーター表示画面が表示されます。



炉内温度が100°C以下のときは、「COOL (Cool)」と表示されます。

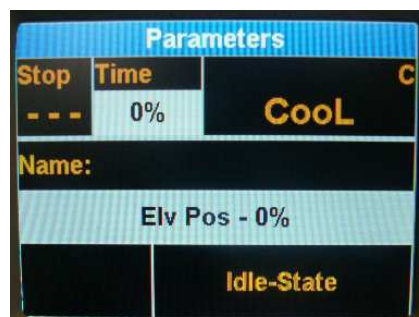


3. [PROG]キーを押してください。
プログラムリスト画面が表示されます。



4. テンキーで選択したい焼結プログラム番号を入力してから[ENT]キーを押してください。
焼結プログラムが選択され、パラメーター表示画面が表示されます。




矢印キーで焼結プログラムを選択することもできます。

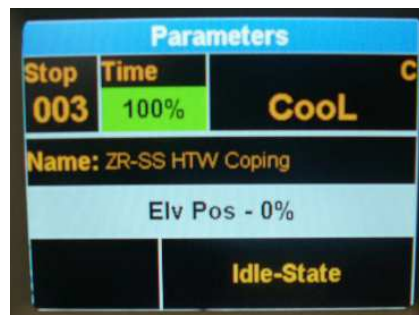

焼結プログラムの運転

●焼結プログラムの運転


1. 本体背面の電源スイッチを「ON」にしてください。
起動画面が表示されます。

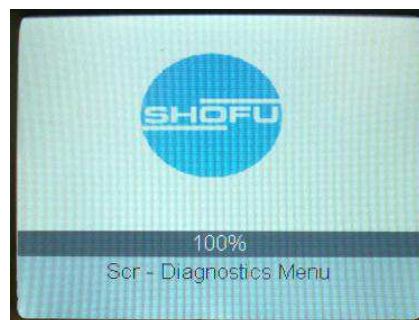

2. [ON/OFF]キーを押してください。
パラメーター表示画面になります。



炉内温度が100°C以下のときは、「COOL(CooL)」と表示されます。

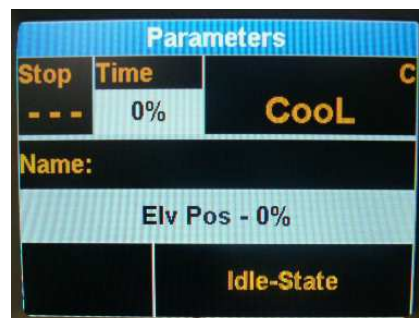

3. 運転を行う焼結プログラムを選択してください。

参照 焼結プログラムの選択方法については「焼結プログラムの選択」(P.22)を参照ください。

4. シンタリングビーズを敷き詰めたシンタリングケースに焼結する補綴装置を置いてください。



- ・焼結には必ず付属のシンタリングケースを使用してください。
- ・補綴装置をシンタリングケースに置くときは、咬合面または唇側を下側にして置いてください。歯頸部マージンは下側にしないでください。
- ・補綴装置がシンタリングケースに触れたり、また補綴装置同士が触れ合わないように入れてください。



5. シンタリングケースにカバーを被せてください。



6. シンタリング台中央にシンタリングケースを置いてください。



・シンタリングケースは必ずシンタリング台中央に置いてください。シンタリング台からはみ出して置くと焼結ステージ上昇時に炉口にシンタリングケースが当たり器械が破損するおそれがあります。




・シンタリングケースは1段、2段どちらでも使用できます。(最大2段まで)



7. [Start]キーを押してください。
運転を開始します。



・炉内温度が100℃以上のときは[Start]キーを押しても運転を開始しません。
ただし、炉内温度300℃以下であれば[Start]キーを2回連続押すことで運転を開始することができます。

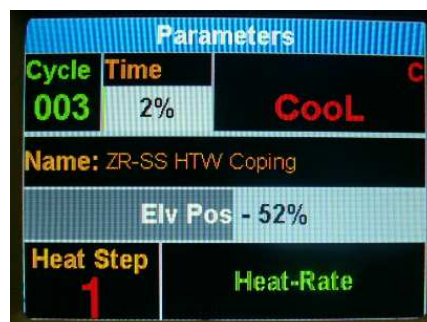

●運転の終了

運転が終了し、炉内温度が150℃以下になると焼結ステージが自動的に下降します。焼結ステージ下降後、焼結プログラムが完全に終了するとアラームが5回鳴ります。



運転終了後、炉内温度が150℃以下にならないと焼結ステージが下降しません。途中で運転を停止したい場合は、[STOP/LIFT]キーを押してください。



⚠ 注意 焼結後は高温のため、直接手でシンタリングケースに触れないこと。

●運転の停止

運転中の焼結プログラムを停止したい場合は、[STOP/LIFT]キーを押してください。
運転を停止します。



炉内温度が 400°C 以上の時は [STOP/LIFT] キーを押しても焼結ステージは下降しません。
炉内温度が 400°C 以下になると焼結ステージを下降させることができます。焼結ステージを下降させる場合は再度 [STOP/LIFT] キーを押してください。



⚠ 注意 焼結後は高温のため、直接手でシンタリングケースに触れないこと。

終了

焼結ステージを最上方まで上げてから、本体背面の電源スイッチを OFF にしてください。



注記 湿気やゴミの混入を防止するため、使用しないときは焼結ステージを最上方まで上げてマッフルを閉じてください。



メニュー画面について

メニュー画面では、焼結プログラムの設定や変更、またはオプションの設定などを行うことができます。各項目および内容については次のとおりです。

項目	内容	参照ページ
0 – View Parameters	焼結プログラムの確認を行います。	P. 26
1 – Edit Current Program	現在選択している焼結プログラムの編集を行います。	P. 27
2 – Options	温度表示の選択などを行います。	P. 29
3 – Edit Program Name	焼結プログラム名の編集を行います。	P. 31
4 – Copy Program	焼結プログラムのコピーを行います。	P. 32


●焼結プログラムの確認(View Parameters)

この項目では、現在、選択している焼結プログラムのパラメーターの確認を行うことができます。


1. 確認したい焼結プログラムを選択してください。

 **参照** 焼結プログラムの選択方法については「焼結プログラムの選択」(P.22)を参照ください。

2. パラメーター表示画面で[Menu]キーを押してください。
メニュー画面が表示されます。

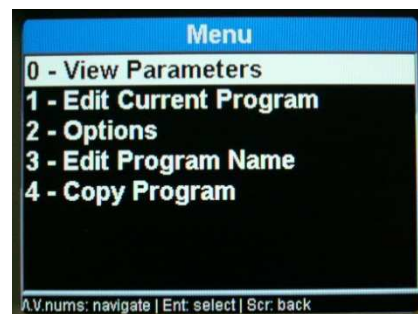

3. メニュー画面で「0 – View Parameters」を選択して[ENT]キーを押してください。
「View Parameters」画面が表示されます。

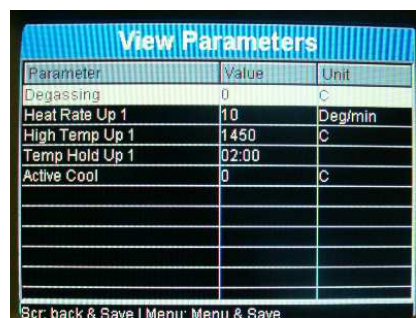A screenshot of the 'View Parameters' screen. The title 'View Parameters' is at the top. Below it is a table with three columns: 'Parameter', 'Value', and 'Unit'. The table contains the following data:

Parameter	Value	Unit
Degassing	0	C
Heat Rate Up 1	10	Deg/min
High Temp Up 1	1450	C
Temp Hold Up 1	02:00	
Active Cool	0	C

At the bottom, there is a status bar with the text 'Scr. back & Save | Menu: Menu & Save'.

4. 焼結プログラムを確認してください。




・確認できる焼結プログラムは、1 の項で選択した焼結プログラムとなります。

5. [Menu]キーまたは[SCR]キーを押してください。
メニュー画面に戻ります。


●焼結プログラムの編集(Edit Current Program)

この項目では、現在、選択している焼結プログラムのパラメーターの設定や変更を行うことができます。矢印キーで編集したい項目を選択してください。



1. 確認したい焼結プログラムを選択してください。

 参照 焼結プログラムの選択方法については「焼結プログラムの選択」(P.22)を参照ください。

2. パラメーター表示画面で[Menu]キーを押してください。
メニュー画面が表示されます。

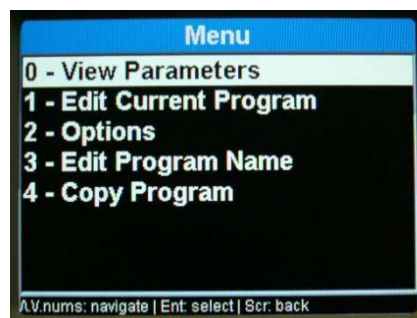


3. メニュー画面で「1 - Edit Current Program」を選択して[ENT]キーを押してください。
「デギャッシング(Degassing)」の編集画面が表示されます。

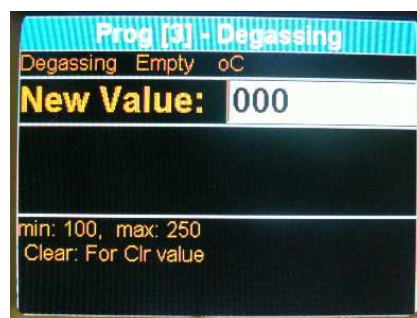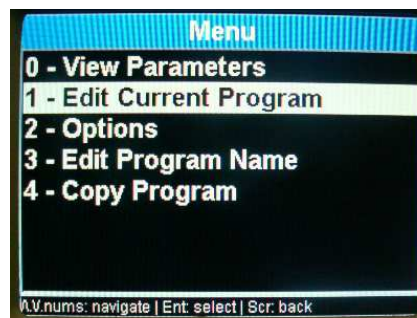

4. 設定または変更したいパラメーターを入力後、矢印キーを押してください。
次の設定項目に移動します。設定する必要のない項目は[CLR]キーを押してください。



5. 設定または変更が終了したら、[ENT]キーを押してください。
設定内容が登録されてパラメーター表示画面に戻ります。

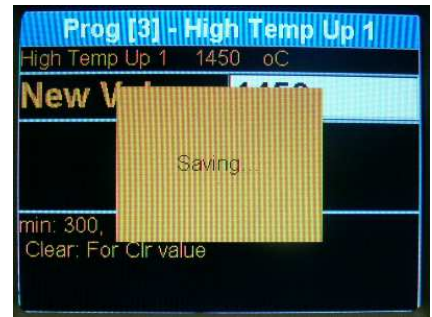

- ・各項目の設定値に対して矛盾があるときには、エラー表示が表示されます。
- ・エアークーリング(Active Cool)の項目はあらかじめ450°Cが登録されています。エアークーリング機能を使用しない場合は[CLR]キーでパラメーターを消去してください。
- ・設定または変更できる焼結プログラムは 1.の項で選択した焼結プログラムとなります。
- ・焼結プログラム管理のため、登録した焼結プログラムの記録を残しておくことをお勧めします。




6. 焼結プログラムが正しく設定または変更されていることを確認してください。

参照 焼結プログラムの確認方法については「焼結プログラムの確認」(P.26)を参照ください。

各工程の設定方法について

本器では、最大で5つの昇温工程および5つの冷却工程を設定することができます。複数の昇温工程または冷却工程の設定を行なう場合にはパラメータ入力後、[STEP]キーを押してください。続けて次の昇温工程または冷却工程の設定を行なうことができます。パラメーター入力後、[STEP]キーを押さずに矢印キーを押した場合は昇温工程設定時は冷却工程設定へ、冷却工程設定時はエアークーリング設定へ移動します。

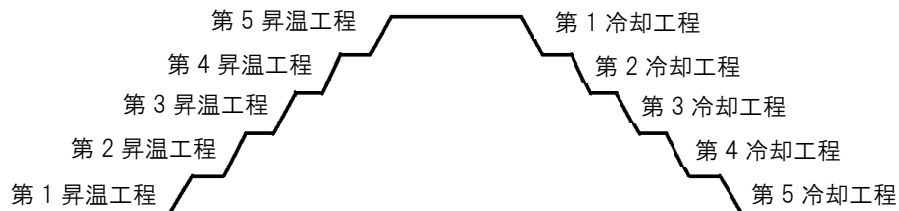

- | | | |
|--------|------------|-------------------------|
| 昇温工程設定 | ⇒ [STEP]キー | ⇒ 次の昇温工程設定へ(最大第5昇温工程まで) |
| 冷却工程設定 | ⇒ [STEP]キー | ⇒ 次の冷却工程設定へ(最大第5冷却工程まで) |
| 昇温工程設定 | ⇒ 矢印キー | ⇒ 冷却工程設定へ |
| 冷却工程設定 | ⇒ 矢印キー | ⇒ エアークーリング設定へ |

●オプションの設定(Options)

この項目では、温度表示の選択などを行うことができます。
各項目および内容については次のとおりです。

(1)温度表示の選択(Temp Units)

温度表示の単位として、「摂氏(°C)」または「華氏(° F)」のどちらかを選択できます。
初期設定は「摂氏(°C)」になっています。

(2)マッフル内温度の補正(Temp Calibration)

マッフル内温度の補正を行うことができます。マッフル内の温度を高くしたい場合は「+」、または低くしたい場合は「-」を選択し、補正值を入力してください。
初期設定は器械によって異なります。

(3)表示言語の選択(Language)

画面の表示言語を選択できます。
初期設定は「英語(English)」になっています。

(4)工程表示切替時間の選択(Time To Graph)


パラメーター表示画面から工程表示画面に切り替わる時間を設定できます。





工程表示画面に切り替えをしないときには「OFF」を設定してください。
初期設定は「30 秒」になっています。

<オプションの設定方法>


1. パラメーター表示画面で[Menu]キーを押してください。
メニュー画面が表示されます。

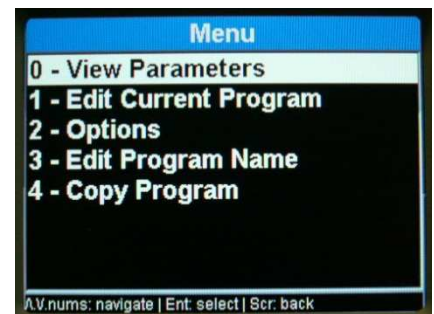

2. メニュー画面で「2 -Options」を選択して[ENT]キーを押してください。
「Options」画面が表示されます。

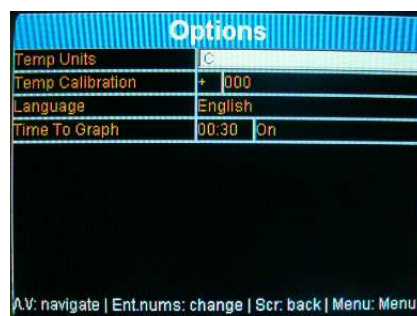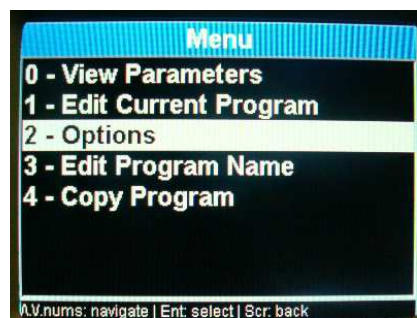


3. 矢印キーで設定したい項目を選択して[ENT]キーで選択してください。
また数値を設定するときにはテンキーで数値入力してください。
4. 設定が終了したら、[Menu]キーまたは[SCR]キーを押してください。
設定内容が登録されてメニュー画面に戻ります。

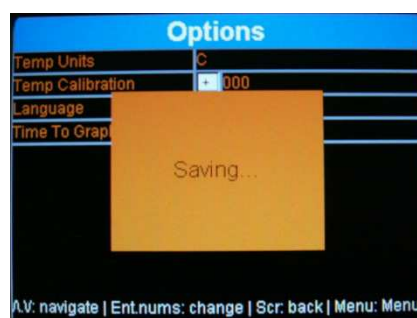


●焼結プログラム名の編集(Edit Program Name)

この項目では、焼結プログラム名の編集を行うことができます。


1. パラメーター表示画面で[Menu]キーを押してください。
メニュー画面が表示されます。

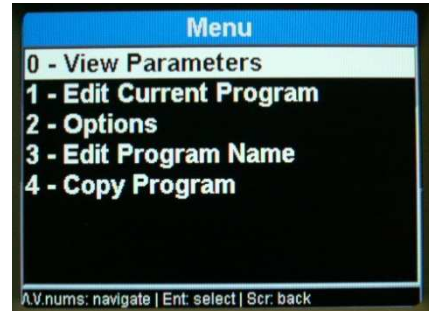

2. メニュー画面で「3 - Edit Program Name」を選択して[ENT]キーを押してください。
「Edit Program Name」画面が表示されます。

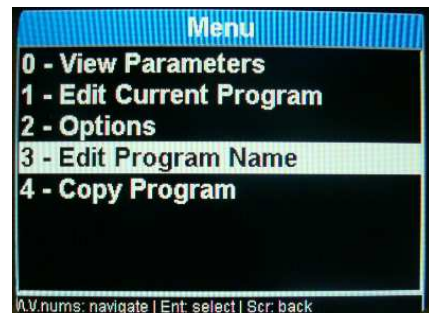

3. 矢印キーおよびテンキーで「Prog」に設定したい焼結プログラム番号、また「Name」に焼結プログラム名を設定してください。
4. 設定が終了したら、[ENT]キーを押してください。
設定内容が登録されます。

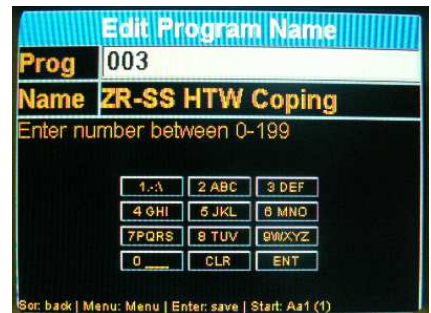


5. [Menu]キーまたは[SCR]キーを押してください。
メニュー画面に戻ります。




●焼結プログラムのコピー(Copy Program)

この項目では、焼結プログラムのコピーを行うことができます。


1. パラメーター表示画面で[Menu]キーを押してください。
メニュー画面が表示されます。

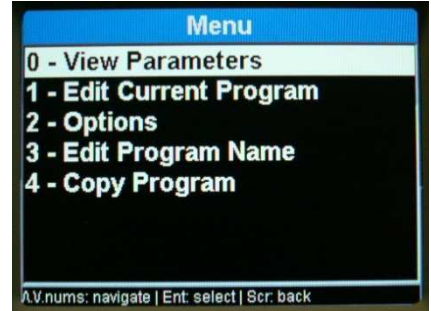


2. メニュー画面で「4 - Copy Program」を選択して[ENT]キーを押してください。
「Copy Program」画面が表示されます。

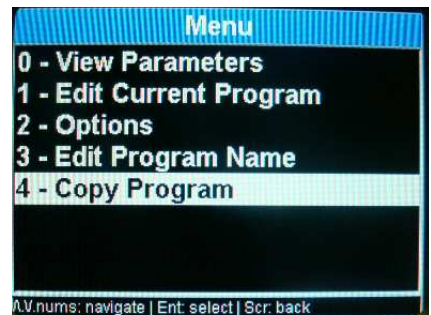

3. 矢印キーおよびテンキーで「Copy from」にコピー元の焼結プログラム番号、また「Copy to」にコピー先の焼結プログラム番号を設定してください。
4. 設定が終了したら、[ENT]キーを押してください。
設定内容が登録されます。

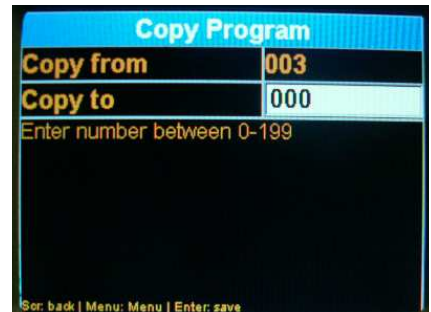

5. [Menu]キーまたは[SCR]キーを押してください。
メニュー画面に戻ります。

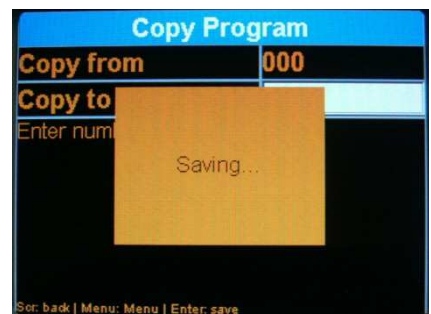

その他の機能

●焼結ステージを任意に昇降させる

運転していないときに焼結ステージを任意に昇降させることができます。昇降させる方法は[STOP/LIFT]キーを使用する方法と矢印キーを使用する方法があります。

＜[STOP/LIFT]キーを使用する＞

[STOP/LIFT]キーを短く押すと焼結ステージが昇降します。また長く押すと移動方向が反転して昇降します。

＜矢印キーを使用する＞

1. 上矢印キーを押し続けている間、焼結ステージが上昇します。
2. 下矢印キーを押し続けている間、焼結ステージが下降します。

●パラメーター表示画面と工程表示画面の切り替え

焼結プログラム運転中にパラメーター表示画面と工程表示画面を切り替えることができます。

1. プログラム運転中にパラメーター表示画面で[SCR]キーを押してください。
工程表示画面が表示されます。



[SCR]キーを押さなくても「Time To Graph」で設定された条件になると自動的に工程表示画面に切り替わります。

2. パラメーター表示画面に戻る場合は再度[SCR]キーを押してください。
パラメーター表示画面が表示されます。

診断メニュー画面について

診断メニュー画面では、各機能のテストや焼結プログラムの初期化などを行うことができます。各項目および内容については次のとおりです。

項目	内容	参照ページ
0 – Oven Data	ファーンエスの基本データを表示します。	P. 35
1 – Keys Test	操作パネル上の各キーの動作テストを行います。	P. 35
2 – HW Tests	焼結ステージの昇降状態のチェックを行います。	P. 36
3 – Reload Programs	焼結プログラムの初期化を行います。	P. 37
4 – Elevator Time Settings	ご使用の電源に合わせた周波数を選択します。	P. 38




「5-Load USB」～「10-Auto Tests」までの項目はメーカーメンテナンス用の項目です。(パスワードを入力しないと動作しません。)

●診断メニュー画面の表示

1. 本体背面の電源スイッチを「ON」にしてください。
起動画面が表示されます。



2. [SCR]キーを押してください。
診断メニュー画面が表示されます。

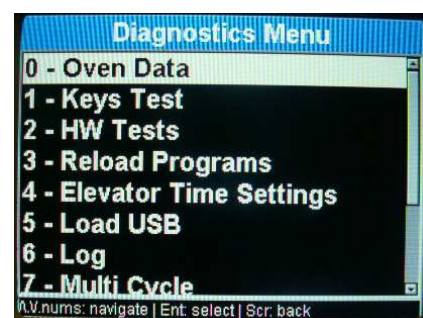

●ファーンステータの表示(Oven Data)

この項目では、ファーンステータの基本データを確認することができます。

1. 診断メニュー画面で「0 - Oven Data」を選択して[ENT]キーを押してください。
「Oven Data」画面が表示されます。



このデータは、ファーンステータの内部データです。

Status	Unit		
960	C	Calibration	0
960	C	Value	4155
50 / 60	Hz	Value	50(230 N)
Version		SP:4-10.3.55	

Scr. back & Save | Menu: Menu & Save

2. [Menu]キーまたは[SCR]キーを押してください。
診断メニュー画面に戻ります。

●キーボードテスト(Keys Test)

この項目では、操作パネル上の各キーが正常に機能しているかを確認することができます。

1. 診断メニュー画面で「1 - Keys Test」を選択して[ENT]キーを押してください。
「Keys Test」画面が表示されます。

Diagnostics Menu	
0 - Oven Data	
1 - Keys Test	
2 - HW Tests	
3 - Reload Programs	
4 - Elevator Time Settings	
5 - Load USB	
6 - Log	
7 - Multi Cycle	

A.V.nums: navigate | Ent: select | Scr. back

Keys Test					
1	2	3	Λ	Scr	On
4	5	6	V	Menu	Start
7	8	9			
Clear	0	Enter	Prog	Step	Stop

Menu Twice: Menu

2. 該当するキーを押し、キーの動作チェックを行います。
正常に動作している場合、キーが押されると押されたキーの表示色が変わります。
3. [Menu]キーを 2 回押してください。
診断メニュー画面に戻ります。



●ハードウェアテスト(HW Tests)

この項目では、焼結ステージの昇降状態を確認することができます。



「PROG: heating」の項目がありますが、動作いたしません。
確認することができる項目は焼結ステージのみです。

1. 診断メニュー画面で「2 - HW Tests」を選択して[ENT]キーを押してください。
「HW Tests」画面が表示されます。

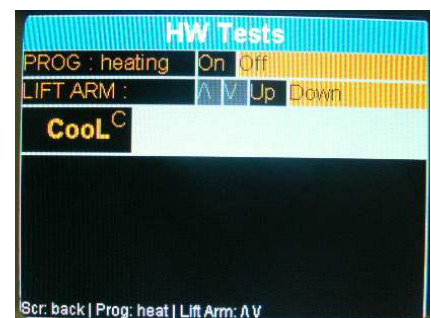
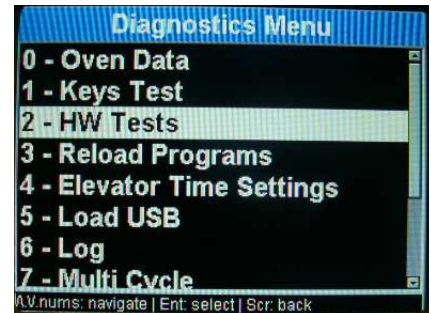


2. 上矢印キーを押してください。
焼結ステージが上昇します。焼結ステージが最上方まで上昇すると「Up」の表示色が変わります。
3. 下矢印キーを押してください。
焼結ステージが下降します。焼結ステージが最下方まで下降すると「Down」の表示色が変わります。
4. [SCR]キーを押してください。
診断メニュー画面に戻ります。

●焼結プログラムの初期化(Reload Programs)

この項目では、焼結プログラムを変更前の初期値に戻すことができます。

1. 診断メニュー画面で「3 - Reload Programs」を選択して[ENT]キーを押してください。
「Reload Programs」画面が表示されます。

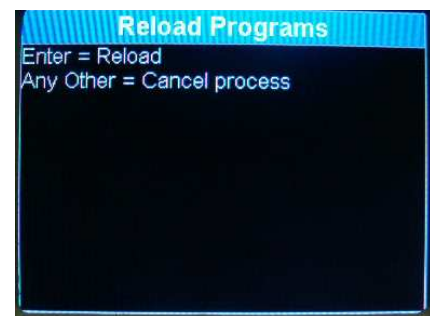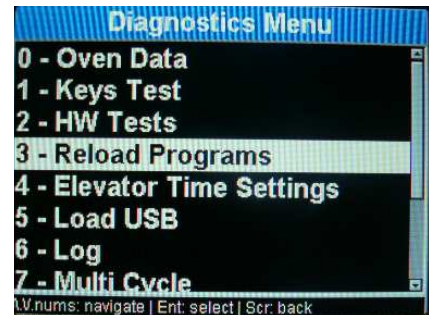

2. 焼結プログラムの初期化を行うときは[ENT]キーを押してください。
焼結プログラムの初期化を開始します。初期化が終了すると、診断メニュー画面に戻ります。





- ・焼結プログラムの初期化を行わないときは[ENT]キー以外のキーを押してください。
初期化を行わずに診断メニュー画面に戻ります。
- ・初期化を行うとすべての焼結プログラムが初期化されます。登録されたユーザープログラムは消去されますので、初期化前に控えておいてください。


●電源周波数の選択(Elevator Time Settings)

この項目では、電源周波数の選択ができます。


1. 診断メニュー画面で「4 - Elevator Time Settings」を選択して[ENT]キーを押してください。
「Elevator Time Settings」画面が表示されます。

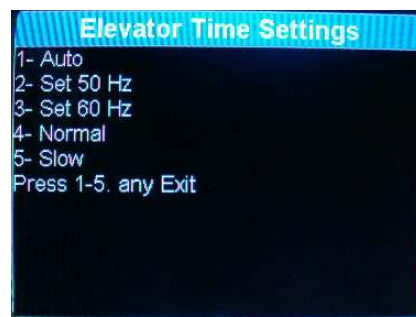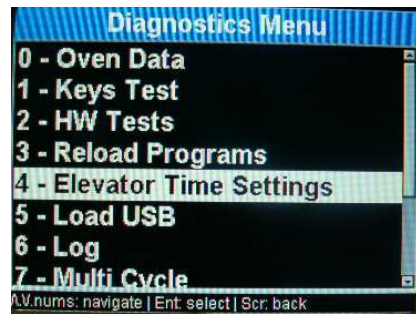

2. 50Hz 地域の場合は「2」を、60Hz 地域の場合は「3」を選択し[ENT]キーを押してください。
電源周波数が不明な場合は「1」を選択し[ENT]キーを押してください。自動で焼結ステージが上下に移動し電源周波数を特定します。

 注記 「4-Normal」および「5-Slow」は選択しないでください。


3. ファーネスデータを表示して電源周波数が正しく選択されていることを確認してください。

 参照 ファーネスデータの表示方法については「ファーネスデータの表示」(P.35)を参照ください。

Status	Unit	Value
960	C	Calibration 0
960	C	Value 4155
50 / 60	Hz	Value 50(230 N)

Version SP:4-10.3.55


Scr. back & Save | Menu: Menu & Save

 注記 電源周波数が「50(230N)」または「60(230N)」になっていることを確認してください。もし「230S」と表示されている場合は、2.の項で「4-Normal」を選択してください。「230N」に変更されます。

5 耐用期間

本器は納入後、正規の保守点検を行なった場合に限り、耐用期間は 7 年間とします。
【自己認証(弊社データ)による】

6 保守・点検

- 「保守・点検について」の  **警告** を守ってください。

各部品のお手入れについて

●ヒーターエレメントのクリーニング

焼結作業を繰り返し行なうと、ヒーターエレメント保護層に欠けが見られるようになります。この場合、放置しておくとヒーターエレメントの早期損傷の原因となるため、ヒーターエレメント保護層を再生する必要があります。再生を行うためには、プリセットプログラム番号 1 (Auto Glaze) を運転してください。



注記

- ・ヒーターエレメントのクリーニングを行なう場合は、シンタリング台に何も載せないでください。
- ・炉内のヒーターエレメントは素手で触らないでください。ヒーターエレメントの早期損傷の原因となります。



参考

使用頻度にもよりますが、2 週間に 1 回程度、ヒーターエレメントのクリーニングを行なってください。

●焼結ステージの清掃

焼結ステージ上に異物や粉塵がたまると正常に焼結できないおそれがありますので、常に清掃し清潔にしてください。また、焼結ステージの移動範囲には物を置かないようにしてください。

●本体の清掃

本器を清掃するときは、清潔な乾いた柔らかい布を使用してください。汚れがひどいときは、中性洗剤を含ませた布で拭き、そのあと清潔な乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。



注記

- ・シンナー、ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。
- ・操作パネルはプラスチック製です。高温のものやとがったものを接触させないでください。故障の原因となったり、外観を損ねるおそれがあります。
- ・炉内のヒーターエレメントは素手で触らないでください。ヒーターエレメントの早期損傷の原因となります。

7 異常を感じたら

本器の使用中に異常を感じたら、直ちに使用を中止して、下記の表を参考に点検を行なってください。
どの症例にも当てはまらない場合や、対策を行っても改善されない場合は故障が考えられますので、点検・修理を依頼してください。

症 状	原 因	対 策
電源スイッチを ON にしても動作しない。	電源プラグが確実にコンセントに差し込まれていない。	電源コードの接続を確認してください。
	ヒューズが切れている。	点検・修理を依頼してください。
運転が突然止まる。	元電源の遮断。	電源をチェックしてください。
運転を開始しても温度が上がらない。	ヒューズが切れている。	点検・修理を依頼してください。
	ヒーターの破損。	点検・修理を依頼してください。

エラー表示について

異常の内容に応じて、ブザー音とともに液晶パネルに以下のメッセージが表示されます。
修理が必要な場合は、直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼してください。

●ヒーターのエラー表示

番号	表示	内容
0.1	Heat Up/Heat Down	温度制御異常。 電源を OFF にしたあと、再度電源を ON にしてください。 繰り返し表示される場合は点検・修理を依頼してください。
0.2	Temperature Over Max	温度制御異常。点検・修理を依頼してください。
0.3	T.C broken	熱電対が断線しています。点検・修理を依頼してください。
0.7	Temperature Under Min	温度制御異常。点検・修理を依頼してください。

●焼結ステージのエラー表示

番号	表示	内容
2.1	Lift Up	焼結ステージ昇降異常。点検・修理を依頼してください。
2.2	Lift Down	

8 仕様

形名	SEM-ST II
使用温湿度範囲	温度 5～40℃ 湿度 5～31℃では最大相対湿度 80%、および 31℃を越えるときは 40℃において相対湿度 50%まで直線的に減少する湿度
電源電圧及び周波数	AC200V 50/60Hz
電源入力	2.0kVA
使用最高温度	1600℃
マッフル内有効寸法	φ95×140(mm)
焼結プログラム数	200
外形寸法	W352×D445×H775(mm)
質量	約 57kg

※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

9 付属品・単品販売品

付属品

・シタリング台	1
・シタリングケース	2
・シタリングビーズ(100g)	1
・ステージ昇降用ドライバー	1
・電源コード	1
・エアークューブ	1
・20A ヒューズ(小)	1
・20A ヒューズ(大)	1
・取扱説明書	1
・保証書	1
・添付文書	1

単品販売品

・シタリング台	1
・シタリングケース	2
・シタリングビーズ(100g)	1
・電源コード	1
・エアークューブ	1

10 保証について

本製品は厳重な検査を経て出荷されていますが、保証期間内(お買い上げから1年間)に正常な使用状態において万一故障した場合には、無償で修理いたします。ただし、消耗品については、保証期間内でも有償です。詳しくは、添付の保証書をご覧ください。

11 プリセットプログラム表

プログラム No.	1	2	3	4	5
プログラム名	Auto Glaze	BruxZir	ZR-SS HTW Coping	ZR-SS HTW Bridge	ZR-SS Colored
デギャッシング Degassing(°C)	-	-	-	-	-
昇温速度 1 Heat Rate Up1(°C/min)	30	10	10	5	5
焼結温度 1 High Temp Up1(°C)	1500	1530	1450	1450	1450
係留時間 1 Temp Hold Up1(hh:mm)	02:00	02:00	02:00	02:00	02:00
昇温速度 2 Heat Rate Up2(°C/min)	-	-	-	-	-
焼結温度 2 High Temp Up2(°C)	-	-	-	-	-
係留時間 2 Temp Hold Up2(hh:mm)	-	-	-	-	-
昇温速度 3 Heat Rate Up3(°C/min)	-	-	-	-	-
焼結温度 3 High Temp Up3(°C)	-	-	-	-	-
係留時間 3 Temp Hold Up3(hh:mm)	-	-	-	-	-
昇温速度 4 Heat Rate Up4(°C/min)	-	-	-	-	-
焼結温度 4 High Temp Up4(°C)	-	-	-	-	-
係留時間 4 Temp Hold Up4(hh:mm)	-	-	-	-	-
昇温速度 5 Heat Rate Up5(°C/min)	-	-	-	-	-
焼結温度 5 High Temp Up5(°C)	-	-	-	-	-
係留時間 5 Temp Hold Up5(hh:mm)	-	-	-	-	-
冷却速度 1 Heat Rate Down1(°C/min)	-	4	-	-	-
冷却温度 1 Cool Temp Down1(°C)	-	300	-	-	-
係留時間 1 Temp Hold Down1(hh:mm)	-	-	-	-	-

プログラム No.	1	2	3	4	5
プログラム名	Auto Glaze	BruxZir	ZR-SS HTW Coping	ZR-SS HTW Bridge	ZR-SS Colored
冷却速度 2 Heat Rate Down2(°C/min)	-	-	-	-	-
冷却温度 2 Cool Temp Down2(°C)	-	-	-	-	-
係留時間 2 Temp Hold Down2(hh:mm)	-	-	-	-	-
冷却速度 3 Heat Rate Down3(°C/min)	-	-	-	-	-
冷却温度 3 Cool Temp Down3(°C)	-	-	-	-	-
係留時間 3 Temp Hold Down3(hh:mm)	-	-	-	-	-
冷却速度 4 Heat Rate Down4(°C/min)	-	-	-	-	-
冷却温度 4 Cool Temp Down4(°C)	-	-	-	-	-
係留時間 4 Temp Hold Down4(hh:mm)	-	-	-	-	-
冷却速度 5 Heat Rate Down5(°C/min)	-	-	-	-	-
冷却温度 5 Cool Temp Down5(°C)	-	-	-	-	-
係留時間 5 Temp Hold Down5(hh:mm)	-	-	-	-	-
エアークーリング Active Cool(°C)	-	-	-	-	-

※エステマツ シンタⅡによる酸化ジルコニウムを焼結するための基本スケジュールです。焼結状態は設置環境や焼結個数等によって微妙に異なる場合がありますので、ご使用前に必ず試し焼きを行い、正確な焼結温度を求めてください。



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

<http://www.shofu.co.jp>

本社●〒605-0983京都市東山区福稲上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

70910