



# アイスペシャル C-I かんたんガイド

## 撮影 1 充電電池とSDカードを入れます 2 電源を入れます

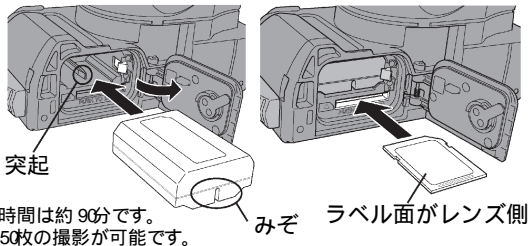


充電電池の充電時間は約90分です。  
フル充電で約250枚の撮影が可能です。

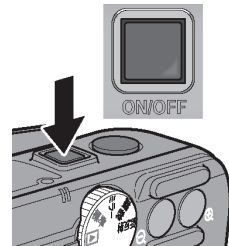

### ワンポイント

電池の残量表示について  
 (白色) 電池容量は十分にあり  
 (赤色) 電池の充電/交換をお勧めします  
 電池がなくなりました。電池を充電/交換してください  
 電源ON直後の約4秒間のみ表示されます  
 パワーセーブ機能について  
 約3分以上(初期設定時)何も操作をしないでいると、自動的に電源が切れます。

## 3 撮影モードを選択します

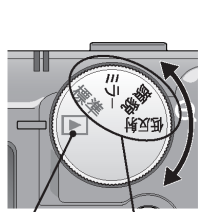

再生モード 撮影モード




- 再生モード 撮影画像の再生
- 標準モード 口腔内撮影全般
- ミラーモード ミラー撮影用
- 顔貌モード 顔貌 胸像撮影用
- 低反射モード シェードテイクなど

## 4 撮りたい倍率(大きさ)を選択します



小さくなる 大きくなる

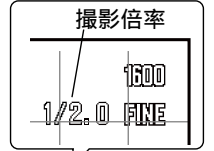



各モードの撮影可能倍率

モード	倍率
標準モード	1.0, 1/1.3, 1/1.5, 1/2.0, 1/2.5, 1/3.0, 1/4.0
ミラーモード	1.0, 1/1.3, 1/1.5, 1/2.0, 1/2.5, 1/3.0, 1/4.0
顔貌モード	1/1.0, 1/1.2
低反射モード	1.4, 1.2, 1.0, 1/1.3, 1/1.5, 1/1.8, 1/2.0

デジタルズームが併用されます


## 5 カメラを前後させ、画面でおおよそのピントが合うように距離を調節します

**【注意】**  
シャッターにはまだ触れないでください!

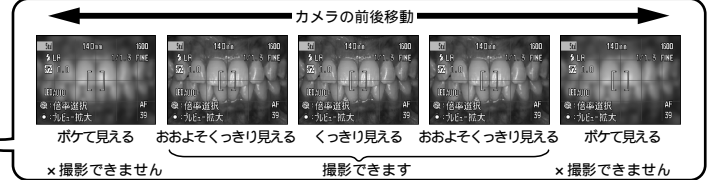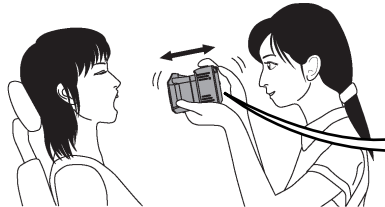


### ワンポイント

距離の目安が画面上部に表示されます

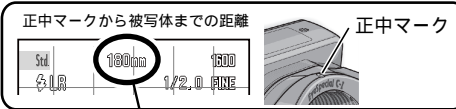

実行ボタンで中央部を拡大表示します

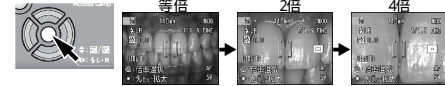


2倍または4倍拡大中でも、シャッター半押しで元の画面に戻ります。


LED/L ボタンの動作について

- 【標準 ミラー 低反射モードのとき】
- LED照明の点灯モードの変更
- LED ON: 自動 LED ON 常時点灯 LED OFF: 点灯なし
- 【顔貌モードのとき】
- フラッシュ発光モードの変更
- FLASH AUTO: 自動 強制発光 発光 OFF

上下キーで画像の明るさを調節できます

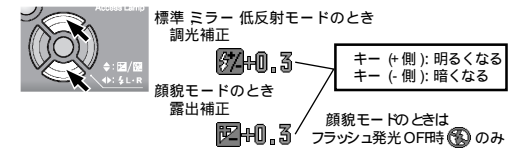


左右キーでフラッシュ片側発光が可能です

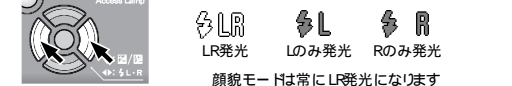

## 6 シャッターを半押しします

この枠内でピントを合わせます

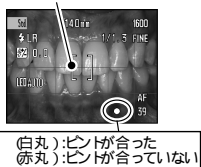

- ・ピントが合うとピッという電子音が鳴り、画面右下に白い が表示されます。
  - ・画面右下に赤い が点灯した場合は、ピントが合っていない。
- 被写体との距離が撮影可能範囲内かどうか確認してください。


## 7 ピントが合ったらシャッターを全押しします

### ワンポイント

撮りかたのコツ

足を軽く開き、重心を低くして、胸を閉め、体が動かないように注意しながら、指の腹の部分でゆっくりとシャッターを押し込むと、構図のブレを抑えることができます。

撮影後、撮った画像が約5秒間表示されます

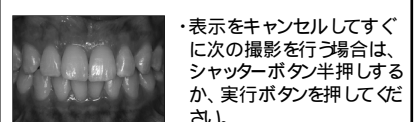

## 再生 1 方法

撮影モードでQV/画を押します  
再生モードを選択します




## 2 画面上部を押して見たい画像を選択します



## 3 十字キーで見たい部分を拡大 縮小します 4 QV/画で画像を消去できます

- ・1コマ再生(拡大再生中にQV/画ボタンを押すと画像を消去することができます)
- ・このコマを消去しますか? と表示されたら、十字キーで「はい」を選択して実行ボタンを押してください

## 5 [方法のみ] シャッター半押し/MENUボタンで次の撮影に移ります

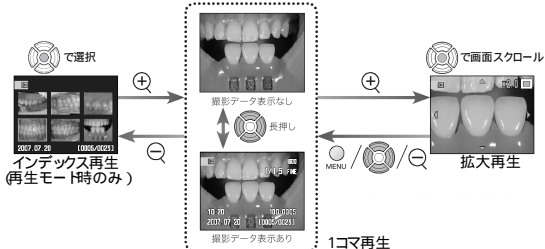

世界の歯科医療に貢献する  
**株式会社 松風**

本社 ● 〒605-0983 京都市東山区福福上高松町11 ● TEL(075)561-1112(代)