



日本語版



# SHOFU SureFile

松風シュアファイル for  TrinityCore

本ソフトの概要	1
本ソフトの起動方法	2
使用方法	3
お知らせについて	7
TrinityCore3 との連携方法	8
QRコードのスキャンについて	10
Q & A	11
参考情報	12
仕様	15


For TrinityCore Ver. 3. x

**SHOFU INC.**


## 本ソフトの概要

本ソフトはデジタル口腔撮影装置 「アイススペシャル C-II」、「アイススペシャル C-III」、「アイススペシャル C-IV」 および「アイススペシャル C-V」 専用の画像振り分けソフトです。

株式会社モリタ製「TrinityCore3」と連携し、TrinityCore3 で選択した患者の QR コードをアイススペシャル C-II/C-III/C-IV/C-V でスキャンしてから撮影し、撮影された SD カードをパソコンに差し込むだけで患者情報に基づいた画像の振り分けを自動的に行うことができます。

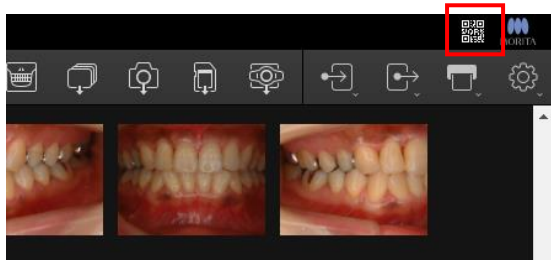


- ① TrinityCore3で患者を選択し、「QR表示」ボタンを押してQRコードを表示する。

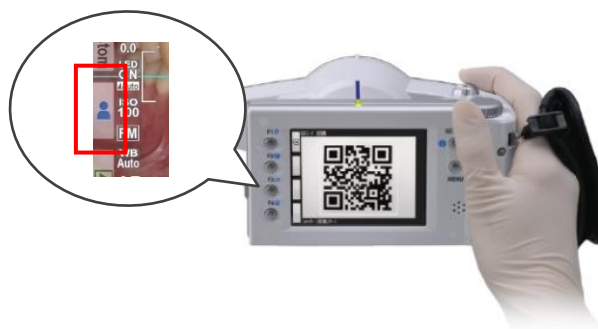

- ② アイススペシャル C-II/C-III/C-IV/C-V で[患者情報]メニューから QR コードをスキャンする。



- ③ 続けて患者を撮影する。

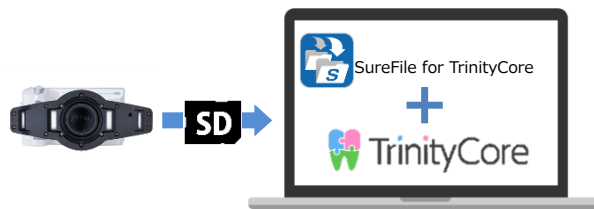

- ④ SD カードをパソコンに挿入する。

※ 本ソフトをお使いいただくためには、別途、株式会社モリタ製「TrinityCore3」が必要になります。また、「SureFile for TrinityCore」と「TrinityCore3」を連携させるためには設定作業が必要となります。

※「TrinityCore3」に関するご質問およびシステム連携に関するご質問は、株式会社モリタへお問い合わせください。


※ 「TrinityCore3」は Version 1.1.0 以降で対応しています。

- 「TrinityCore3」は株式会社モリタの商標です。
- Microsoft、Windows、Windows 10、Windows 11 は米国 Microsoft® Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windows の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating System です。

## 本ソフトの起動方法

デスクトップ上のアイコンをダブルクリックします。

(スタートメニューから、「すべてのプログラム」→「SHOFU」→「SureFile for TrinityCore」を選択することでも起動できます。)

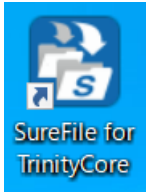


タスクトレイに以下のアイコンが表示されていることを確認します。



### 初回起動時のオプションについて

インストール直後の初回起動時に下記画面が表示されます。

標準版など、他の種類の SureFile からの入れ替えの場合必ず「設定を削除して起動」を選択してください。

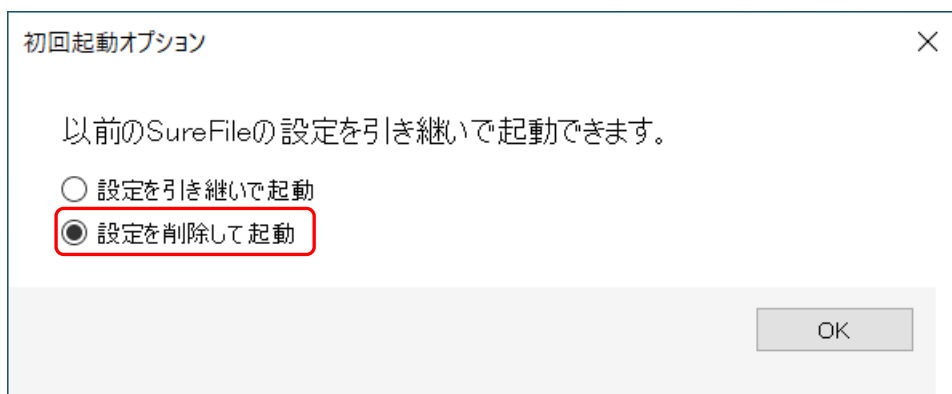

### 参考


- ・ 次回以降は自動的に起動するように設定されています。
- ・ 設定から、自動的に起動しないように変更することもできます。



## 使用方法


ここでは本ソフトウェアの機能について説明します。

### メニュー画面

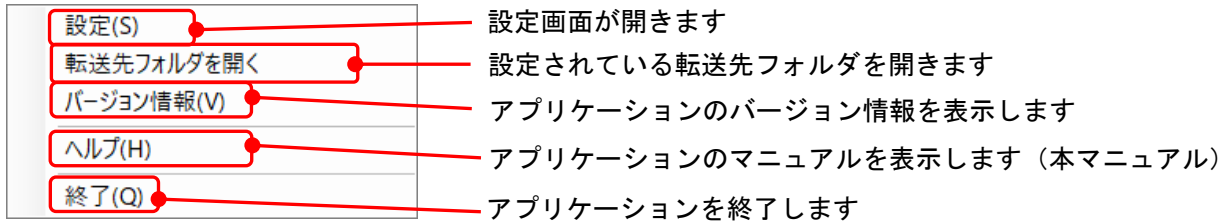

### メニューの表示方法

タスクトレイのアイコンを右クリックするとメニュー画面が表示されます。

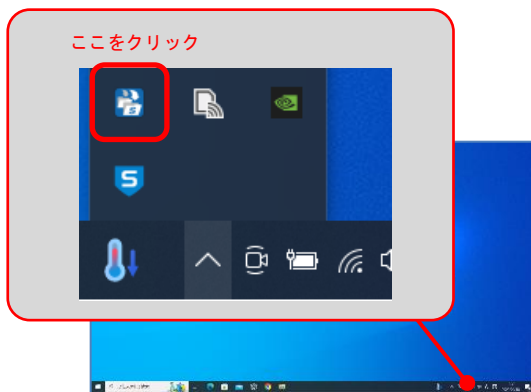



## 設定

本ソフトの基本設定及び画像の振り分け条件の設定を行います。

各機能を有効にするにはチェックボックスをクリックしてチェックマークをつけます。

### 【 設定画面 】

設定 - SHOFU SureFile for TrinityCore

一般

A  システム起動時に自動的に起動する

監視対象

B  リムーバブルディスク

C  アイスパシャルC-II~C-VでフォーマットしたSDカードのみを監視対象とする

D  転送前に確認する

自動的に転送を開始する

E  転送完了後に自動的にリムーバブルディスクを取り外す  
※ご利用のPC環境によっては自動取り外しが正常に動作しない場合があります

F  指定フォルダ

G  フォルダを変更...

転送先

H  フォルダを変更...

I  MOVファイルを別のフォルダに転送する

J  フォルダを変更...

K  元の画像を削除する

L  患者情報画像を転送しない

M  日付ごとのサブフォルダに保存する  
日付の書式: YYYYMMDD

N



一般	
<b>A</b>	パソコン起動時に本ソフトも自動的に起動します。
監視対象	
<b>B</b>	SD カードから画像を転送する場合はチェックします。
<b>C</b>	アイスペシャルC-II/C-III/C-IV/C-VでフォーマットしたSDカードのみを監視対象にしたい場合にチェックします。 この機能を有効にしておくと、アイスペシャル C-II/C-III/C-IV/C-V 以外で使用している SD カードや USB メモリなどの他のリムーバブルディスクを挿入しても取り込みが開始されません。
<b>D</b>	画像転送前に確認するか、確認せずに自動的に転送を開始するか選択します。
<b>E</b>	転送完了後に自動的にリムーバブルディスクを取り外すか取り外さないかを選択します。
<b>F</b>	指定フォルダを利用して画像を転送する場合はチェックします。
<b>G</b>	監視対象としたいフォルダを設定します。 【注記】 指定フォルダ以下のすべてのフォルダが監視対象になります。
転送先	
<b>H</b>	静止画の転送先のフォルダを指定します。 ※振り分けられた画像が保存されるフォルダです。
動画の転送先フォルダを静止画と別にする場合はチェックします。	
<b>I</b>	<b>J</b> 動画の転送先のフォルダを指定します。 ※振り分けられた画像が保存されるフォルダです。
<b>K</b>	SD カード/指定フォルダ内に保存されていた画像を転送完了後、削除します。
<b>L</b>	右図のような患者情報画像を転送しないようにします。
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>2013.06.24 12:35 ID: 11111</p> </div> <p style="text-align: center;">患者情報画像</p>
<b>M</b>	患者フォルダ内に、日付ごとのサブフォルダが作成されます。 日付の書式はドロップダウンリストから 12 種類を選択できます。
<b>N</b>	フォルダ名の命名規則を変更するなど、より詳細に設定を変更することができます。



## 詳細設定

フォルダ名の命名規則を変更するなど、より詳細に設定を変更することができます。

### 【詳細設定画面】




A

患者 ID 番号ごとのフォルダを作成する際に、0 で埋めて桁数をそろえる機能の ON/OFF を設定します。また、表示桁数を変更することもできます。

## バージョン情報

現在インストールされているソフトウェアの情報を表示します。

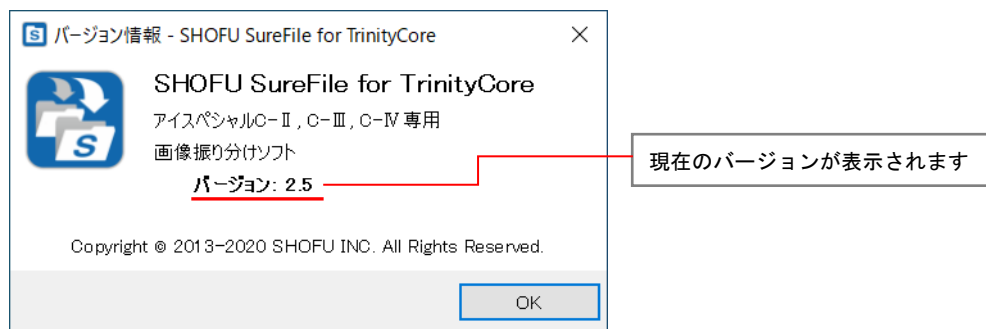



## お知らせについて

パソコンがインターネットに接続されている場合、SureFile 起動時に下図のようなウィンドウが表示されることがあります。カメラのファームウェアの更新情報などを不定期でお知らせします。



URL をクリックすると既定のブラウザで該当ページを表示します。


[OK] ボタンを押すとお知らせは削除されます。[後で確認する]を押すと次回起動時にもう一度お知らせを表示します。



## TrinityCore3 との連携方法

※TrinityCore3 の詳細な使用方法については、TrinityCore3 のマニュアルを参照してください。また TrinityCore3 の操作に関してご不明な点は株式会社モリタにお問い合わせください。

1. 「SureFile for TrinityCore」を起動した状態にします。  
※SureFile for TrinityCoreは設定を変更する場合を除いて、とくに操作を行う必要はありません。
2. 「TrinityCore3」を起動します。
3. TrinityCore3 で患者を選択し、患者情報を呼び出してください。
4. 患者検索/登録ボタンを押して患者 QR コードを表示させてください。

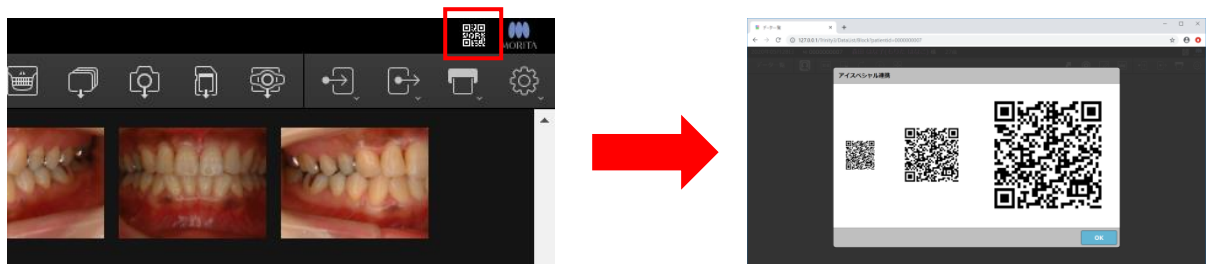

5. 表示された QR コードをアイスペシャル C-II/C-III/C-IV/C-V でスキャンしてください。  
※この操作は、患者様の口腔内を撮影する前に行ってください。  
※スキャン方法の詳細は P. 11 を参照してください。






6. 続けて、患者様の口腔内を撮影してください。




7. 撮影が終わったら、SD カードをパソコンに挿入してください。SureFile for TrinityCore にて TrinityCore3 への転送が開始されます。

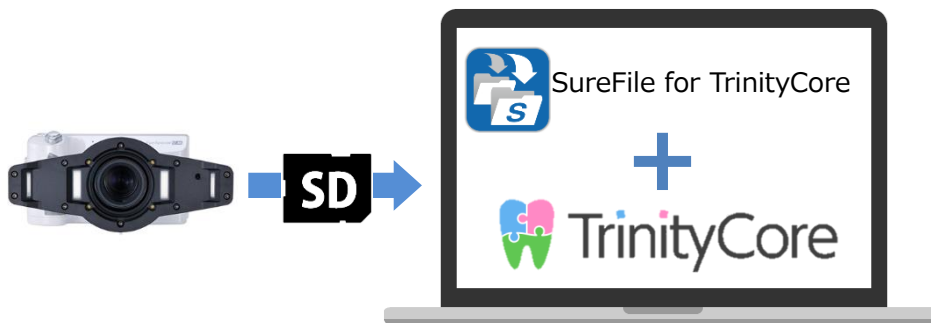

8. 転送が完了した後、TrinityCore で全ての患者を取り込みする場合は「アイスペシャル一括取り込み」を、選択患者のみを取り込みする場合は「アイスペシャル取り込み」ボタンを選択してください。

## QRコードのスキャンについて

### ■QRコードのスキャン方法について

1. 撮影モード画面でF3キーを押すか、 タブをタッチしてください。



2. 患者情報画面が出たら、「QRコードから入力」をタッチしてください。



3. 白枠の少し内側に QR コードが収まるようカメラを前後左右に動かして調節し、シャッターを半押ししてください。



**ポイント**

- ・真上から撮影する。
- ・白枠の少し内側に収まるようにする。
- ・ブレないようにしっかり構える。



## Q & A

**Q 1.** SureFie（標準版）と SureFile for TrinityCore の同時使用はできますか？

**A 1.** できません。SureFile for TrinityCore をお使いいただくには、SureFie（標準版）をアンインストールする必要があります。

**Q 2.** SureFie（標準版）ですでに取り込んだ画像がパソコン内にある場合、アンインストールするとどうなりますか？

**A 2.** SureFie（標準版）をアンインストールしても画像はパソコン内に残ります。

**Q 3.** SureFie（標準版）ですでに取り込んだ画像を TrinityCore3 に登録するにはどうしたらいいですか？

**A 3.** TrinityCore3 の標準機能を使って、手動で取り込んでください。

**Q 4.** QR コードをスキャンせずに撮影した画像を TrinityCore3 に取り込むにはどうしたらいいですか？

**A 4.** TrinityCore3 の標準機能を使って、手動で取り込んでください。

**Q 5.** SD カードからパソコンへの転送は一患者ごとに行う必要がありますか？それとも複数の患者をまとめて転送することが可能ですか？


**A 5.** 撮影前に正しく患者ごとの QR コードのスキャンを行えば複数患者の一括転送は可能です。


**Q 6.** 撮影後にパソコンに SD カードを挿入しても自動的に転送されない。

**A 6.** SD カードをご使用前にアイスペシャル C-II/C-III/C-IV/C-V でフォーマットしていなかった。  
※SureFile for TrinityCore ではアイスペシャル C-II/C-III/C-IV/C-V でフォーマットした SD カードのみを転送する仕様となっています。


## 参考情報

### アイスペシャル C-II/C-III/C-IV/C-V で SD カードをフォーマットする方法


1. 撮影モードまたは再生モードからMENU (MENU キー) を押し、さらに  (F4 キー) を押します。

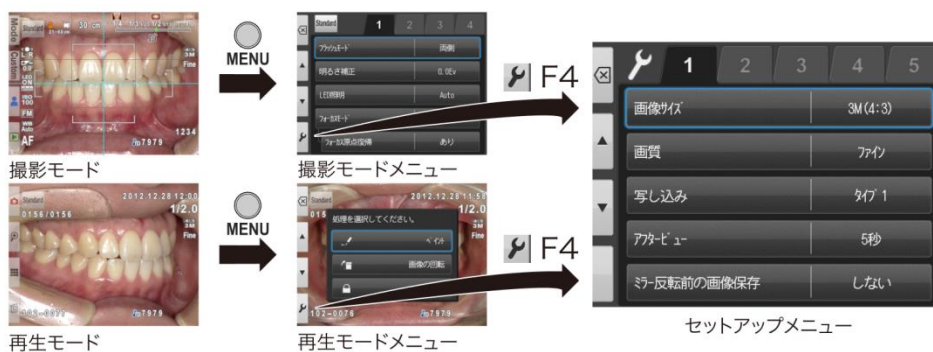

2. タブ5を選択し、その後「SDカードのフォーマット」を選択します。

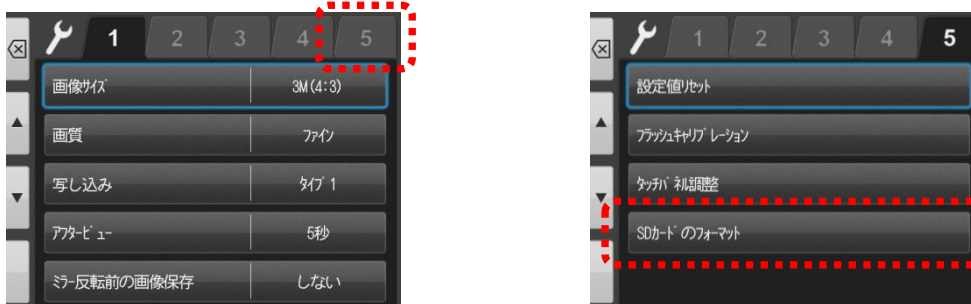

3. 「カードをフォーマットしますか？」というメッセージが表示されたら「OK」を選択します。

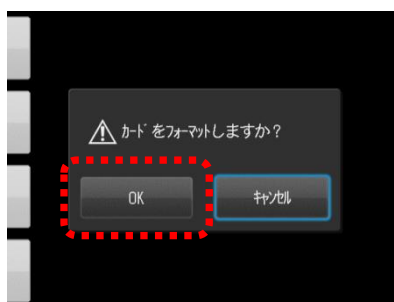

SD カードのフォーマットが完全に終了したことを確認してから、SD カードを取り出してください。


#### 注記

SD カードをフォーマットすることで、SD カード内の画像データはすべて消去されます。必要ならばフォーマットを行う前にパソコンなどへ画像をバックアップしてください。

## アイスペシャル C-IV/C-V で患者情報の入力を必須化する方法

アイスペシャル C-IV/C-V は患者情報入力必須化機能が搭載され、患者情報を入力しなければ撮影ができないように機能変更することが可能です。

この機能をお使いいただくことで、患者情報の入力忘れを防止することができます。

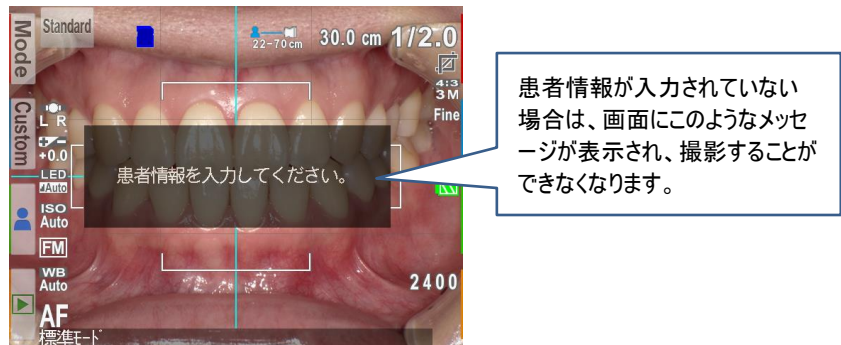

患者情報入力必須化 ON のとき

### [機能変更の方法]

機能変更は以下の QR コードを使用します。



【患者情報入力必須化 ON 用】




【患者情報入力必須化 OFF 用】

### [QR コードのスキャン方法]

1. 撮影モード画面で F2 キーを押すか、[Custom] タブをタッチしてください。



2. カスタムモード画面が出たら、[QR コードから入力] をタッチしてください。

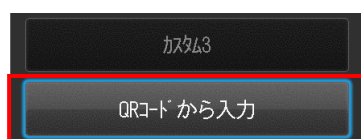



3. 白枠の少し内側に QR コードが収まるようカメラを前後左右に動かして調節し、シャッターを半押ししてください。



4. 下記の画面が表示されたら、「OK」をタッチしてください。



注記

- ・アイスペシャル C-II/C-IIIでは本機能をお使いいただくことはできません。
- ・患者情報メニュー内にある[QRコードから入力]からはスキャンできません。
- ・元の状態に戻すためには、患者情報入力必須化 OFF 用 QR コードをスキャンしてください。



## 仕様

アイスペシャル C-II/C-III/C-IV/C-V 専用 画像振り分けソフト (TrinityCore3 専用)

・動作環境

対応 OS

Microsoft Windows 10、Windows11



注記

本ソフトウェアはアイスペシャル C-II/C-III/C-IV/C-V 以外で撮影された画像ではご利用いただけません。



世界の歯科医療に貢献する

**株式会社 松風**

[www.shofu.co.jp](http://www.shofu.co.jp)

本社●〒605-0983京都市東山区福稲上高松町11

お客様サポート窓口(075)778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00(土日祝除く)